

Codice

PR-100.906**Indicazioni**

Sistema studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti allettati.

Descrizione

Kit composto da compressore con regolatore Taurus, sovrामaterasso a 18 elementi intercambiabili con cinghie di fissaggio, telo di copertura a cerniera su tre lati, tubi connettori CPC per il gonfiaggio e sistema CPR per procedure d'emergenza.

Controindicazioni ed avvertenze


Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Dopo avere posizionato il sovrामaterasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l'altezza complessiva non risulti eccessiva. Qualora ciò si verificasse si consiglia di utilizzare un materasso con altezza inferiore.

Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Istruzioni per l'uso

- 1. Tasto di accensione** (Power switch)
- 2. Regolatore di pressione** (Pressure adjust knob)
Consente di selezionare e programmare il livello di pressione desiderato.
- 3. Indicatore di pressione normale** (Normal pressure)
Segnala, tramite una luce verde, che la pressione ha raggiunto il livello programmato.
- 4. Indicatore di pressione bassa** (Low pressure)
Segnala, tramite una luce gialla o rossa, che la pressione è al di sotto del livello programmato. Tale situazione si verifica sempre in fase di gonfiaggio ed in caso di anomale fuoruscite d'aria dal materasso o dai connettori.
- 5. Reset per allarme** (Alarm reset)
L'allarme sonoro entra in funzione in caso di pressione bassa. Per disattivarlo, premere il tasto Reset. A questo punto comincerà a lampeggiare un indicatore luminoso per segnalare che la pressione non ha ancora raggiunto il livello programmato.
Per riattivare l'allarme sonoro, premere nuovamente il tasto Reset.
- 6. Tasto di utilizzo statico** (Static)
Consente di disattivare la modalità d'uso normale a scambio d'aria mantenendo entrambe le sezioni del sovrामaterasso in pressione.
L'utilizzo statico è indicato nei casi di spostamento o riposizionamento del paziente

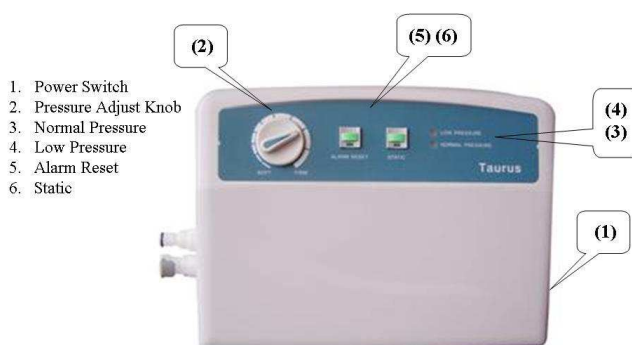

SCHEDA TECNICA
KIT ANTIDECUBITO TAURUS
COMPRESSORE CON REGOLATORE
E SOVRAMATERASSO AD ELEMENTI
INTERCAMBIABILI

Rev 00
Luglio 2008

Pulizia

Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Dispositivo non autoclavabile.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione

Singola

Garanzia

Compressore 24 mesi per difetti di fabbricazione
Materasso 12 mesi per difetti di fabbricazione

Caratteristiche del compressore

Tensione d'alimentazione **220 V - 50 Hz**
Consumo **10 W**
Fuoriuscita d'aria **6/7 litri al minuto**
Pressione **40 mmHg - 80 mmHg**
Ciclo di scambio d'aria **10 minuti**
Fusibili **2 da 1.5 A**
Dimensioni **28 x 20 x 10 cm**
Peso **2.2 kg**
Rumorosità **35-38 dBA**

Caratteristiche del sovrामaterasso

Dimensioni **200 x 86.5 x 12.5 cm**
Elementi intercambiabili **18**
Materiali componenti **telo di copertura: nylon/PU**
elementi intercambiabili: nylon/PVC
Colore **blu**
Portata **160 kg**

Valvola CPR per procedure d'emergenza
Tubi connettori CPC

Codice Nomenclatore 03.33.06.021

Codice CND: Z12040212

Progressivo di registrazione: 99708R

Sovramaterasso ad elementi intercambiabili PR-100.908

Codice CND: Y033306

N. Repertorio: 99700R

Compressore con regolatore TAURUS - PR-100.924

Codice CND: Y033309

N. Repertorio: 99702R

Produttore

INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE