

# SOFTCARE LEVEL 5 E 7

## Dati tecnici

### Caratteristiche funzionali

Materassi antidecubito specialmente progettati per offrire grande comfort ed alta prevenzione alle persone a domicilio.

Facili da gestire perché i singoli tubolari possono essere facilmente sostituiti e lavati in lavatrice domestica (asciugano velocemente anche all'aria) donano alla persona la gradevole sensazione di "riposare, morbidamente accolto".

Prevengono lesioni da decubito in pazienti allettati a rischio alto: lo strato di fibra cava siliconata assicura una pressione di contatto tale da diminuire i rischi conseguenti ad una occlusione capillare prolungata in soggetti a ridotta mobilità.

L'alta adattabilità all'appoggio della persona, e la sua capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a spostamenti del paziente o scivolamento (quando ad esempio si alza la testiera del letto) consente di ridurre i rischi di frizione e forze di taglio.

I tubolari contenenti la fibra, realizzati in cotone, assicurano una permeabilità all'aria tale da evitare i danni da macerazione; la fibra, infatti, ha un livello di traspirabilità molto elevato grazie al fatto che non è una massa solida e compatta, ma un reticolo di fibre in grado di trasportare aria durante micromovimenti e il cotone della fodera è altamente traspirante per mantenere inalterate le caratteristiche dell'imbottitura.

Nel modello SOFTCARE LEVEL 5 i singoli tubolari appoggiano su una base in poliuretano sagomato, che li mantiene nella giusta posizione ed offre la migliore stabilità, aumentando la sensazione di comfort.

Nel modello SOFTCARE LEVEL 7, oltre alla base in espanso sagomato, due supporti laterali in espanso ad alta densità permettono alla persona di appoggiarsi lateralmente per sollevarsi, migliorando la mobilità autonoma.

### Caratteristiche costruttive e materiali

Materassi antidecubito realizzati con 14 tubolari in cotone sanforizzato contenente fibra cava siliconata; dotati di rivestimento esterno in puro cotone sanforizzato con appositi inserti per contenere i cilindri.

**LEVEL 5:** base sagomata con alloggiamenti per contenere i tubolari in poliuretano espanso ad alta densità.

**LEVEL 7:** base sagomata con alloggiamenti per contenere i tubolari in poliuretano espanso ad alta densità e supporti laterali longitudinali in espanso ad alta densità.

La fibra utilizzata è cava, di alto e costante denaraggio (17 denari) e siliconata in filo; questo assicura alta elasticità e facilità di scivolamento delle fibre una sull'altra, per evitarne l'ammassamento e mantenere costanti le proprietà del materasso.

### Codici e misure

614500 = Level 5 - 195 x 85 x 18

614500I = Level 5 Ignifugo - 195 x 85 x 18

614700 = Level 7 - 195 x 85 x 18

614700I = Level 7 Ignifugo - 195 x 85 x 18

Dimensioni esterne materasso, in centimetri.

Per tutti il peso è di  $\pm 7$  Kg


### Direttive e Norme di Riferimento

- Direttive Il prodotto è conforme alla direttiva europea 93/42 inerente i dispositivi medici.
  - Norme armonizzate e norme tecniche di riferimento.
- Non esistendo alcuna norma armonizzata in materia di ausili antidecubito viene applicata la norma generica sui dispositivi per persone disabili EN 12182.
- Modalità con cui viene assicurata la conformità.

La conformità in materia di sicurezza è garantita dal fabbricante attraverso analisi dei rischi secondo la norma armonizzata EN 14971.

Per i dati di identificazione e i codici di riconducibilità, consultare le schede inserite nel CD allegato.

Test effettuato con il sistema di rilevamento delle pressioni Tek Scan secondo le disposizioni del protocollo Calgary.

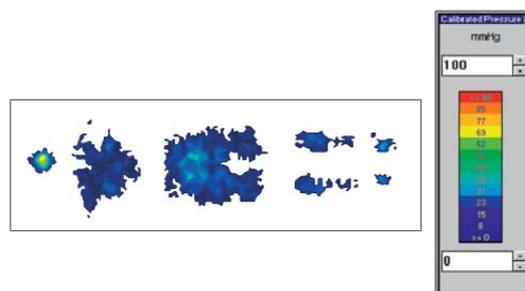

La scala di riferimento indica il rapporto tra l'intensità dei picchi di pressione di interfaccia e la tonalità del colore di riferimento. I colori indicano quindi, una pressione di bassa intensità associata al colore blu, ed una pressione di maggiore intensità associata al colore rosso (oltre i 100 mmHg, come da scala).



SOFTCARE LEVEL 5 e SOFTCARE LEVEL 7 sono materassi antidecubito costituiti da una serie di tubolari imbottiti in fibra cava siliconata alloggiati in una fodera traspirante.

Hanno efficacia decisamente alta; sono pertanto preventivi per pazienti a rischio alto ma sono anche adatti a pazienti con lesioni in atto, in condizioni fisiche generali discrete. Entrambi sono materassi molto confortevoli per il paziente, maneggevoli e molto semplici da gestire per gli assistenti. I cilindri trasversali sono foderati in cotone sanforizzato, traspirante, e contengono fibra cava siliconata, un procedimento che permette alle fibre di "scivolare" le une sulle altre senza ammassarsi tra loro o ai lati del materasso, ma assicurando sempre una buona elasticità alla superficie. I cuscini sono inseriti in una fodera, anch'essa in cotone traspirante, dotata dei necessari alloggiamenti per mantenere i tubolari nella giusta posizione anche durante le movimentazioni, come ad esempio quando si alza la testiera del letto. L'alta adattabilità di questo materasso all'appoggio della persona è data, quindi, sia dall'affondamento del corpo, con conseguente diminuzione della pressione, sia dalla capacità di deformazione dei tubolari contenenti la fibra, che sono in grado di assorbire le sollecitazioni dovute ai movimenti ed evitare i danni da frizione e forze di taglio.

La fibra, inoltre, assicura un ottimo livello di traspirazione poiché non è una massa compatta ma un reticolo di fibre in grado di trasportare aria durante i micromovimenti.

Supporti in espanso migliorano le performances di questi materassi, la cui efficacia è la più elevata tra quelli appartenenti alla stessa tipologia (materassi in fibra cava, ad inserti asportabili). Entrambi sono disponibili anche nella versione ignifuga.

**Eccellente comfort, ottima praticità, molto traspirante e dalla consistenza molto soffice con grande capacità di deformazioni rispetto ai movimenti del paziente, per prevenire frizioni e forze di taglio: contribuisce a dare al paziente sollievo e tranquillità.**

### Diminuzione della compressione:

Le qualità complessive collocano Softcare Level 5 (17-12 punti Braden; 16-11 punti Norton) e Sofcare Level 7 (17-11 punti Braden; 16-10 punti Norton) tra i presidi antidecubito con efficacia preventiva più alta nella categoria, quindi idonei a persone con rischio marcato. **Level 7 permette anche un appoggio laterale consistente, per migliorare gli aggiustamenti posturali autonomi.**

### Valutazione delle caratteristiche



## MODALITÀ DI GESTIONE

### Istruzioni di lavaggio

Tutti i prodotti della linea SOFTCARE possono essere facilmente lavati in acqua con comune detersivo e disinfettante. Sono assolutamente da vietare diluenti e trieline.

Lavare i singoli tubolari e la fodera in acqua a 60° max in comuni lava centrifughe domestiche o industriali. Utilizzare un comune detersivo con dose dimezzata rispetto a quella utilizzata per la biancheria.

### Asciugatura

I prodotti possono essere centrifugati in comuni cestelli rotanti ad una velocità massima di 500/600 giri al minuto. Dopo queste operazioni può avvenire l'asciugatura vera e propria in camera a circolazione d'aria (70° max) per circa 3 ore, o all'aria aperta in ambiente ben ventilato. Seguendo le istruzioni allegate al prodotto il materasso è in grado di sopportare sino a 100 lavaggi senza perdere le sue proprietà.

### ATTENZIONE

Il materasso viene già fornito completo di fodera in cotone sanforizzato, altamente traspirante. Tuttavia, per particolari esigenze il materasso può essere integrato con una delle sovralfodere impermeabili indicate da pag. 72, che assicurano il mantenimento di tutte le sue caratteristiche di prevenzione.