

CUSCINO IN GEL FLUIDO

Codice	Descrizione
CA-49	Cuscino in gel fluido 38 x 40 cm, altezza 4 cm
CA-50	Cuscino in gel fluido 40 x 40 cm, altezza 4 cm
CA-51	Cuscino in gel fluido 42 x 42 cm, altezza 4 cm
CA-52	Cuscino in gel fluido 45 x 45 cm, altezza 4 cm
CA-53	Cuscino in gel fluido 48 x 50 cm, altezza 4 cm

Indicazioni

Prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti costretti su carrozzine allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

Descrizione

Cuscino per la prevenzione del decubito composto da gel fluido e da una lastra di poliuretano racchiusi in una membrana protettiva in PVC dello spessore di 400 micron che consente il lavaggio ed impedisce la migrazione di oli minerali. Fodera di rivestimento a cerniera realizzata spalmato di poliuretano con base antiscivolo.

Materiali componenti fodera

Parte superiore	Spalmato di PU	55% Poliestere 45% Poliuretano
Parte inferiore	Tessuto antiscivolo	10% Pes-Poliestere 90% PVC
Portata		kg 110,00
Densità gel fluido		kg 40/m ³

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito. Si suggerisce l'utilizzo per un solo utente. In caso di riutilizzo, procedere preventivamente a sanificazione.

Modalità d'impiego

Posizionare il dispositivo con la cerniera rivolta verso lo schienale della seduta e la parte antiscivolo rivolta verso il basso.

Pulizia

Sacca: detergenti neutri o alcool.

Fodera: lavaggio a temperatura massima di 60° con detergenti neutri.



Non candeggiare



Non stirare



Non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo



Non lavare a secco

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Riconducibilità Nomenclatore: 03.33.03.006

Codice CND: Y033303

Numero di repertorio CA-49:

Numero di repertorio CA-50: 325728/R

Numero di repertorio CA-51: 616400/R

Numero di repertorio CA-52: 616406/R

Numero di repertorio CA-53:

Produttore INTERMED srl



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE