

 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEDA TECNICA CUSCINO AD ARIA IN PVC A DUE VALVOLE	Rev 00 Aprile 2008
--	---	--

Codice	2RLP4040	2RHP4040	2RLP4640	2RHP4640	2RLP4646	2RHP4646		2RHP4846
Altezza	6 cm	10 cm	6 cm	10 cm	6 cm	10 cm		10 cm
Misura	40x40 cm		46x40 cm		46x46 cm		50x46 cm	

Indicazioni

Cuscino antidecubito per carrozzine realizzato per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori di sedie a rotelle e a persone con limitata mobilità che trascorrono periodi prolungati in posizione seduta. Il cuscino contribuisce al mantenimento della postura corretta e previene l'insorgenza delle lesioni da decubito. Per pazienti ad alto rischio.

Descrizione

Il cuscino, realizzato in PVC, è composto da celle interconnesse gonfiate ad aria. Viene fornito completo di fodera traspirante con base antiscivolo, monopalla per il gonfiaggio e kit di riparazione.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Per un corretto impiego è necessario attenersi alle semplici operazioni riportate sul libretto delle istruzioni contenute in ogni confezione. Sebbene il cuscino sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Materiali componenti

PVC

Pulizia

Cuscino

Pulire con acqua e sapone neutro utilizzando un panno umido. Risciacquare sotto acqua corrente.

Non immergere il cuscino. Non lavare in lavatrice. Asciugare all'aria aperta senza utilizzare asciugabiancheria.

Non autoclavare.

Fodera

Lavare alla temperatura massima di 40°C. Non stirare.

Conservazione e smaltimento

Conservare in luogo fresco e asciutto in posizione piana. Smaltire il prodotto secondo le normative ambientali vigenti.

Confezione: scatola da 1 pezzo con fodera, monopalla e kit di riparazione


Codice Nomenclatore: 03.33.03.018

Garanzia: 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND:

Progressivo di registrazione:

Produttore: CLEARVIEW HEALTHCARE PRODUCTS, Inc

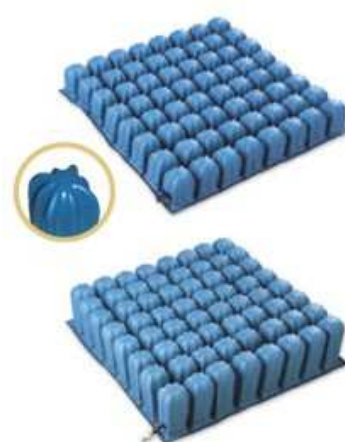

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE