

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>FASCIA ADDOMINALE CON BRETELLE</p>	<p>Rev 00</p> <p>Luglio 2008</p>
--	---	----------------------------------

Codice	19-08
--------	--------------

Indicazioni

Mantenimento della postura del paziente su carrozzine, comode o sedie e prevenzione delle cadute.

Descrizione

Supporto realizzato in vellutino accoppiato con parte interna in retina traspirante, imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione. Sistema di chiusura/apertura mediante clips rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso di emergenza.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento, ma non deve essere serrato eccessivamente. Consentire l'inserimento di una mano tra il paziente e il dispositivo. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle cadute e degli scivolamenti e per il mantenimento della postura del paziente, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero influenzare questi eventi. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo.

Materiali componenti

<u>Tessuto</u>	<i>vellutino accoppiato (Pam)</i>
<u>Tiranti</u>	<i>poliestere</i>
<u>Imbottitura</u>	<i>Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base Pes)</i>
<u>Parte interna</u>	<i>retina traspirante (Pes)</i>
(29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes)	

Finitura

Cuciture

Pulizia e disinfezione

Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40°C con detergenti neutri. Non stirare. Non candeggiare. Centrifuga ridotta. Possibilità di lavaggio a secco.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Codice nomenclatore 12.24.06.139

Garanzia 12 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y122406

N. Registrazione: 119653

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE