

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>FASCIA ADDOMINALE CON BRETELLE PER SIGNORA</b></p>	<p>Rev 00</p> <p>Luglio 2008</p>
--	---	----------------------------------

Codice	<b>23-08</b>
--------	--------------

**Indicazioni**

Mantenimento della postura del paziente su carrozzine, comode o sedie e prevenzione delle cadute.

**Descrizione**

Supporto realizzato in vellutino accoppiato con parte interna in retina traspirante, imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione. Sistema di chiusura/apertura mediante clips rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso di emergenza.

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento, ma non deve essere serrato eccessivamente. Consentire l'inserimento di una mano tra il paziente e il dispositivo. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle cadute e degli scivolamenti e per il mantenimento della postura del paziente, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero influenzare questi eventi. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo.

**Materiali componenti**

<u>Tessuto</u>	<i>vellutino accoppiato (Pam)</i>
<u>Tiranti</u>	<i>poliestere</i>
<u>Imbottitura</u>	<i>Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base Pes)</i>
<u>Parte interna</u>	<i>retina traspirante (Pes)</i>

(29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes)

**Finitura**

Cuciture

**Pulizia e disinfezione**

Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40°C con detergenti neutri. Non stirare. Non candeggiare. Centrifuga ridotta. Possibilità di lavaggio a secco.

**Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Confezione** 1 pezzo

**Codice nomenclatore** 12.24.06.139

**Garanzia** 12 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND: Y122406**

**N. Registrazione: 119653**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE