

## 8. GARANZIA

### CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA POST-VENDITA ARTICOLI CHINESPORT

La durata della garanzia è di 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia non copre i materiali di consumo, le batterie ricaricabili, e in generale tutto il materiale soggetto ad usura, i guasti causati da urti, cadute, uso errato o improprio, eventi accidentali, danni causati dal trasporto. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa, la garanzia decade automaticamente.

La riparazione delle apparecchiature sarà eseguita in relazione al guasto dichiarato.

Il preventivo dovrà essere richiesto espressamente.

L'eventuale pagamento si intende in contrassegno, salvo accordi particolari.

Per ogni controversia l'unico foro competente è quello di UDINE.

### RIPARAZIONI IN GARANZIA

Le riparazioni in garanzia dovranno essere richieste espressamente.

Le riparazioni in garanzia si intendono presso il nostro laboratorio e previa autorizzazione.

Per i prodotti inviati con l'imballo originale, la spedizione di ritorno sarà effettuata in porto franco.

Per la riparazione in garanzia occorre un documento fiscale dove la data d'acquisto rientri nei tempi di garanzia, (bolla di vendita, fattura d'acquisto, scontrino fiscale).

Qualora, al momento del controllo, il prodotto risulti perfettamente funzionante vengono comunque addebitate al cliente le spese di ricerca guasto.

### RIPARAZIONI FUORI GARANZIA

Per le riparazioni fuori garanzia effettuate nei nostri laboratori previa autorizzazione, le spese di trasporto sono a carico del cliente.

Non si emettono preventivi scritti per importi inferiori a € 50 +iva

Limitatamente alle parti sostituite nell'intervento effettuato, la garanzia sulla riparazione è di 12 mesi dal ritiro della macchina

Qualora, al momento del controllo, il prodotto risulti perfettamente funzionante vengono comunque addebitate al cliente le spese di ricerca guasto.

### RIPARAZIONI A DOMICILIO

In caso di riparazione presso il cliente, occorre richiesta scritta ove siano indicate le generalità complete del richiedente, il tipo di macchina ed il guasto.

Il costo chilometrico del trasferimento del tecnico è da concordare in relazione all'urgenza del cliente.

Nel caso in cui la macchina in oggetto dell'intervento sia in garanzia saranno addebitati solamente i costi del trasferimento.

Il tempo viene conteggiato dalla partenza del tecnico dal nostro laboratorio fino al suo rientro, l'ora di rientro sarà stimata sulla base del tempo impiegato all'andata.

### VENDITA PARTI DI RICAMBIO E CONSUMABILI

Gli ordini dovranno pervenire per scritto specificando il cliente, l'articolo, la modalità di spedizione, nonché i dati fiscali esatti del cliente.

L'importo minimo d'ordine è di € 26 + iva. Non si effettua vendita con emissione di fattura per importi inferiori a € 26 + iva

I tempi di evasione dell'ordine potranno variare in dipendenza della disponibilità del materiale.

Non si accettano resi per le parti di ricambio


Il pagamento sarà contrassegno, salvo accordi particolari.



CHINESPORT  
spa  
Via Croazia, 2  
33100 UDINE-ITALY  
Tel. 0432621621  
Fax 0432621620



## 01086 – PODOSCOPIO LUX

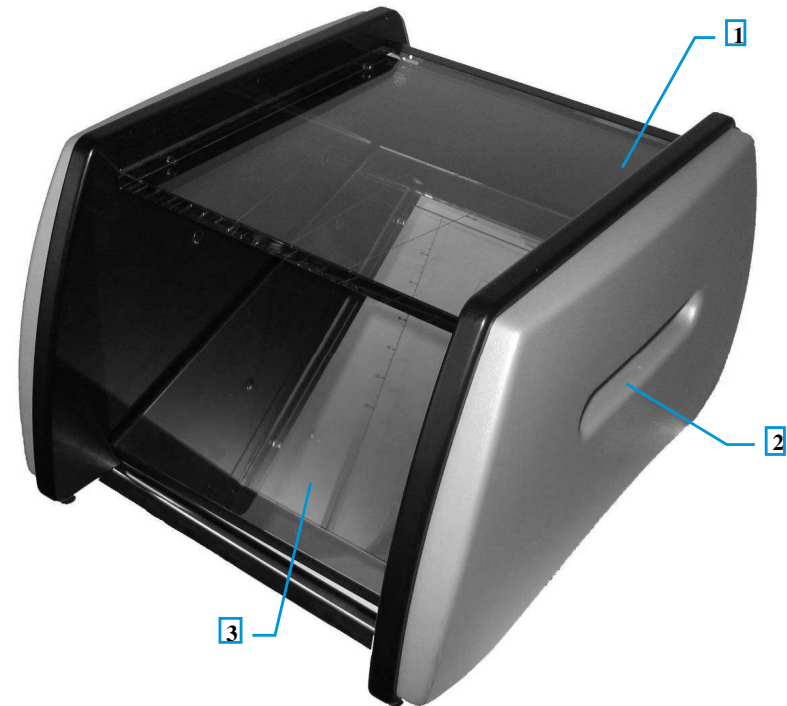

### 1. USO PREVISTO

Il PODOSCOPIO LUX è un apparecchio per l'analisi plantare dei piedi. Offre la possibilità di avere una reale visualizzazione della pianta del piede e di evidenziare i punti di maggior e minor carico.

Si consiglia l'uso del PODOSTABIL LUX (art. 01088 pedana con corrimano) per pazienti che non hanno una sufficiente stabilità ed equilibrio.



## 2. AVVERTENZE PARTICOLARI E LIMITAZIONI D'USO




L'apparecchiatura non richiede particolari condizioni ambientali. Deve essere utilizzata all'interno di un edificio con temperature ammesse da 5° a 40°C e con umidità compresa tra 10% e 80%.

L'apparecchiatura non deve essere utilizzata:

- In atmosfera a rischio d'incendio o esplosiva.
- In presenza di fiamme libere o oggetti incandescenti.
- Esposta alle intemperie o in atmosfera corrosiva.
- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- Con persone dal peso superiore ai 135 Kg
- Scollegare sempre la spina dalla rete:
  1. durante gli spostamenti dell'apparecchio
  2. prima di intervenire su qualsiasi parte elettrica.
- Non danneggiare il cordone di alimentazione (evitare schiacciamenti, non staccare la spina tirando il cavo, ecc.). Controllare frequentemente le condizioni del cavo ed in caso di dubbi sulle sue condizioni richiedere la sostituzione.
- Non versare liquidi sulle parti elettriche dell'attrezzo.
- Non collegarsi ad un impianto elettrico che non sia conforme alle Norme vigenti per lo stesso.
- Verificare che la tensione di rete corrisponda con quella indicata dai dati tecnici dell'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura deve essere utilizzata in situazione di buona stabilità.
- Non sottoporre lo specchio e il cristallo a colpi o ad urti.
- Fare attenzione che il paziente non incespichi nel frontalino di riscontro.
- Accertarsi dell'equilibrio autonomo del paziente.



## 3. PRINCIPALI COMPONENTI

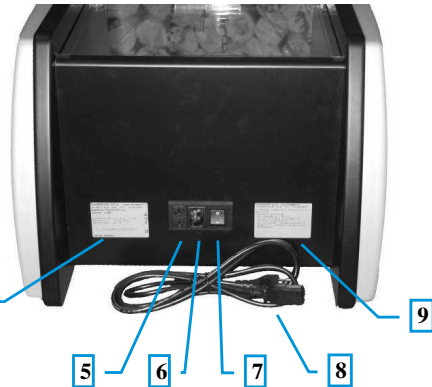

I principali componenti del podoscopio:

1. piano di carico in cristallo
2. maniglia
3. specchio sottostante per il rilevamento
4. etichetta di prodotto
5. fusibili
6. presa alimentazione
7. interruttore 0/1
8. cavo di alimentazione separabile
9. etichetta avvertenze

## 4. PREDISPOSIZIONE ED UTILIZZO

- Estrarre l'apparecchiatura dall'imballo utilizzando le maniglie laterali.
- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella dei dati di targa dell'apparecchio. Collegare il cavo elettrico in dotazione.
- Accendere le luci di illuminazione del cristallo agendo sull'interruttore.
- Far salire sull'apparecchiatura il paziente coi piedi scalzi.
- Utilizzare lo specchio sottostante per il rilevamento.

## 5. MANUTENZIONE E PULIZIA



Prima di intervenire su qualsiasi parte elettrica scollegare il cavo di alimentazione.

Sostituire i fusibili esclusivamente con altri da 0.63 AT 250 V, 5x20mm; per la sostituzione dei fusibili attenersi alle seguenti istruzioni:

- con un cacciavite svitare girando in senso antiorario di 90° il cappuccio del portafusibile ed estrarlo completamente
- sfilare dal cappuccio il fusibile e sostituirlo con uno integro dalle stesse caratteristiche
- riavvitare il cappuccio portafusibile nella sua sede.

**PER LE RIPARAZIONI DIVERSE DALLA SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE RIVOLGERSI A TECNICI SPECIALIZZATI.**

Dopo ogni esame disinfettare il piano di cristallo con una soluzione disinfettante a largo spettro quale "amuchina".

## 6. SCHEDE TECNICHE

cod. art.: 01086	
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Alimentazione	Primario: 230V-50Hz 0,2A
Dimensioni mm	560x452x320h
Dimensioni piano di lavoro	324x360
Peso	15,5Kg
Carico statico massimo	135Kg
Fusibili	0,63A 250V 5x20mm

## 7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Codice articolo - Denominazione prodotto	<b>01086 Podoscopio LUX</b> <i>Apparecchio per l'analisi plantare del piede</i>
Classe di appartenenza (93/42)	<b>I</b>
Classe di isolamento (CEI 62.5)	<b>I</b>
Tipo (CEI 62.5)	<b>B</b>
<b>Il Podoscopio LUX è realizzato in conformità alle Direttiva Comunitaria 93/42</b>	
CHINESPORT S.p.A. (Rapp. Legale)	