

# LIPOZERO G39

## Cavitazione Professionale

**49 programmi**

4 UltraCav39 - 6 CaviMax150 - 10 MF-Plus - 5 Mobilizzazione Adiposità NorAd-526 - 4 Adiposità Maschile - 10 Bellezza - 10 Pelle

LA CAVITAZIONE Ultrasonica è la più efficace metodologia di lavoro per combattere la Cellulite ed eliminare il grasso superfluo

### MECCANISMO D'AZIONE:

- Quando il tessuto adiposo viene raggiunto in profondità da energia ultrasonica a bassa frequenza si determinano al suo interno fasi cicliche di compressione e decompressione che producono la formazione di cavità contenenti gas e vapore
- Grazie a questo meccanismo d'azione le cavità create si continuano ad espandere e a comprimersi con sempre maggiore energia fino ad esplodere con conseguente demolizione del tessuto adiposo
- Il grasso contenuto negli adipociti viene così liberato ed eliminato attraverso la circolazione sanguigna, senza che vengano minimamente danneggiati i tessuti circostanti

### LE FREQUENZE DELLA CAVITAZIONE PROFESSIONALE GLOBUS

Il meccanismo cavitazionale si produce efficacemente solo con basse frequenze, inferiori a 600 KHz, perché solo queste riescono a penetrare in profondità per demolire il tessuto adiposo. Più bassa è la frequenza maggiore è la profondità e l'azione d'urto.

- **39 KHz** per Cellulite e Pliche adipose particolarmente spesse e profonde e che necessitano di un'azione particolarmente energetica (Top Professional)
- **150 KHz** per Cellulite e adiposità un po' meno spessa e profonda (Professional)
- **526 KHz** per associare alla demolizione adiposa la produzione di Noradrenalina (NorAd-526) che fa bruciare i grassi grazie all'aumento del metabolismo. Particolarmente utilizzata per l'adiposità addominale maschile
- **3 MHz** per trattamenti di bellezza più superficiali e per la pelle

### MF PLUS - TRATTAMENTI MULTIFREQUENZA: ESCLUSIVA MONDIALE GLOBUS

Ricerche scientifiche internazionali hanno dimostrato che l'applicazione di Cavitazione a Modulazione di Frequenza (alternanza di frequenze diverse) produce migliori risultati perché l'associazione di frequenze diverse permette di agire contemporaneamente alle diverse profondità e di personalizzare i trattamenti in funzione della tipologia di cellulite

**NUOVA VALIGETTA MODA:** LIPOZERO G39 viene fornito in una pratica e moderna valigetta in alluminio e ecopelle che ne agevola il trasporto permettendoti di essere sempre alla moda.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 3 W/cm<sup>2</sup>  
 Uscite: 1 - Manipolo: 2, Ø mm50 e Ø mm42 - IP65  
 Alimentazione: a rete 220V 50/60 Hz o a batteria ricaricabile (non in dotazione)  
 Dimensioni: 17 x 22 x 6 cm  
 Display retroilluminato  
 Emissione: continua e pulsata  
 Frequenza di emissione: 3 e 1 MHz, 526, 150 e 39 KHz  
 Dispositivo CE

### DOTAZIONE

1 valigetta  
 1 ultrasuono Lipozero G39  
 1 manipolo Multifreq. (3 e 1 MHz, 526 e 150 KHz)  
 1 manipolo 39KHz  
 1 confezione Gel  
 1 alimentatore  
 1 manuale operativo



# GLOBUS

# LIPOZERO G39

## Elenco programmi

### ULTRA-CAV 39 KHz

Total Body 3-6 cm  
Total Body > 6 cm  
Cosce-glutei 3-6 cm  
Cosce-glutei >6 cm

### CAVI-MAX 150 KHz

Lipolisi  
Lipolisi fascia addominale  
Cellulite  
Cellulite edematosa  
Cellulite fibrosa  
Cellulite con pelle a buccia d'arancia

### MF-PLUS

Lipolisi  
Cellulite  
Cellulite edematosa  
Cellulite fibrosa  
Culotte de cheval  
Cellulite con pelle a buccia d'arancia  
Adiposità maschile addome  
Adiposità maschile fianchi  
Adiposità maschile arti inferiori  
Adiposità maschile arti superiori

### MOBILIZZAZIONE ADIPOSITA' NorAd-526

Lipolisi-NorAd-526,  
Cellulite- NorAd-526,  
Adiposità- NorAd-526,  
NorAd-526 1,  
NorAd-526 2;

### ADIPOSITA' MASCHILE

Adiposità maschile addome  
Adiposità maschile fianchi  
Adiposità maschile arti inferiori  
Adiposità maschile arti superiori

### BEAUTY

Rassodamento  
Massaggio  
Modellamento  
Modellamento gambe  
Modellamento addome  
Drenaggio  
Drenaggio gambe  
Drenaggio braccia  
Smagliature  
Applicazione principi attivi

### PELLE

Acne  
Lifting facciale  
Trattamento rughe  
Cicatrici  
Couperose  
Foruncoli corpo  
Foruncoli viso  
Skin restructure  
Skin smoothing  
Photoaging



# GLOBUS