

STABILIZZATORE DI CAVIGLIA

Art. 017

Tutore per stabilizzare la caviglia dopo traumi e lesioni muscolari o tendinee gravi in cui è necessario garantire un efficace immobilizzo ed evitare i movimenti di inversione ed eversione del piede, contrastando eventuali cedimenti laterali dell'articolazione.



Indicazioni

- Patologie traumatiche: Distorsioni - Tendiniti - Lussazioni.
- Fase riabilitativa: Sostegno passivo per il recupero funzionale della caviglia.
- Ottimo sostegno durante la pratica di attività sportive.

Caratteristiche

Colore BLU. Ambidestra. E' composto da due parti:

- una calza aperta posteriormente, facile da indossare, e molto sottile;
- una benda (funzionale) da applicare sopra che, seguendo il classico bendaggio ad otto tipo taping, permette il controllo costante del grado di inversione ed eversione.




Benefici


Grazie all'apertura posteriore l'applicazione è semplice e indolore. Il sistema di chiusura New Edge permette di differenziare il grado di compressione desiderato, in tre punti diversi dell'articolazione. E' possibile regolare costantemente il grado di eversione ed inversione del piede, anche a scarpa indossata (come indicato in figura).

Componenti specifici

Al fine di assicurare comfort e permettere un utilizzo prolungato nel tempo, è stata posta particolare cura nella selezione del tessuto. Esso è composto da una fitta rete di fili di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti che permettono l'aggancio del normale velcro uncinato.

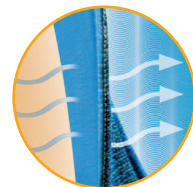

IL TESSUTO 100% TRASPIRANTE

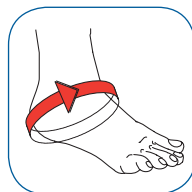

New EDGE[®]
LINE

Size	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza del collo del piede (CM)	21-26	26-30	30-36	36-40	40-45

STABILIZZATORE DI CAVIGLIA Art. 017

Come si indossa

Si consiglia di indossarla sopra una calza:

- a) infilare la calza contenitiva come mostrato in figura 1 - 2 - 3 chiudendola prima posteriormente, poi anteriormente, regolando il grado di compressione.
- b) applicare quindi il bendaggio funzionale come mostrato nelle figure 4 - 5 - 6, fissando per prima cosa il velcro posteriore sulla calza.

