

CAVIGLIERA FUNZIONALE PER LEGAMENTI

Art. 016

Dispositivo per il supporto e la protezione di lesioni muscolari o ai legamenti, ed infiammazioni articolari o tendinee causate da traumi, stress o sforzi eccessivi. Integrata da una fascia elastica molto resistente, evita un'eccessiva abduzione e adduzione della caviglia, pur permettendone la mobilità.



Indicazioni

- Patologie traumatiche: Distorsioni - Tendiniti - Versamenti.
- Fase riabilitativa: Sostegno passivo per il recupero funzionale in fase avanzata.
- Protezione durante la pratica di attività sportive.

Caratteristiche

Colore BLU. La posizione di chiusura può essere facilmente regolata e corretta, al fine di ottenere il grado di tensione desiderato ed adeguato ai bisogni individuali. Non ostacola la circolazione sanguigna. Ambidestra.




Benefici

Comoda ed adattabile in ogni tipo di scarpa.

Componenti specifici

Per la sua realizzazione è stato utilizzato uno speciale tipo di tessuto elastico composto da una fitta rete di fili di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti che permettono l'aggancio del normale velcro uncinato.

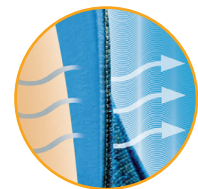

IL TESSUTO 100% TRASPIRANTE



New EDGE[®]
LINE

Size	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza del collo del piede (CM)	21-26	26-30	30-36	36-40	40-45

CAVIGLIERA FUNZIONALE PER LEGAMENTI Art. 016

Come si indossa

Si consiglia di indossarla sopra una calza:

- a) infilare la calza lasciando verso l' esterno l' attaccatura delle fasce supplementari, come mostrato in figura 1.
- b) procedere come mostrato nelle figure 2 - 3 - 4.

