

CAVIGLIERA ELASTICA CON BENDAGGIO A 8 Art. 015

Questa cavigliera può considerarsi una moderna fasciatura ad azione contenitiva e protettiva. La banda elastica integrata che riproduce il classico bendaggio a 8 intorno all'articolazione, evita un'eccessiva abduzione e adduzione della caviglia.



Indicazioni

- Patologie traumatiche: Distorsioni, Tendinite e Lussazioni.
- Fase riabilitativa: Sostegno passivo per il recupero funzionale della caviglia.
- Sostegno e protezione durante la pratica di attività sportive.

Caratteristiche

Colore BLU. Ambidestra e taglia unica. Aperta posteriormente per un'applicazione facile e indolore.




Benefici

Grazie al suo caratteristico sistema di chiusura, è possibile ottenere un'infinità di regolazioni in funzione dei differenti carichi di tensione desiderati.

Componenti specifici

Per la sua realizzazione è stato utilizzato un particolare abbinamento di due tessuti: un soffice velluto di cotone nella parte interna, estremamente confortevole e traspirante; all'esterno un particolare tessuto composto da una fitta rete di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti al fine di permettere l'ancoraggio del velcro.

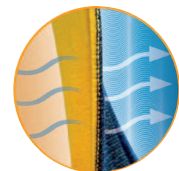

100% COTONE SULLA PELLE

New EDGE[®]
LINE

Size

Misura unica

CAVIGLIERA ELASTICA CON BENDAGGIO A 8 Art. 015

Come si indossa

Può essere indossata a diretto contatto della pelle:

- a) infilare la calza, quindi chiudere le chiusure a velcro sulla caviglia; regolare come mostra la figura 1 - 2 - 3 - 4.
- b) tirare le due bende supplementari e incrociarle intorno all' articolazione come mostra la figura 5 - 6 - 7.

