

POLSIERA Art. 032

Supporto di protezione del polso in caso di lesioni muscolari e/o infiammazioni articolari e tendinee causate da piccoli traumi, stress o sforzi eccessivi.



Indicazioni

- Patologie traumatiche: Tendiniti - Borsiti.
- In fase di riabilitazione o per prevenzione di lesioni muscolari e/o infiammazioni articolari e tendinee.
- Ottima durante la pratica di attività sportive.

Caratteristiche

Colore BLU. Esclusivo tessuto PAVIS in cotone, anallergico e traspirante, 100% cotone sulla pelle.




Benefici


Sistema di allacciatura semplice e facilmente regolabile.
NON CONTIENE NEOPRENE.

Componenti specifici

Per la sua realizzazione sono stati utilizzati due tipi di tessuto in abbinamento tra loro: un soffice velluto di cotone nella parte interna, estremamente confortevole e traspirante; all'esterno un particolare tessuto composto da una fitta rete di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti al fine di permettere l'ancoraggio del velcro.

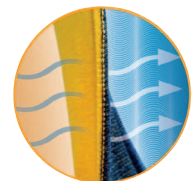

100% COTONE SULLA PELLE

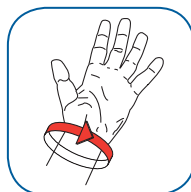

New EDGE[®]
LINE

Size	REG	EXT
Circonferenza del polso CM	14-24	22-34

POLSIERA Art. 032

Come si indossa

Indossare a diretto contatto della pelle osservando le istruzioni in figura:

- a) chiudere la prima chiusura a velcro e infilare la polsiera. Eventualmente regolare la misura (fig. 1).
- b) adattare la chiusura e la tensione del velcro (fig. 2 - 3).

