

 <p>Via Ludovico d'Aragona, 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<h2>SCHEMA TECNICA</h2> <h3>KIT ANTIDECUBITO LION</h3> <h3>COMPRESSORE CON REGOLATORE</h3> <h3>E SOVRAMATERASSO A BOLLE</h3>	<p>Rev 00</p> <p>Dicembre 2013</p>
---	--	------------------------------------

Codice	Descrizione
PR-100.705	Kit antidecubito LION
PR-100.726	Compressore con regolatore LION
PR-100.708	Sovramaterasso a bolle d'aria

Indicazioni

Prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

Descrizione

Kit composto da compressore con regolatore a ciclo alternato, sovrasmaterasso a bolle a rilascio d'aria con lembi di fissaggio, tubi connettori per il gonfiaggio e set di riparazione. La differenza di pressione tra file di bolle alternate consente la movimentazione costante della superficie corporea a contatto e concorre, in questo modo, alla prevenzione delle lesioni da decubito.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Dopo avere posizionato il sovrasmaterasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l'altezza complessiva non risulti eccessiva. Qualora ciò si verificasse si consiglia di utilizzare un materasso con altezza inferiore. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Pulizia

Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non utilizzare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Dispositivo non autoclavabile.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Caratteristiche del compressore PR-100.726

Alimentazione	220V - 50Hz
Consumo	8 W
Fuoriuscita d'aria	4,5 litri al minuto
Pressione	40 mmHg - 120 mmHg
Ciclo di scambio d'aria	10 minuti
Fusibile	1 da 1A
Frequenza	50-60 Hz
Dimensioni	24 x 12 x 12 cm
Peso	1.6 kg

Classe di isolamento II
Apparecchio di tipo BF

Ricambi disponibili per compressore PR-100.726

A-1	Coperchio
A-224	Aeratore completo
A-25	Supporto antishock aeratore
A-34	Motorino scambiatore
A-41	Connettore
A-47	Manopola di regolazione
A-48	Interruttore on/off
A-5360	Base completa



Caratteristiche del sovrmaterasso PR-100.708

Dimensioni (con lembi)	300 x 90 x 8 cm
Superficie utile	200 x 90 cm
Bolle d'aria	130
Materiale componente	PVC a bassa tossicità - UNI EN 71-3
Spessore	0,4 mm
Colore	beige
Portata	120 kg

Kit di riparazione incluso

Confezione Singola

Imballo 6 pezzi

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/EC rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Compressore	24 mesi per difetti di fabbricazione
Materasso	12 mesi per difetti di fabbricazione

Codice Nomenclatore 03.33.06.018

Kit antidecubito LION – PR-100.705

Codice CND Z12040212
N. Repertorio 95303

Compressore con regolatore LION – PR-100.726

Codice CND Y033309
N. Repertorio 1206699/R

Sovramaterasso a bolle d'aria – PR-100.708

Codice CND Y033306
N. Repertorio 99700/R

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

