

LECKEY[®]

SUNRISE
MEDICAL

Squiggles
Seat

~~Star~~
squiggles



LECKEY^o

L'unione fa la forza.

Lavoriamo tutti i giorni con medici, terapisti e utenti per progettare soluzioni che tengano conto delle esigenze sia funzionali sia estetiche. Grazie alle più recenti tecnologie e conoscenze cliniche offriamo risposte pratiche che facilmente si integrano nella vita di tutti i giorni, perché per noi vivere significa muoversi, divertirsi, partecipare attivamente.

Costruiam il progresso

Ci prendiamo cura della vostra postura durante tutta la giornata. Vi supportiamo quando siete seduti o in piedi, mentre camminate o giocate e anche in bagno mentre vi godete un bel bagno rilassante...



no
so.



Ci siamo impegnati a fare la nostra parte per supportare i bambini a dare il massimo delle loro possibilità ogni giorno, seguendo i nostri principi fondamentali:

- 1 soddisfare il bambino senza trascurare l'aspetto clinico
- 2 pratico da utilizzare e leggero
- 3 resistente e affidabile
- 4 gradevole e accattivante
- 5 modulare



~~Squiggles~~
Squiggles



Il nuovo sistema di postura Squiggles, grazie ai suoi colori brillanti e alle soluzioni tecniche adottate, frutto della continua ricerca clinica, riesce a soddisfare le esigenze posturali, ma anche quelle emotive di un numero sempre crescente di bambini e delle loro famiglie in ogni momento della giornata, a casa come a scuola o all'aperto.



Il nuovo sistema di postura Squiggles, per bambini da 1 a 5 anni, presenta numerose innovazioni e materiali all'avanguardia per renderlo ancora più pratico e confortevole.

Più pratico

Fodere lavabili in lavatrice a 40°

Più affidabile

Tutta la viteria è dotata di guarnizioni antivibrazione per evitarne la perdita accidentale

Più confortevole

Un'unica imbottitura spessa 30 mm assicura un comfort maggiore al bambino e lui è più libero di concentrarsi sulle sue attività.



E abbiamo fatto molto di più!

Testa

L'appoggiatesta anatomico più ampio fornisce un maggiore sostegno laterale.

Tronco

Il supporto avvolgente per le spalle incrementa l'altezza dello schienale di 75 mm.

La nuova manopola di regolazione è più pratica e più affidabile.

Abbiamo migliorato il sistema di fissaggio del tavolino.

Bacino

La nuova cintura pelvica a 4 punti è stata rinforzata nei punti di fissaggio per dare un maggiore contenimento anche a chi ha forti spasmi muscolari.

La regolazione in larghezza dei supporti laterali per bacino è stata incrementata di 40 mm permettendo di arrivare ad una larghezza massima della seduta di 260 mm.

Gambe e piedi

Imbottiture opzionali per i supporti laterali delle gambe (+ 30 mm) che permettono di correggere un atteggiamento in abduzione in soggetti ipotonici. Altezza minima dalla seduta all'appoggiatesta ridotta da 160 mm a 122,5 mm.

Telaio

Incremento di 10° della regolazione della base HI-Low che permette ora di raggiungere i 40° di basculamento.





16. Maniglione di spinta

10. E' possibile scegliere varie tipologie di appoggiatesta, anche Whitmyer.

9. Supporto regolabile per le spalle

5. Schienale imbottito regolabile in altezza

6. Supporti laterali per il tronco

3. Cintura pelvica a 4 punti

4. Supporti laterali regolabili per il bacino.

17. Imbottitura supplementare per i supporti per le gambe (opzionali)

13. Inclinazione regolabile dello schienale

12. Sandaletti regolabili con cinturini

11. Unità posturale per arti inferiori regolabile

15. Base Hi-Low con regolazione del basculamento



1. Supporto lombosacrale



2. Supporti a cuneo



7. Pelotta frontale



8. Stabilizzatore pettorale



14. Tavolino



1. Il supporto lombosacrale flessibile è progettato per sostenere la parte inferiore della spina dorsale favorendo la stabilizzazione del bacino e l'estensione della parte inferiore del tronco.
2. I supporti a cuneo fissabili sotto l'imbottitura della seduta evitano al bambino di scivolare in avanti e di assumere una postura sacrale scorretta.
3. La cintura pelvica a 4 punti è imbottita e regolabile e permette una buona stabilità del bacino, garantendo una postura comoda e sicura.
4. Gli elementi di contenimento laterale del bacino sono regolabili in larghezza per ottimizzare il supporto posturale.
5. Lo schienale imbottito è in grado di adattarsi all'altezza del bambino.
6. Il sostegno laterale è assicurato da supporti toracali imbottiti che aiutano a mantenere la giusta postura del tronco.
7. La pelotta frontale può essere fissata ai supporti laterali per garantire ulteriore sostegno pur lasciando ampia libertà di movimento.
8. Lo stabilizzatore pettorale può essere utilizzato nel caso il bambino necessiti di un supporto sia laterale che frontale.
9. Il supporto per le spalle con le estremità regolabili favorisce la corretta postura aiutando a bilanciare il capo e il tronco rispetto al bacino.
10. Gli appoggiatesta utilizzabili sono anche quelli della gamma Whitmyer.
11. L'unità posturale per arti inferiori è regolabile in altezza e la pedana appoggiapiedi può essere regolata in inclinazione per garantire un'adeguata base di appoggio indispensabile per una buona funzionalità e controllo della parte superiore del corpo. La possibilità di ribaltamento della pedana appoggiapiedi agevola le operazioni di trasferimento.
12. I supporti per i piedi regolabili possono essere utilizzati per favorire una sicura postura dei piedi.
13. Il meccanismo di reclinazione dello schienale assicura che i vari supporti del tronco e del capo mantengano una posizione corretta e funzionale anche durante la regolazione dell'inclinazione dello schienale stesso.
14. Il tavolino offre un piano di appoggio per innumerevoli attività. Una barra di supporto per giochi può essere applicata per facilitare certe attività manipolatorie.
15. La base Hi-Low può essere regolata in altezza per permettere di raggiungere il piano del pavimento o quello di un tavolo, facilitando così al bambino la partecipazione sia ad attività di gruppo che individuali. E' dotata di un sistema di regolazione del basculamento per favorire posture attive o di maggior riposo. Tutte le regolazioni possono essere compiute con sicurezza anche quando il bambino è seduto.
16. Il maniglione di spinta permette di spostare agevolmente l'ausilio in casa o a scuola.
17. Le imbottiture supplementari possono essere applicate quando è necessario un maggior contenimento laterale dei femori e delle ginocchia.

Sistema di Postura Squiggles

Dati tecnici

Età	1 - 5 anni	
Portata massima	22 kg	
Altezza dell'utente	Min. 750 mm	Max. 1100 mm
Larghezza sedile	Min. 160 mm	Max. 260 mm
Profondità sedile	Min. 190 mm	Max. 290 mm
Larghezza supporto ginocchia	Max. 90 mm	
Inclinazione piatto pedana	da -10° a + 10°	
Distanza tra i supporti laterali per il tronco	Min. 160 mm	Max. 220 mm
Altezza dello schienale	Min. 320 mm	Max. 380 mm
Altezza dello schienale (con supporto per le spalle)	Min. 420 mm	Max. 480 mm
Reclinazione schienale	da - 10°	a + 25°
Lunghezza delle gambe	Min. 122,5 mm	Max. 270 mm
Basculamento	Prono 10°	Supino 30°
Altezza seduta/terra (base Hi-Low)	Min. 270 mm	Max. 650 mm
Altezza del tavolino	Min. 115 mm	Max. 170 mm
Misure del tavolino	460 mm x 560 mm	
Dimensioni e peso dell'unità di postura	Peso 6 kg Larghezza 370 mm	Lunghezza 370 mm Altezza 400 mm
Dimensioni e peso della Base Hi-Low	Peso 9 kg Larghezza 540 mm	Lunghezza 640 mm Altezza 315 mm

Basi

Base Hi-Low
per interni
con comando a pedale



Unità di Seduta

Colori



Verde



Arancione



Azzurro



Rosa

Accessori



Appoggiatesta planare



Appoggiatesta anatomico avvolgente



Imbottitura planare dell'appoggiatesta



Supporti laterali per appoggiatesta planare



Supporto regolabile per le spalle



Pelotta frontale



Supporti laterali fissi rigidi per il tronco



Supporti laterali per il tronco swing away



Riduttore di profondità (25 mm)



Stabilizzatore pettorale



Cintura pelvica



Cuneo per abduzione



Pedana unica e rialzo pedana (non illustrato)



Sandaletti regolabili con cinturini



Tavolino



Inserto imbottito per tavolino



Barra di supporto per giochi per tavolino

Fondata nel 1983,
Leckey è universalmente
riconosciuta come
azienda all'avanguardia
nella ricerca e sviluppo
di prodotti in grado di
fornire ad adulti e bambini
con bisogni speciali un
efficace aiuto che permetta
loro di partecipare
attivamente a tutte le
attività della vita
quotidiana.

Noi utilizziamo un approccio clinico a tutto campo per ideare e sviluppare i nostri prodotti. Avvalendoci degli studi effettuati con le migliori università e dei test che terapisti occupazionali e fisioterapisti svolgono costantemente con gli utenti e i loro familiari, continuiamo a progettare e perfezionare supporti posturali in grado di soddisfare, in modo semplice ma estremamente efficace, le esigenze posturali che la vita di tutti i giorni, a tutte le età, richiede.

Spaziando dall'intervento precoce, all'infanzia, fino all'età adulta, il team di progettisti, terapisti e bioingegneri della Leckey ricerca continuamente soluzioni che possano conciliare le esigenze cliniche dei professionisti della riabilitazione con le aspettative sociali ed emotive degli utenti e dei loro familiari.

Per ottenere ciò, lavoriamo tutti i giorni con loro e proprio grazie al loro aiuto siamo capaci di realizzare prodotti che ora sono conosciuti in tutto il mondo.

A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento.





Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.it

www.SunriseMedical.it



Ci prendiamo
cura della vostra postura
durante tutta la giornata.
Vi supportiamo quando
siete seduti o in piedi,
mentre camminate
e giocate e anche in
bagno mentre vi godete
un bel bagno
rilassante...