

# 100% ROLLATOR



GEMINO



# GEMINO - ROLLATOR AL 100%, PER VOI

State cercando un deambulatore rollator che che si adatti perfettamente al vostro stile di vita attivo e vi permetta di muovervi in tutta sicurezza e comfort fuori e dentro casa? Allora il rollator Gemino è la scelta perfetta per voi.

I nostri rollator leggeri e pluri-premiati stabiliscono nuovi standard in qualità, comfort, sicurezza e design. E vi consentono di essere voi stessi!

Gemino è disponibile in vari modelli, misure e colori. Naturalmente è disponibile anche un modello speciale, per utilizzo medico, se doveste avere bisogno di qualcosa di veramente particolare per muovervi in sicurezza. Troverete sempre un Gemino adatto a voi, al vostro stile e alla vostre necessità. Qualunque sia la vostra scelta, avrete sempre un rollator al 100%.

100% comfort, sicurezza e design.

**E' fantastico poter contare su qualcosa al 100%.**



Gemino 20

Gemino 30

Gemino 30 con SpeedControl

Gemino 60

Gemino 30 Walker

Gemino 60 Walker

Gemino 30 Parkinson



# 100% COMFORT



# PER PASSEGGIARE IN TUTTA SERENITA'

I nostri rollator Gemino sono stati progettati pensando al vostro comfort e al vostro gradimento.

Telaio leggero in alluminio, materiali di alta qualità e massima stabilità consentono di camminare in tutta serenità sia al chiuso che all'aperto. Grazie alla regolazione in altezza memorizzabile, le maniglie ergonomiche si troveranno sempre in posizione corretta. E se avete bisogno di una pausa potrete sedervi senza paura sull'ampio sedile. Naturalmente potrete portare il vostro rollator con voi anche in viaggio: si piega facilmente e occupa poco spazio.

**Provate il Gemino che avete scelto e scoprite quanto camminare possa essere facile e piacevole!**

## // SCELTA DELLA MISURA

Scegliere la misura corretta non vuol dire solo camminare in modo sicuro e confortevole: dato che ogni misura ha altezze di seduta differenti significa mantenere una postura corretta anche in posizione seduta (per maggiori informazioni fare riferimento ai Dati Tecnici a pag. 22).

## // FACILE REGOLAZIONE DELLE MANIGLIE

Scoprite quanto sia facile regolare le maniglie ergonomiche perché siano adatte alla vostra altezza. Si bloccano in posizione e saranno sempre all'altezza giusta per voi grazie alla funzione di memorizzazione.

## // FACILE DA PIEGARE CON IL MECCANISMO DI BLOCCO AUTOMATICO

Il sistema unico di Gemino 'fold-click' rende estremamente facile piegare il vostro rollator per riporlo comodamente, basterà abbassare completamente le maniglie per ridurre al minimo le dimensioni. Molto pratico per spazi piccoli e trasporto in auto.

A proposito: sapevate di poter utilizzare il vostro rollator in modo sicuro anche parzialmente piegato qualora vi trovaste in spazi molto stretti?

## // PRATICO UTILIZZO QUOTIDIANO

Con il vostro Gemino potrete camminare in modo sicuro e confortevole. Volete fermarvi un attimo? Avrete a disposizione un confortevole supporto per la schiena per un sostegno maggiore. Dovete portare tante cose con voi? Utilizzate il pratico cestino o scegliete una delle eleganti borse colorate.



100%  
SICUREZZA



# OVUNQUE ANDIATE

Con il vostro Gemino vi sentirete sicuri. Il suo telaio robusto e stabile vi darà massima sicurezza in tutte le configurazioni e le maniglie ergonomiche vi offriranno un eccellente supporto.

Ma c'è di più: molte delle caratteristiche che scoprirete da qui in avanti sono la prova che abbiamo lavorato per garantirvi il massimo in termini di stabilità, comfort e personalizzazione.

Gemino: goditi una vita attiva in totale sicurezza!

## // FRENI ECCEZIONALI

Disegnati in modo ergonomico, vedrete che sarà necessario uno sforzo davvero minimo per azionarli. Grazie al design intelligente garantiscono un'ottima azione sulle ruote anche quando queste mostrano segni di logoramento.

## // FACILE SUPERAMENTO DI OSTACOLI

Le pedane per il ribaltamento consentono di superare cordoli e soglie, mentre i paracolpi laterali aiutano ad evitare gli ostacoli.

## // BEN VISIBILE AL BUIO

Dovete uscire quando è già buio? 6 catarifrangenti integrati posizionati su tutti i lati vi renderanno perfettamente visibili al buio. Per una sicurezza ancora maggiore, potrete aggiungere anche il faro opzionale.



**GEMINO 20**



# GEMINO 20

## GRANDE FUNZIONALITA'

State cercando un rollator funzionale e di ottimo livello? Allora Gemino 20 è la scelta giusta per voi. Semplice, facile da usare e con un look moderno. Con questo rollator così leggero camminerete in modo facile e sicuro, in più il sistema 'fold-click' vi consentirà di chiuderlo in modo compatto per riporlo e trasportarlo facilmente. E' dotato di serie di un pratico cestino in rete e di un sedile spazioso comodissimo se desiderate riposarvi un attimo.

Gemino 20 è disponibile in tre misure di telaio (colore grigio). Scegliete la misura che si adatta alla vostra altezza e godetevi qualità e funzionalità al 100%.

### // 100% GEMINO: LA SCELTA INTELLIGENTE PER LA MOBILITA'

Gemino 20 non ha nulla da invidiare al resto della famiglia Gemino: è dotato di tutte le caratteristiche tecniche del pluri-premiato Gemino 30 e può essere personalizzato con tanti pratici accessori.

### // FACILE DA RIPORRE E PORTARE CON SE'

Il vostro Gemino 20 si piega in modo molto semplice fino a diventare veramente compatto per merito del sistema 'fold-click'. Può essere riposto e trasportato in auto in modo estremamente pratico.



# GEMINO 30

## L'ORIGINALE 100% ROLLATOR



### // LA VITA E' PIENA DI COLORI

Desiderate distinguervi? Esprimate la vostra personalità attraverso uno dei 6 bellissimi colori anodizzati.

Grigio argento



Champagne



Blu notte



Rosa



Verde mela



Nero



### // UNA BORSA ELEGANTE E IN TANTI COLORI DA ABBINARE

Completate il vostro Gemino 30 con l'elegante e pratica borsa del vostro colore preferito, dotata di cinghie per le spalle!



# GEMINO 30

## GODETEVI LA VITA ESPRIMETE VOI STESSI

Cercate un rollator leggero e veramente bello? Gemino 30, supererà le vostre aspettative in comfort, sicurezza e design. Il suo stile moderno e le finiture curatissime esprimono classe e qualità. Naturalmente può essere personalizzato per adattarsi al vostro stile e alla vostra vita attiva!

Scegliendo Gemino 30 dovete essere consapevoli che avete scelto il meglio. Offrendovi l'equilibrio perfetto tra stabilità e manovrabilità, aumenterete la vostra indipendenza. Personalizzatelo con i colori e gli accessori che preferite e godetevi appieno la vita!

### // DESIGN PLURI-PREMIATO

Il nostro originale 100% rollator è stato premiato da enti internazionali di design come red dot, iF and German consumer magazine Öko-Test.



red dot design award  
best of the best 2011



Gemino 30  
sehr gut  
Ausgabe 06/2011



product  
design  
award  
2011



# GEMINO 60



## // RUOTE CHE FANNO LA DIFFERENZA

Le ruote morbide molto larghe vi consentono di superare con facilità praticamente qualunque ostacolo e assicurano un comfort ottimale su qualunque superficie.



## // PROGETTATO PER MASSIMIZZARE LA STABILITA'

Il telaio robusto, ampio e profondo di Gemini 60, insieme alle grandi ruote, assicura stabilità e sicurezza anche su terreni sconnessi.



## // SPAZIO MAGGIORE

La base larga offre una grande stabilità e allo stesso tempo maggior spazio per camminare e un ampio, comodo sedile disponibile anche con supporto posteriore regolabile. Veramente fantastico se desiderate riposarvi un attimo.



## // GRANDE MANOVRABILITA' IN TUTTE LE CIRCOSTANZE

Tutti i modelli di Gemini 60 sono estremamente manovrabili nonostante i telai robusti che consentono una portata massima di 150 kg. Avete tante cose da portare con voi? Il resistente cestino può trasportare fino a 10 kg.



# GEMINO 60

## COMFORT E SICUREZZA INSUPERABILI SU QUALUNQUE TERRENO

Let's go! Gemino 60 è il compagno perfetto per il tuo stile di vita attivo: è leggero, ma solido come una roccia. Con le sue grandi ruote morbide, questo rollator vi consente di camminare in modo confortevole e sicuro anche su terreni sconnessi. Desiderate fare due passi per le vie del centro lastricate di porfido, o vi divertite a passeggiare nei prati oppure semplicemente volete superare la soglia di casa senza problemi? Tutto questo sarà semplicissimo con l'aiuto di Gemino 60!

Gemino 60 è disegnato per essere utilizzato all'aperto e gestisce senza problemi un peso maggiore.

Allo stesso tempo si piega facilmente per essere riposto o trasportato in auto senza problemi.

Gemino 60: mantenetevi attivi e godetevi il massimo comfort, ovunque desideriate andare!



# GEMINO 30

walker



## SUPPORTO E STABILITA' EXTRA. PERFETTO PER RIEDUCARE LA DEAMBULAZIONE

Se avete bisogno di un supporto extra quando camminate, Gemino 30 Walker è la scelta perfetta per voi. Questo rollator molto leggero è dotato di supporti antibrachiali che vi consentiranno di camminare in modo confortevole e sicuro. Le maniglie integrate e i freni sono facili da raggiungere e da azionare. Combinando i benefici di Gemino 30 con supporto e stabilità, Gemino 30 Walker è ideale per essere utilizzato anche durante la riabilitazione della deambulazione.

### // SUPPORTI ANTIBRACHIALI PER MAGGIOR STABILITA' E SICUREZZA

Potrete facilmente regolare altezza, profondità e angolazione dei supporti antibrachiali per adattarli alle vostre necessità. I freni sulle maniglie di spinta sono completamente integrati, facili da raggiungere e leggeri da azionare. Per camminare in modo confortevole e sicuro.

### // POSSIBILITA' DI SCELTA DI SISTEMI DI FRENATA AVANZATI PER UNA SICUREZZA ANCORA MAGGIORE

Desiderate sentirvi più sicuri? Aggiungete al vostro Gemino 30 Walker il freno per il rallentamento o l'innovativo sistema di frenata SpeedControl. Con SpeedControl il vostro rollator rallenterà automaticamente quando aumenterete troppo la velocità. In questo modo manterrete una postura eretta e camminerete in modo sicuro e confortevole vicini al vostro rollator.



# GEMINO 60

## walker



# SUPPORTO E STABILITA' INSUPERABILI AL CHIUSO E ALL'APERTO

Vi piace uscire spesso? Con Gemini 60 Walker potrete avere il meglio di entrambi i mondi: le confortevoli caratteristiche di scorrevolezza e stabilità di Gemini 60 e il supporto e la sicurezza che vi aspettereste da un deambulatore.

Regolate il supporto antibrachiale e le maniglie di spinta in base ai vostri bisogni e godetevi una maggior libertà sia al chiuso che all'aperto. Naturalmente potrete utilizzare

questo rollator incredibilmente leggero anche per la riabilitazione!

### // SUPPORTO ANTIBRACHIALE REGOLABILE PER UNA MAGGIORE STABILITA'

I supporti antibrachiali con maniglie e freni integrati sono disegnati per offrirvi supporto e stabilità impareggiabili e sono facili da usare. Regolateli in base alla vostra altezza e godetevi una posizione di guida davvero confortevole.

### // UTILIZZO ALL'APERTO COMODO E SICURO

Il robusto telaio abbinato alle morbide e grandi ruote vi consente di uscire in totale comfort e sicurezza. Strade lastricate di ciottoli e soglie di casa? Con Gemini 60 Walker supererete ogni ostacolo con facilità.



# SpeedControl PER **GEMINO 30**



## L'INNOVAZIONE DEI ROLLATOR

State cercando un rollator che vi offra la massima sicurezza quando camminate? Allora l'opzione SpeedControl applicabile a tutti i modelli Gemino 30 è proprio quello di cui avete bisogno. Con il suo sistema dinamico di frenata vi sentirete completamente sicuri, camminerete in modo fluido e in posizione più eretta. Il sistema SpeedControl aiuta a prevenire le cadute ed è perfetto per la riabilitazione alla deambulazione per adulti e bambini.

### // 3 LIVELLI DI FRENATA DINAMICA PER LA MASSIMA SICUREZZA

L'innovativo sistema di frenata SpeedControl è dotato di 3 livelli di frenata e può essere facilmente regolato in base ai vostri bisogni. Quando inizierete ad andare più veloci, i freni delle ruote posteriori a meccanismo centrifugo si attiveranno automaticamente. Naturalmente non sentirete alcuna resistenza quando camminerete piano o in salita. Il sistema SpeedControl consente un passo sicuro, assicura una camminata confortevole rimanendo ben vicini al vostro rollator ed evita che il rollator vi "scappi" via.

### // IL COMPAGNO PERFETTO ANCHE PER I VOSTRI BAMBINI

SpeedControl è applicabile anche a Gemino 30 S, il modello più piccolo. Gemino 30 S offre ai bambini l'opportunità di scoprire il mondo e grazie al sistema dinamico di frenata i vostri bimbi potranno camminare in modo totalmente sicuro e fare riabilitazione diventerà un divertimento!

**Nota Bene:**  
Con l'opzione SpeedControl la portata massima si riduce a 100 kg per tutte le misure.



# GEMINO 30

## parkinson



# DISEGNATO PER PERSONE AFFETTE DA PARKINSON

Alcune persone hanno bisogno di un piccolo aiuto extra per poter camminare in modo sicuro. Il nostro rollator Gemini 30 Parkinson è stato progettato proprio per questo scopo ed è dotato di caratteristiche adatte alle vostre necessità. Uscite e camminate con sicurezza e fiducia!

#### // IL FRENO DI RALLENTAMENTO CONSENTE UN PASSO STABILE

Gemino 30 Parkinson è provvisto di un freno di rallentamento che offre maggiore resistenza e vi aiuta a camminare in modo stabile. Regolate il livello di resistenza in base ai vostri bisogni.

#### // MAGGIORE SICUREZZA CON I FRENI AD AZIONE INVERSA

Per merito del sistema di frenata ad azione inversa il rollator si ferma immediatamente appena i freni vengono rilasciati. Questo meccanismo aumenta la sicurezza nei casi di arresto improvviso della deambulazione (freezing), quando vi sentite come se foste incollati al pavimento.

#### // IL RAGGIO LASER AIUTA A SUPERARE IL FREEZING

Quando si verificano episodi di freezing, potrete attivare un raggio laser con il pulsante che si trova sulle maniglie. Concentrandovi sulla linea che apparirà sul terreno, potrete fare il passo necessario per superarla riuscendo così nuovamente a muovervi.



# SCELTA AL 100%

## PRATICI ACCESSORI PER VOI

I rollator Gemino non sono solo facilmente regolabili. Sono anche dotati di tanti accessori per rendere più facile la vita di ogni giorno.

Un'elegante borsa, un pratico porta stampelle, un confortevole supporto posteriore o la luce per sentirvi più sicuri? Scegliete le opzioni adatte alle vostre necessità e al vostro stile di vita!

### // BORSE COLORATE

Completate il vostro Gemino con un'elegante borsa dotata di chiusura e del vostro colore preferito. Con maniglie e cinghie per le spalle per un facile trasporto.

*Non disponibile per Gemino 60 M*



### // CESTINI PER GEMINO 30 S





#### // OMBRELLINO

E' prevista pioggia? Con l'ombrello regolabile in altezza, uscirete in totale sicurezza poiché avrete le mani libere per afferrare entrambe le maniglie.



#### // SOSTEGNO LOMBARE\*

Vi offre supporto per sedervi in modo confortevole e sicuro ogniqualvolta abbiate bisogno di fermarvi. Non sarà necessario rimuoverlo per piegare il rollator.



#### // SOSTEGNO LOMBARE COMFORT E REGOLABILE

Per un comfort ancora maggiore, scegliete il supporto posteriore imbottito, più largo e morbido. Facile da regolare, facile da piegare insieme al rollator.



#### // TAVOLINO

Un pratico tavolino completo di portabicchiere vi consentirà di trasportare cibo e bevande in modo facile e sicuro.



#### // PORTA STAMPILLE

Potrete sempre portare con voi la stampella o il bastone senza paura di perderli. Facile da montare e da utilizzare.



#### // PORTA BOMBOLA DI OSSIGENO\*\*\*

Borsa con tracolla per trasportare in modo sicuro la bombola di ossigeno.



#### // SISTEMA DI RALLENTAMENTO

Offre una ulteriore resistenza per aiutarvi a camminare con passo stabile. Facile da regolare al livello desiderato e facile da attivare e disattivare.



#### // GANCIO UNIVERSALE

Vi consentirà di trasportare in modo comodo le vostre cose.



#### // FARETTO APPLICATO AL TELAIO

Al buio sarete perfettamente visibili per una sicurezza ancora maggiore.



#### // ASTA PORTAFLEBO

Regolabile in altezza e angolazione.



Sistema di frenata automatico in caso di accelerazione improvvisa

#### // SPEEDCONTROL

Con l'innovativo sistema di frenata SpeedControl, disponibile su tutti i modelli Gemino 30, mentre camminate vi sentirete completamente sicuri. Il vostro rollator frenerà automaticamente quando inizierete ad accelerare, assicurandovi una camminata fluida e confortevole e consentendovi di stare in posizione eretta. Naturalmente non incontrerete resistenza quando camminerete a velocità normale o in salita. Il sistema SpeedControl aiuta a prevenire le cadute ed è fantastico per la riabilitazione, sia per gli adulti che per i bambini!

\* controllare i singoli modelli per la disponibilità    \*\* non disponibile per Gemino 30/30 M Walker    \*\*\* non disponibile per Gemino 60 M.



## GEMINO - GUIDA ALLA SCELTA



### GEMINO 20

Rollator dal design ultraleggero. Grande funzionalità alla portata di tutti.



Utilizzo al chiuso e all'aperto

Utilizzo quotidiano



150 kg  
130 kg (M)  
125 kg (S)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)  
1250-1650 mm (S)  
Adatto anche per i bambini



### GEMINO 30

Il nostro originale 100% rollator pluri-premiato combina un'eccellente manovrabilità al chiuso con una grande prestazione all'aperto. Sono disponibili tanti colori ed accessori per una facile personalizzazione..



Utilizzo al chiuso e all'aperto

Utilizzo quotidiano




150 kg  
130 kg (M)  
125 kg (S)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)  
1250-1650 mm (S)  
Adatto anche per i bambini



Raggio di sterzata molto ridotto per grande manovrabilità al chiuso

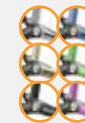

Facile personalizzazione con i colori per il telaio e le borse colorate. Ampia gamma di accessori



### SpeedControl PER GEMINO 30

Per una maggiore sicurezza i freni delle ruote posteriori entrano in funzione in caso di accelerazione improvvisa. Perfetto per la riabilitazione.



Utilizzo al chiuso e all'aperto

Utilizzo quotidiano



100 kg



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)  
1250-1650 mm (S)  
Adatto anche per i bambini



Raggio di sterzata molto ridotto per grande manovrabilità al chiuso



In caso di accelerazione improvvisa, le ruote con SpeedControl faranno immediatamente resistenza

SCEGLIETE IL ROLLATOR ADATTO A VOI



### GEMINO 60

Disegnato per ogni tipo di terreno e per un utilizzo intenso. Leggerissimo, ma solido come una roccia. Tutti i benefici del pluri-premiato Gemino 30 e ancora di più.



Soprattutto per utilizzo all'aperto, anche su terreni sconnessi, occasionalmente al chiuso

Utilizzo attivo/heavy-duty



150 kg  
150 kg (M)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)



Telaio extra largo ed extra lungo per la massima stabilità



Ruote molto grandi e morbide per assicurare il massimo comfort e rendere più facile il superamento degli ostacoli.



Sedile extra large



Borsa super resistente (10 kg di capacità di carico)



### GEMINO 30 walker

Deambulatore leggero con supporti anti-brachiali. Il compagno perfetto se avete bisogno di maggiore supporto e di stabilità al chiuso. Perfetto per la riabilitazione.



Utilizzo al chiuso

Utilizzo quotidiano/  
riabilitazione alla  
deambulazione



150 kg  
130 kg (M)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)



Supporto anti-brachiale regolabile in altezza per maggiore supporto e stabilità



### GEMINO 60 walker

Supporto e stabilità ottimali, sia al chiuso che all'aperto. Combina le confortevoli caratteristiche di scorrevolezza e stabilità di Gemino 60 e il supporto e la sicurezza che vi aspettereste da un deambulatore.



Utilizzo al chiuso e all'aperto, anche su terreni irregolari

Utilizzo quotidiano/  
riabilitazione alla  
deambulazione



130 kg  
130 kg (M)



1500-2000 mm  
1350-1700 mm (M)



Supporto anti-brachiale regolabile in altezza per maggiore supporto e stabilità



Telaio extra largo ed extra lungo per la massima stabilità



Ruote molto grandi e morbide per assicurare il massimo comfort e rendere più facile il superamento degli ostacoli.

Borsa super resistente (10 kg di capacità di carico)



### GEMINO 30 parkinson

Disegnato espressamente per persone affette da Parkinson. E' dotato di freno di rallentamento per consentire un passo più stabile, di sistema di frenata inversa e di luce laser per aiutarvi durante gli episodi di 'freezing'.



Utilizzo al chiuso e all'aperto

Utilizzo quotidiano



130 kg  
130 kg (M)



1500-2000 cm  
1350-1700 cm (M)



Raggio di sterzata molto ridotto per grande manovrabilità al chiuso



Freni ad azione inversa: il rollator si ferma immediatamente appena il freno viene rilasciato.



Il freno di rallentamento offre una resistenza extra e consente un passo più stabile




E' possibile attivare la luce laser per superare gli episodi di 'freezing'






## DATI TECNICI

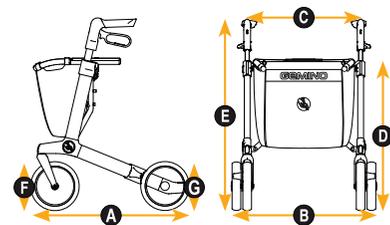

		GEMINO 20			GEMINO 30			GEMINO 60	
		20	20M	20S	30	30M	30S	60	60M
<b>DIMENSIONI</b>									
Portata massima	kg	150	130	125	150	130	125	150	150
Altezza utente raccomandata	mm	1500-2000	1350-1700	1250-1650	1500-2000	1350-1700	1250-1650	1500-2000	1350-1700
Portata massima cestino/borsa	kg	5	5	5	5	5	5	10	10
Lunghezza totale <b>A</b>	mm	650	650	680	650	650	680	740	740
Larghezza totale <b>B</b>	mm	600	600	550	600	600	550	640	640
Peso totale senza cestino (con cestino)	kg	7,1 (7,3)	7,0 (7,2)	6,6 (6,8)	7,1 (7,4)	7,0 (7,3)	6,6 (6,8)	8,5 (8,8)	8,2 (8,5)
Larghezza tra i centri delle maniglie <b>C</b>	mm	470	470	420	470	470	420	510	510
Altezza seduta <b>D</b>	mm	620	550	480	620	550	480	620	530
Altezza totale <b>E</b>	mm	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	760-950	730 - 830
Altezza totale piegato	mm	800	760	690	800	760	690	840	800
Lunghezza totale piegato	mm	650	650	680	650	650	680	740	740
Larghezza totale piegato	mm	230	230	230	230	230	230	230	230
Diametro ruote anteriori <b>F</b>	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	280 x 42	280 x 42
Diametro ruote posteriori <b>G</b>	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42
<b>PERFORMANCE</b>									
Raggio di sterzata	mm	840	840	790	840	840	790	950	950
<b>COLORI</b>									
Grigio		√	√	√					
Grigio argento					√	√	√	√	√
Champagne					√	√			
Blu notte					√	√	√		
Rosa					√		√		
Verde mela					√	√			
Nero					√				
<b>CERTIFICAZIONI</b>									
CE		√	√	√	√	√	√	√	√
EN 12182		√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-2		√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-3									

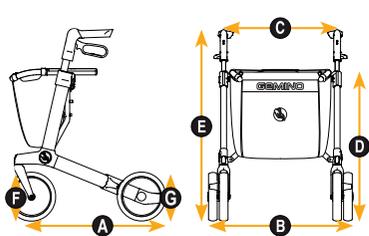

		GEMINO 30 walker		GEMINO 60 walker		GEMINO 30 parkinson	
		30	30M	60	60M	30	30M
<b>DIMENSIONI</b>							
Portata massima	kg	150	130	130	130	130	130
Altezza utente raccomandata	mm	1500-2000	1350-1700	1500-2000	1350-1700	1500-2000	1350-1700
Portata massima cestino/borsa	kg	5	5	10	10	5	5
Lunghezza totale <b>A</b>	mm	650	650	740	740	650	650
Larghezza totale <b>B</b>	mm	610	610	640	640	600	600
Peso totale senza cestino (con cestino)	kg	10,6 (10,9)	10,4 (10,7)	11,8 (12,1)	11,6 (11,9)	7,5 (7,8)	7,4 (7,7)
Larghezza tra i centri delle maniglie <b>C</b>	mm	255	255	320	320	470	470
Altezza seduta <b>D</b>	mm	620	550	620	530	620	550
Altezza totale <b>E</b>	mm	980 - 1115	840 - 1000	985 - 1155	895 - 985	780 - 1000	690 - 880
Altezza totale piegato	mm	970	890	1090	1010	800	760
Lunghezza totale piegato	mm	650	650	740	740	650	650
Larghezza totale piegato	mm	355	355	355	355	230	230
Diametro ruote anteriori <b>F</b>	mm	200 x 36	200 x 36	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36
Diametro ruote posteriori <b>G</b>	mm	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36
<b>PERFORMANCE</b>							
Raggio di sterzata	mm	840	840	950	950	840	840
<b>COLORI</b>							
Grigio							
Grigio argento		√	√	√	√	√	√
Champagne							
Blu notte							
Rosa							
Verde mela							
Nero							
<b>CERTIFICAZIONI</b>							
CE		√	√	√	√	√	√
EN 12182		√	√	√	√	√	√
ISO 11199-2						√	√
ISO 11199-3		√	√	√	√		

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito [www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)





**Sunrise Medical S.r.l.**  
Via Riva, 20 - Montale  
29122 Piacenza  
Italia

Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060  
e-mail: [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it)  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)