

Multistander by JENX

medimec[®]



Multistander by JENX

Uno standing unico e versatile disponibile in due dimensioni che offre un posizionamento 3 in 1 (prono, supino o eretto) per bambini con diverse esigenze da 9 mesi a 13 anni.

- Le molteplici possibilità di regolazione dell'altezza e della larghezza ed la portata massima di 60 kg prevista per la misura, rendono il Multistander la scelta perfetta per far crescere i bambini rispondendo alle diverse esigenze.
- La semplice e agevole regolazione dell'angolo di inclinazione permette al Multistander di passare dalla posizione orizzontale alla verticale, facilitando i trasferimenti.
- La vasta gamma di opzioni di supporto per la testa, il tronco, le gambe e i piedi, consentono la massima personalizzazione all'utente.
- La struttura volutamente aperta consente di posizionare l'utente con facilità e di intuire visivamente la corretta postura.
- L'eccezionale capacità di supporto pelvico e toracico, abbinata alle diverse possibilità di regolazione dei supporti per le gambe, rendono Multistander una scelta eccellente per la maggior parte dei bambini.

Se avete bisogno di flessibilità Multistander è il prodotto giusto!

Multistander by JENX

SUPPORTO PELVICO E TORACICO con cinghie che si fissano al centro e si regolano indipendentemente ad entrambi su entrambi i lati consentendo di fare passaggi intermedi di posizionamento pria di ottenere quello definitivamente corretto. I supporti possono facilmente essere rimossi per agevolare i trasferimenti (posizione supina). I sistemi di fissaggio delle cinghie sono studiati per assicurare la massima sicurezza. Una volta regolati correttamente è molto difficile che fratelli o compagni di classe possano manometterli.

TAVOLINO PRONO/SUPINO innovativo e multiuso. Regolabile in altezza, inclinazione e profondità. Gli inserti interni di cui sono dotati i tavolini impediscono che le braccia rimangano bloccate quando il bambino si trova in posizione supina. Il tavolino è facilmente removibile per assicurare il massimo confort nella posizione prona. Può essere dotato di supporti per i gomiti (accessorio), mentre il bordo del piano di appoggio ha un profilo rialzato che aiuta a fornire una barriera visiva per i bambini, ma che può essere anche un utile punto di ancoraggio per attaccare giocattoli o altri strumenti sensoriali.

medimec.it



Molteplici **POGGIATESTA** per soddisfare le molteplici esigenze. Un supporto delicato offerto dal poggiatesta in PU oppure un supporto più sostenuto con il poggiatesta Multigrip™

Questo accessorio può essere utilizzato come **IMBOTTITURA DI PROTEZIONE** nella zona lombare oppure, nel Multistander mis. 2, come **PROTRATTORE** per le spalle nella posizione supina.

TELAIO BIANCO che fornisce un look moderno e fresco contribuendo ad individuare più facilmente lo sporco in modo da pulire il dispositivo prima che diventi pericoloso.

BASE MANUALE meccanica e resistente

POGGIAPIEDI REGOLABILE IN ANGOLAZIONE di serie su tutti i Multistander, facilita il posizionamento del dorso del piede o la flessione della pianta.

INCLINAZIONE REGOLABILE facilmente tramite il calibro angolare sul telaio anche con il bambino in piedi sul telaio. Il Multistander può essere posizionato completamente in orizzontale per facilitare i trasferimenti quando ci si trova in posizione supina. L'inclinazione è regolabile manualmente tramite un supporto con pistone a gas

Multistander 1 – NUOVO ACCESSORIO ABDUZIONE

by JENX

REGOLAZIONE INDIVIDUALE DELLA
GAMBE DA 0 A 30 GRADI DI ABDUZIONE



Su **MULTISTANDER 1** offre la possibilità di installare il sistema di abduzione individuale delle gambe di 0-30 gradi (con step di 5°). Questo accessorio può essere installato al momento dell'ordine permettendo una personalizzazione dell'ausilio in partenza, oppure può essere richiesto come accessorio per i **MULTISTANDER 1** con data di produzione a partire dal 2015. Questo accessorio ora rende **MULTISTANDER 1** un dispositivo che permette ai bambini di stare in piedi alla stessa altezza degli altri bambini sia in posizione neutra che abdotta.



COMPATIBILITA' L'accessorio per l'abduzione può essere installato su tutti i **MULTISTANDER 1** prodotti dopo LUGLIO 2015. Sulle pedane di questo accessorio è inoltre possibile installare sia i sandali mis. 1 e 2 e i fermaginocchia mis. 1 e 2 senza dover apportare modifiche..

ALTEZZA UTILIZZATORE E' stata prestata particolare attenzione nella progettazione di questo accessorio affinché garantisca che il bambino possa stare in piedi il più vicino possibile a terra in modo da stare alla stessa altezza degli altri bambini

REGOLAZIONI SENZA ATTREZZI Il meccanismo consente semplici regolazioni dell'angolazione della posizione della gamba dell'utente con il minimo sforzo.

ABDUZIONE DELLE GAMBE 0-30° possono essere regolati in ciascuna gamba in fasi incrementali da 5°. Il meccanismo di bloccaggio semplice ma robusto consente di posizionare le gambe nell'angolazione desiderata.

Multistander by JENX



Il **POGGIATESTA MULTIGRIP™** ha un design unico e pionieristico, sviluppato per imitare il supporto accurato di mani premurose. La stessa tecnologia viene utilizzata anche per fornire supporto alle spalle o alla zona lombare (nella misura 2)

L' **ANGOLAZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO** può essere regolata da orizzontale a verticale in base alle esigenze individuali del bambino.

Le **TAVOLE DI SUPPORTO** hanno uno speciale agente antimicrobico ed una superficie veloce e facile da pulire, soprattutto nei casi in cui il Multistander venga utilizzato da diversi utenti.

Multistander by JENX ... sempre incoraggiante!

Stare in piedi è un ottimo modo per migliorare la prospettiva di tuo figlio sul mondo e il suo sviluppo fisico

Migliora la circolazione sanguigna e la pressione




Aiuta la digestione, l'intestino e lo svuotamento della vescica



Incoraggia lo sviluppo muscolare e delle ossa



I bambini traggono enormi vantaggi psicologici dalla posizione eretta e importanti benefici fisici e di sviluppo.

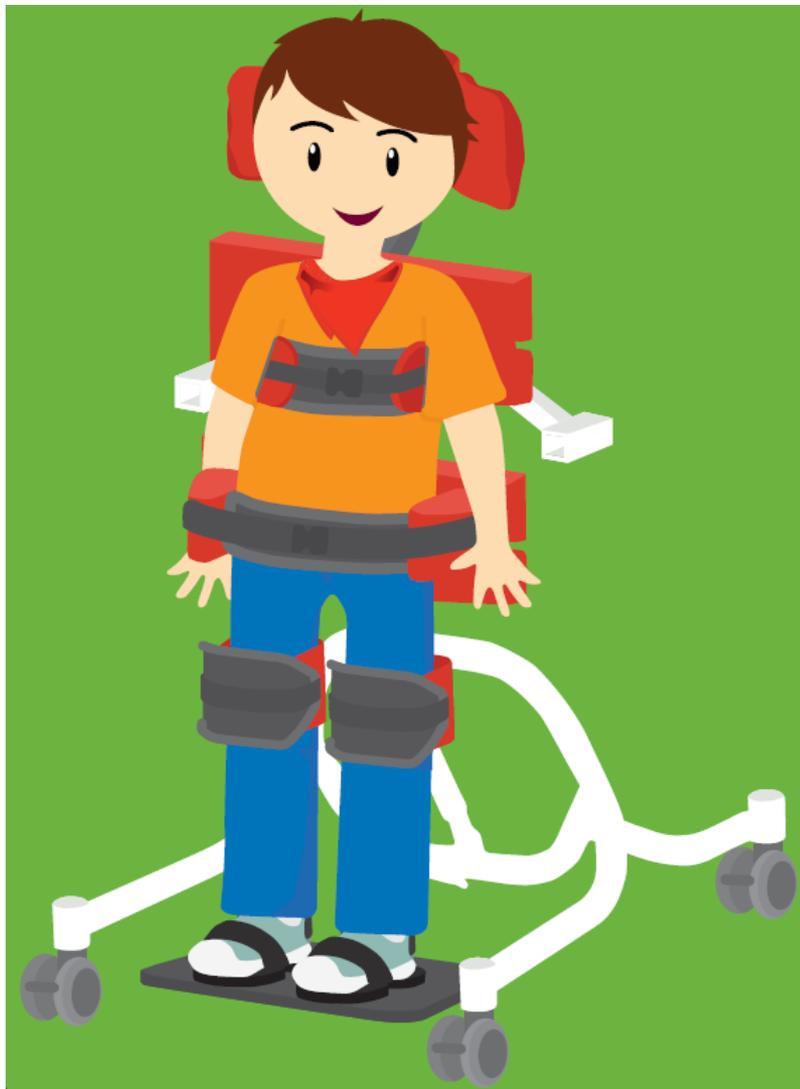

Fornisce nuove prospettive e modalità di partecipazione



Aiuta la respirazione e a dialogare



Aiuta ad alleviare la pressione creata dalla posizione seduta



Supporti bacino, cosce e piedi in modo che i bambini possano unirsi alle attività quotidiane



Fornisce opportunità per incrementare le abilità sociali



Multistander by JENX

Il Multistander è un prodotto modulare, si ha quindi la possibilità di scegliere specifici accessori per rispondere alle esigenze di ogni bambino.

Dotazione di base:

- Base con 4 ruote piroettanti bloccabili
- Staffe di aggancio per l'installazione dei supporti per il ginocchio
- Pedana regolabile
- Gruppo pistone per la regolazione manuale dell'inclinazione
- N. 2 tavole di supporto in PU
- N. 2 set di supporti standard per il posizionamento di tronco e bacino da scegliere fra le diverse misure disponibili. Tutti i supporti sono regolabili in altezza, larghezza e angolazione per offrire la massima possibilità di personalizzazione. Le imbottiture sono complete di cinturino anti-apertura.
- N. 1 set di supporti per il ginocchio da scegliere delle 2 misure disponibili. Completati di cinghie imbottite e anti-apertura, regolabili in altezza, larghezza, profondità e angolazione.
- Poggiatesta OVALE (incluso solo nella configurazione prona/supina). Montato su un supporto flessibile, consente la regolazione in altezza, profondità e angolazione.
- Tavolino per l'utilizzo sia in posizione prona che supina. Facile da agganciare e regolabile in altezza, angolazione e profondità.
- Sandaletti per il posizionamento del piede. Disponibili in tre diverse misure, Intercambiabili con i sandaletti degli altri standing e prodotti di Jenx.



Multistander by JENX

Accessori:

- POGGIATESTA MULTIGRIP TM => L'originale e innovativo poggiatesta Jenx Multigrip TM è disponibile in tre taglie differenti e ha staffe di aggancio altamente flessibili, regolabili in altezza, profondità e angolazione.



- POGGIATESTA ANATOMICO => Poggiatesta semplice e confortevole che da un minimo supporto alla testa del bambino. Montato su una staffa flessibile, consente la regolazione in profondità, altezza e inclinazione.



- PETTORINA => Fornisce ulteriore stabilità a tronco e spalle.



- BLOCCA GOMITI PER TAVOLINO => Aiutano le braccia a restare in appoggio sul tavolino e a bloccare un'eccessiva retrazione



- COVER => Fodere removibili che avvolgono i supporti di Multistander per dare un tocco di colore. Disponibili in vari colori.

- SUPPORTO PER IL PETTO => In gommapiuma, favorisce l'estensione del torace e aiuta a migliorare il controllo della testa. Da utilizzare in combinazione della relativa cover.



- SUPPORTO MULTIGRIP PER SPALLE E BACINO => Per un supporto extra a spalle e bacino (disponibile solo per Multistander 2).



- RIALZI PER SANDALETTI => Disponibili per ogni misura di sandalo, questi kit aumentano l'altezza dove serve anche singolarmente.



- ABDUZIONE => sistema di abduzione individuale delle gambe di 0-30 gradi (con step di 5°).



Multistander by JENX

Colori disponibili:



Verde Lime

Rosso

Blu


Rosa

Nero

Multistander by JENX

Multistander 1

- Età approssimativa di utilizzo da 9 mesi a 6 anni;
- Altezza massima utilizzatore: 116 cm;
- Peso massimo utilizzatore: 35 Kg

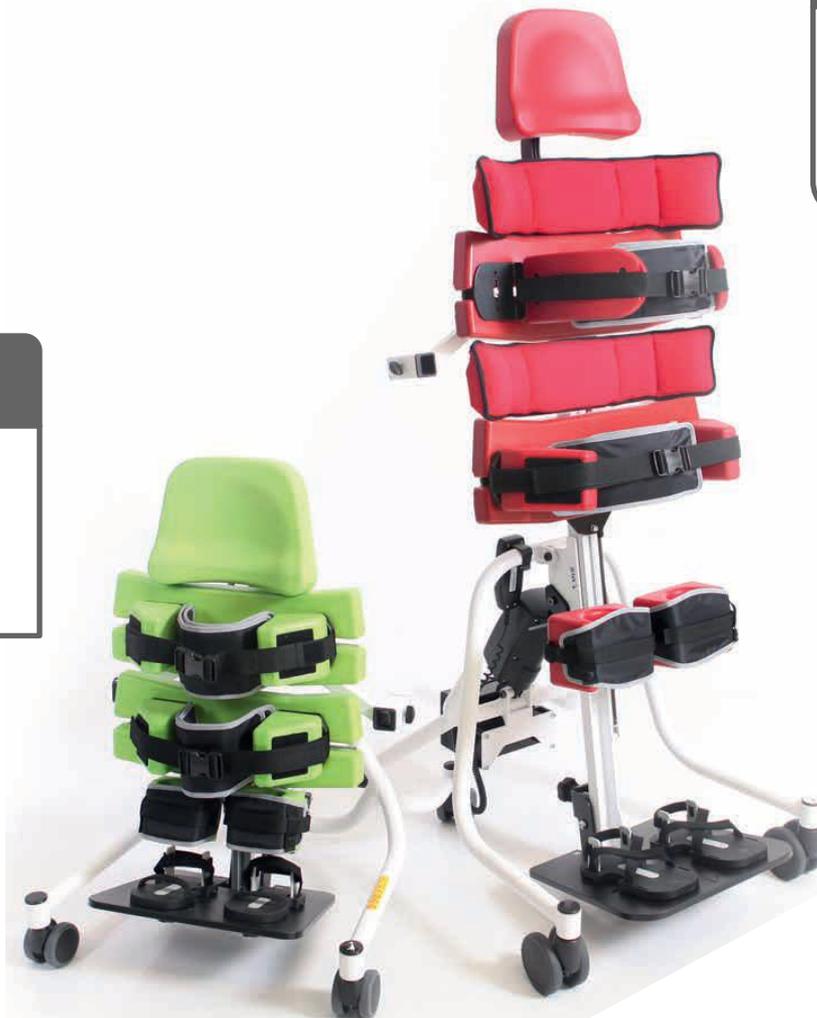

Multistander 1

- Età approssimativa di utilizzo da 3 anni a 13 anni;
- Altezza massima utilizzatore: 155 cm;
- Peso massimo utilizzatore: 60 Kg

Multistander by JENX

NB Alcune misure minime e massime si possono ottenere solo tramite l'utilizzo di accessori di Multistander	Misure	U.M.	Multistander 1 Prono	Multistander 1 Supino	Multistander 2 Prono	Multistander 2 Supino
Età di utilizzo	approx.	Mesi- anni	9 mesi - 6 anni	9 mesi - 6 anni	3 anni - 13 anni	3 anni - 13 anni
Altezza utente	max	mm	1160	1160	1550	1550
Peso utente	max	Kg	35	35	60	60
Larghezza torace	min-max	mm	105-240	105-240	160-350	160-350
Larghezza bacino	min-max	mm	130-280	130-280	160-350	160-350
Larghezza tra le ginocchia (da centro a centro)	min-max	mm	120-190	120-190	190-280	190-280
Altezza (da piano sandalo a parte alta tavola di supporto superiore)	min-max	mm	490-850	490-850	750-1200	750-1200
Altezza (da piano sandalo a parte superiore poggiatesta)	min-max	mm	-	620-1160	-	910-1350 (no supporto spalle Multigrip) 910-1500 (con supporto spalle Multigrip)
Altezza (da pavimento a parte alta tavola di supporto superiore)	min-max	mm	670-940	670-940	830-1280	830-1280
Angolazione pedana	Dorso-pianta	gradi	15° - 15°	15° - 15°	15° - 15°	15° - 15°
Inclinazione telaio	Orizz.-vertic.	gradi	10° - 90°	90° - 10°	10° - 80°	80° - 10°
Misura piede su pedana	Largh.x lung.	mm	610x770	610x770	675x1080	675x1080

Multistander by JENX

Per maggiori informazioni contattaci:

medimec[®]

MEDIMEC INTERNATIONAL SRL

Via Proventa n. 52 – 4808 Faenza (RA)

Tel. 0546/46870 Fax 0546/46467

medimec@medimec.it

www.medimec.it

