

EMPULSE R20

L'UNICO PROPULSORE DI SPINTA PIEGHEVOLE





FARSI SPINGERE NON E' MAI STATO COSI FACILE

Grazie al nuovo propulsore **Empulse R20** non è mai stato così semplice per l'assistente spingere la carrozzina.

In piano, in salita o per lunghi tragitti, R20 sarà sempre pronto ad aiutare nella spinta. Il suo peso contenuto, combinato ad una pratica richiudibilità, garantisce un facile trasporto senza interferire con l'autospinta della carrozzina.





Empulse R20

FACILMENTE
RIPIEGABILE

LEGGERO

NON LIMITA L'AUTOSPINTA

EMPULSE R20

CARATTERISTICHE





FACILMENTE RIPIEGABILE

R20 è l'unico propulsore pieghevole presente sul mercato.

LEGGERO

Il propulsore più leggero gestibile dall'accompagnatore.

NON LIMITA L'AUTOSPINTA

Il dispositivo non interferisce nella manovrabilità, non limita i movimenti e consente l'autospinta mantenendo la massima indipendenza.

MANEGGEVOLEZZA

Il design di R20 offre un funzionamento semplice ed un rapido aggancio e sgancio.

TRASPORTO AGEVOLE

La ripiegabilità ed il peso leggero di R20 consentono un trasporto agevole applicato o smontato dalla carrozzina.

AFFIDABILITÀ

Il potente motore con una batteria agli ioni di litio fornisce la massima affidabilità.

GARANZIA ESTESA

R20 offre una garanzia estesa sul motore (3 anni) e sulla batteria agli ioni di litio (2 anni).

ALTA COMPATIBILITÀ

Il propulsore di spinta si adatta a quasi tutte le carrozzine (diametri del tubo del telaio da 22 a 32 mm).

TRASPORTO AGEVOLE

GRAZIE
ALL'ESCLUSIVO
SISTEMA
DI CHIUSURA

R20 è l'unico propulsore di spinta pieghevole presente sul mercato, è facile da trasportare, da riporre e da gestire in tutte le situazioni della vita quotidiana.





MANEGGEVOLEZZA

R20 può rimanere applicato alla carrozzina anche quando viene ripiegata.



FACILE AGGANCIO E SGANCIO

Il sistema di fissaggio al telaio con un click consente l'aggancio e lo sgancio senza l'utilizzo di nessuno strumento. Quando il dispositivo viene sganciato restano applicati alla carrozzina solo i due piccoli attacchi nella parte inferiore del telaio, estremamente leggeri e poco visibili.



ZAINO MODERNO

La leggerezza di R20 e l'elegante zaino offrono facilità di trasporto e grande adattabilità a quasi tutte le carrozzine.



**SEMPLICE
DA GESTIRE**

CON IL
PRATICO
COMANDO





**INDICATORE DELLA CARICA
DELLA BATTERIA**

FACILE REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ
3 DIFFERENTI VELOCITÀ: 2 - 3,7 - 5 KM/H

RILASCIO RAPIDO DELL'UNITÀ DI CONTROLLO
LA FUNZIONE DI SGANCIO RAPIDO GARANTISCE UN
TRASPORTO FACILE E SICURO SENZA SCOLLEGARE I CAVI

FACILE CONTROLLO ON/OFF
MENTRE SI PREME IL PULSANTE
R20 SI MUOVE IN AVANTI



RUOTINO MOTORIZZATO E BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

RUOTINO MOTORIZZATO

UN POTENTE MOTORE BRUSHLESS DA 250 W CON PARAFANGO, DOTATO DI UNO PNEUMATICO PIENO, ROBUSTO E DUREVOLE (SOSTITUIBILE).

NON RICHIEDE MANUTENZIONE





BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

LA BATTERIA DA 5,8 AH FORNISCE UNA AUTONOMIA FINO A 15 KM, HA UN PESO MOLTO CONTENUTO ED È FACILMENTE RIMOVIBILE. TRASPORTABILE IN AEREO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

TEMPO DI RICARICA: DA 4 A 5 ORE

Empulse R20

DATI TECNICI

PROPULSORE DI SPINTA **EMPULSE R20**

Peso del propulsore:	3 kg	Pendenza massima superabile:	10° (18 %)
Peso della batteria:	1,4 kg	Portata massima:	190 kg (utente + carrozzina)
Peso complessivo:	5,6 kg (motore, parafango, batteria, comando, sistema di aggancio)	Motore:	motore brushless da 250 W, 36 V/15 A
Velocità regolabile:	2 km/h - 3,7 km/h - 5 km/h	Freno motore:	nessuno, senza retromarcia
Autonomia:	fino a 15 km	Batteria:	agli ioni di litio da 5,8 Ah (trasportabile in aereo secondo le normative vigenti)
Tempo di ricarica:	da 4 a 5 ore	Garanzia:	3 anni per il motore, 2 anni per la batteria



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.it

www.SunriseMedical.it



Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web.

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it

