

Tabella Taglie Amoena

Come individuare il reggiseno corretto

- Come primo passo, misurare la circonferenza sottoseno
- Misurare poi la semicirconferenza del seno e moltiplicare tale misura x 2 per ottenere la coppa idonea
- Individuare i reggiseni idonei

Attenzione: durante le misure, assicurarsi che il metro sia piatto sulla cute e non tirato. La misura della semicirconferenza del seno deve sempre essere effettuata con le braccia basse lungo i fianchi.

Misura della circonferenza sottoseno

Le circonferenze sottoseno dei reggiseni sono raggruppate in insiemi di 5 misure (in cm):

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...

Se il sottoseno di una signora misura tra i 68 e i 72 cm, allora la sua taglia di reggiseno sarà 70, se misura tra i 73 e i 77 cm allora la taglia sarà 75, e via di seguito.

Consigli per la misurazione:

Misura della semicirconferenza del seno:
Prendere la misura partendo dal centro del torace a livello dello sterno, misurando la parte più piena del seno, e arrivare fino alla spina dorsale.



Misura della circonferenza sottoseno:
Prendere la misura al di sotto del seno.

Misura sottoseno in cm (intervalli)

	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	---------

Taglia reggiseno (circonferenza sottoseno)

	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
--	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Misura della circonferenza del seno (semicirconferenza x 2) e relativa coppa

AA	75-77	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132
A	77-79	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134
B	79-81	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136
C	81-83	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133	136-138
D	83-85	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120	123-125	128-130	133-135	138-140
E	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132	135-137	140-142
F	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134	137-139	142-144
G	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136	139-141	144-146

Come individuare la corretta taglia di protesi mammaria

Prima di tutto individuare la taglia del reggiseno idonea (circonferenza sottoseno e coppa) come indicato precedentemente. Seguire poi le colonne in verticale per individuare la corretta taglia della protesi.

Attenzione: si tratta di indicazioni generali che non possono escludere la prova diretta dei prodotti sulla donna operata.

Coppa	Taglia reggiseno (circonferenza sottoseno)																			
AA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120								
A	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120							
B			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120						
C				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120					
D					65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120				
E						65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120			
F							65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		
G										75	80	85	90	95	100	105	110	115		

Protesi mammarie Amoena
Contact Energy Natura Essential

Taglia protesi mammaria																		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*	16*	17*

Prodotti postoperatori
Priforms
PurFit

Taglia protesi mammaria																		
		1/2		3/4		5/6		7/8		9/10		11/12		13/14				
				4		6		8		10		12						

Segmenti compensativi Amoena
Amoena Balance

Forma	Taglia										
Delta			1/2		3/4		5/6		7/8		9/10
Oval		0/1		2/3		4/5		6/7		8/9	
Varia			S		M		L		XL		

* Disponibile soltanto per Amoena Essential e Amoena Natura

* Disponibile anche in versione Amoena Balance Contact