



**RIALZO WC MORBIDO IBIZA 10 cm - REHAUSSE IBIZA SOFT 10 cm AVEC
COUVERCLE - REHAUSSE IBIZA SOFT 15 cm - REHAUSSE IBIZA SOFT 15 cm
WITH LID**

Reference 811091.SOFT – 811089.SOFT – 811074.SOFT – 811090.SOFT



UTILIZZO

La gamma di alzawater è progettata per aumentare l'altezza del water, per facilitare le operazioni di seduta e posizione eretta e per favorire l'indipendenza e il comfort. Il morbido cuscino in dotazione aumenta il comfort, rendendo la seduta morbida ed accogliente. Avvolge l'ascensore proteggendolo parzialmente dallo sporco e facilitandone la pulizia. Inoltre, la superficie pieghettata garantisce maggiore attrito, riducendo il rischio di scivolamento per l'utente. Il morbido cuscino può essere facilmente applicato e rimosso. Le versioni con coperchio garantiscono migliori condizioni igieniche durante il lavaggio. La copertura può essere utilizzata come sedile quando è chiusa.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI

Il sedile del WC è progettato per gli anziani, le persone su sedia a rotelle, le persone con problemi alla parte bassa della schiena, alle ginocchia o alle anche e chiunque possa avere difficoltà a sedersi e ad alzarsi dal water. Il morbido cuscino si deforma mentre l'utente si siede, fornendo una maggiore superficie di supporto per l'utente e consentendo una migliore distribuzione del peso corporeo. Il Soft Lift è quindi particolarmente indicato se l'utente soffre di piaghe da decubito o di malattie che possono provocarle, come il diabete. Durante l'uso è richiesta la capacità di sedersi autonomamente. Non deve essere utilizzato se l'utente ha problemi di percezione o di equilibrio quando è seduto.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA:


- Il peso massimo dell'utente indicato nelle istruzioni di installazione non deve essere superato.

- Prima di ogni utilizzo assicurarsi che il sollevatore sia in posizione stabile sul WC ed adeguatamente fissato ad esso con gli accessori di fissaggio forniti.
- Prima di applicare il cuscino al WC assicurarsi che sia pulito e asciutto.
- Durante il montaggio seguire attentamente le istruzioni riportate nel manuale d'utilizzo.
- Non modificare in alcun modo il sedile e i suoi componenti.
- Non utilizzare se danneggiato o alterato in qualsiasi modo. Crepe e deformazioni possono compromettere seriamente le prestazioni e la sicurezza del dispositivo.
- Assicurarsi che l'altezza sia tale da consentirne l'utilizzo facile e sicuro da parte dell'utente.
- Durante l'utilizzo evitare posizioni che mantengano il peso corporeo troppo avanti. Posizioni errate possono causare l'instabilità e il ribaltamento della seduta.
- Il sedile e il cuscino morbido non devono essere conservati all'aperto.

RIALZO WC MORBIDO IBIZA 10 cm - REHAUSSE IBIZA SOFT 10 cm WITH LID - REHAUSSE IBIZA SOFT 15 cm - REHAUSSE IBIZA SOFT 15 cm WITH LID


INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE:

La manutenzione del prodotto consiste in procedure di pulizia e sanificazione. Al fine di garantire un utilizzo sicuro ed un adeguato livello di igiene, l'utente deve eseguire queste procedure prima di ogni utilizzo.

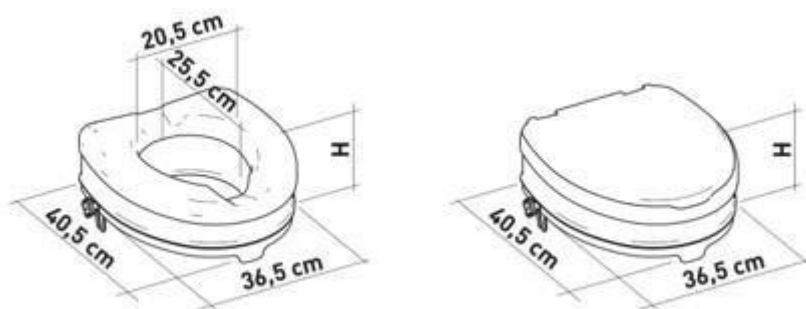

CORRETTA PROCEDURA DI SMALTIMENTO:

Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici. Chiedere preventivamente alle autorità locali il modo corretto ed ecologico di smaltirlo..

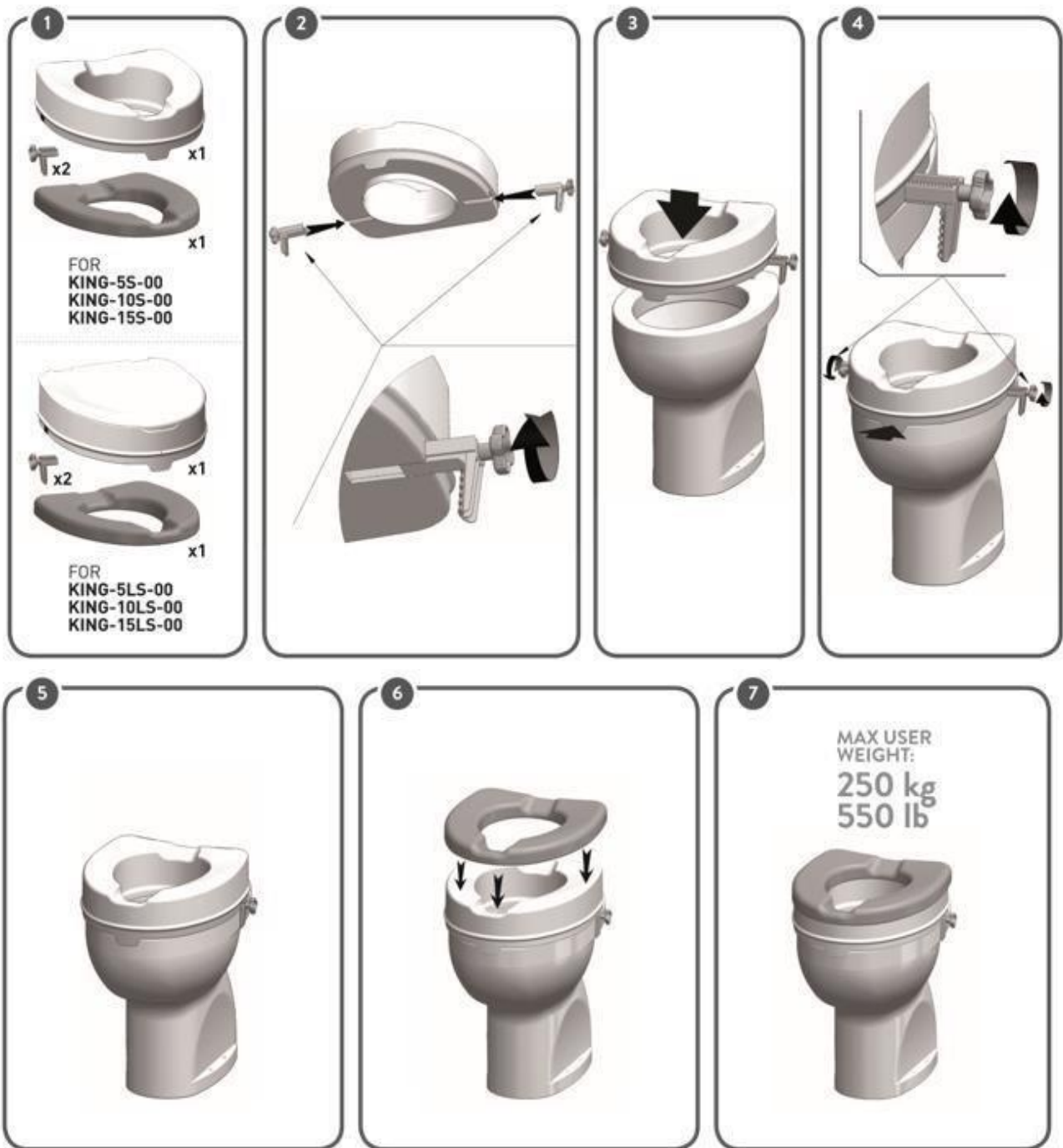

LM Global Design Ltd.
Guinness Enterprise Centre,
Taylor's Lane, D8,
Dublin, Ireland