


SEDIA DA BAGNO PIEGHEVOLE ISLANDE
Istruzioni per l'uso - DISPOSITIVO MEDICO
RIF. 811006

SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O NEL MANUALE DI ISTRUZIONI

	Indirizzo del produttore		Invito a consultare il manuale d'uso
	Data di fabbricazione		Rispettare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento del prodotto		Non tollera l'umidità
	Peso massimo utente		Dispositivo medico

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario. Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio medico o distributore prima di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi rischi e danni. Consultare il proprio medico o il proprio medico prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Lui/lei vi consiglierà e vi informerà sull'uso più appropriato nel vostro caso. Distributore: questo manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utenti di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

La sedia da toilette pieghevole ISLANDE è un dispositivo medico. È un ausilio tecnico per l'uso del bagno progettato per persone anziane, con mobilità ridotta, disabili o ferite, o che possono facilmente perdere l'equilibrio.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Materiale consegnato nella scatola:

- Telaio Cuscino
- schienale
- Cuscino seduta
- Fodera seduta morbida
- Secchio + Coperchio
- Piedini + Puntali in gomma (x4)



La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Non superare il peso massimo supportato di 125 kg.
- Controllare che tutti i componenti siano fissati prima dell'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni di funzionamento.
- Controllare visivamente il prodotto.
- Controllare la stabilità della sedia prima dell'uso.
- Utilizzare solo su terreno pianeggiante.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che le 4 gambe siano alla stessa altezza e che le clip siano completamente estese.
- Non chinarsi mai quando si usa la sedia.
- Fare attenzione al rischio di pizzicamento quando si usa la sedia.
- In caso di parti danneggiate, rotte, usurate o mancanti, contattare il rivenditore.

- Disimballare con cura ed esaminare il prodotto per assicurarsi che sia completo. Prima dell'uso, controllare eventuali segni di danni, come saldature incrinata, vernice scrostata, sedile incrinato o danneggiato o tubo piegato. Se si nota uno di questi problemi, contattarci ed evitare di utilizzare il prodotto.

INSTALLAZIONE :



Aprire la sedia del water e assicurarsi che la sedia si apra completamente in stato di equilibrio



Mettere la morbida fodera del sedile sul cuscino del sedile



Tenere la sedia del water e spingerla verso l'alto per piegarla



La sedia è piegata



Nota: il rivestimento morbido del sedile non è consigliato per il bagno.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e manutenzione del prodotto può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Pulire regolarmente a mano il prodotto con un panno umido e un detergente delicato e disinfettante. Non utilizzare prodotti abrasivi, prodotti, detersivi o prodotti a base di solventi.
- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- La sedia deve essere completamente revisionata ogni anno, con lubrificazione obbligatoria.
- Si consiglia di effettuare la manutenzione del prodotto almeno una volta all'anno. Se il prodotto è soggetto a un uso intensivo e/o all'uso in un ambiente multiutente, si consiglia di effettuare la manutenzione più frequentemente.
- Prima di ogni utilizzo, controllare le condizioni dei piedini in gomma e del sedile. In caso di malfunzionamento, non riparare il prodotto da soli. Consultare un rivenditore autorizzato.

CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando trasferisci il tuo prodotto, ricordati di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. In precedenza, il prodotto deve essere ispezionato da uno specialista autorizzato.

RICICLAGGIO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e devi smaltirlo: contatta il tuo rivenditore specializzato. Se desideri effettuare autonomamente il riciclaggio, chiedi alla tua azienda locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può portare al deterioramento del prodotto e quindi al rischio di gravi lesioni.

- Non conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.
- Rispettare le condizioni di conservazione del prodotto:
 - In un luogo asciutto e temperato
 - Proteggere il prodotto da polvere e corrosione (ad esempio agenti abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).
- Conservare tutte le parti rimosse insieme nello stesso posto (o individuarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

PERIODO DI UTILIZZO

La durata di vita prevista di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione per un utente. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni. Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente multiutente (come una casa di cura o un ospedale), la durata di vita potrebbe essere ridotta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	Larghezza 61,5 cm x Prof. 56,5 cm x Altezza 90,5 – 98 cm
Dimensioni del sedile	Larghezza 43 cm x Profondità 43
Altezza del sedile	cm 46 – 54 cm
Dimensioni dell'apert. del sedile	Larghezza 22 cm x Profondità 30 cm
Peso	5 kg
Peso massimo dell'utente	125 kg

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di difetti di fabbricazione, progettazione o fabbricazione. Contattare il distributore da cui è stato acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per applicare la garanzia.