



 **FAUTEUIL D'ACCES SLIDE**
Notice d'utilisation - DISPOSITIF MEDICAL

 **SLIDE ACCES CHAIR**
Instructions manual - MEDICAL DEVICE

 **SILLA SLIDE ACCESS**
Manual de instrucciones - DISPOSITIVO MEDICO

 **SEDIA SLIDE ACCESS**
Manuale di istruzioni - DISPOSITIVO MEDICO

REF. 812082



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
SIMBOLO CHE COMPARE SULL'ETICHETTA O NELLE ISTRUZIONI PER L'USO.


	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante Indirizzo del produttore		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario Invito a consultare il manuale d'uso
	Date de fabrication Date de production Fecha de fabricación Data di produzione		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Observe las instrucciones de seguridad Seguire le istruzioni di sicurezza
	Numéro de lot Batch number Número de lote Numero di lotto		Conformité CE CE conformity Conformidad CE Conformità CE
	Référence du produit Product reference Referencia del producto Riferimento prodotto		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico Dispositivo medico
	Poids maximum de l'utilisateur Maximum user weight Peso máximo del usuario Peso massimo dell'utente		

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle se necessario. Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere le avvertenze, le precauzioni o le istruzioni, rivolgersi al proprio medico o al distributore prima di utilizzare il prodotto, per evitare rischi e danni. Prima di utilizzare un dispositivo di assistenza, consultare il medico o l'operatore sanitario. Egli o ella vi consiglierà l'uso più appropriato per voi. Distributore: Questo manuale deve essere consegnato agli utenti del prodotto. DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

La sedia di accesso Slide è un dispositivo medico per persone con mobilità ridotta. Consente di sedersi comodamente fuori dalla vasca da bagno e di scivolare al suo interno senza alzarsi. È dotata di uno spazio per posizionare i prodotti per la doccia a portata di mano. Può essere utilizzato sulla maggior parte delle vasche da bagno standard. Rimanete seduti e scivolate al centro della vasca grazie alla nostra sedia di accesso alla vasca Slide.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

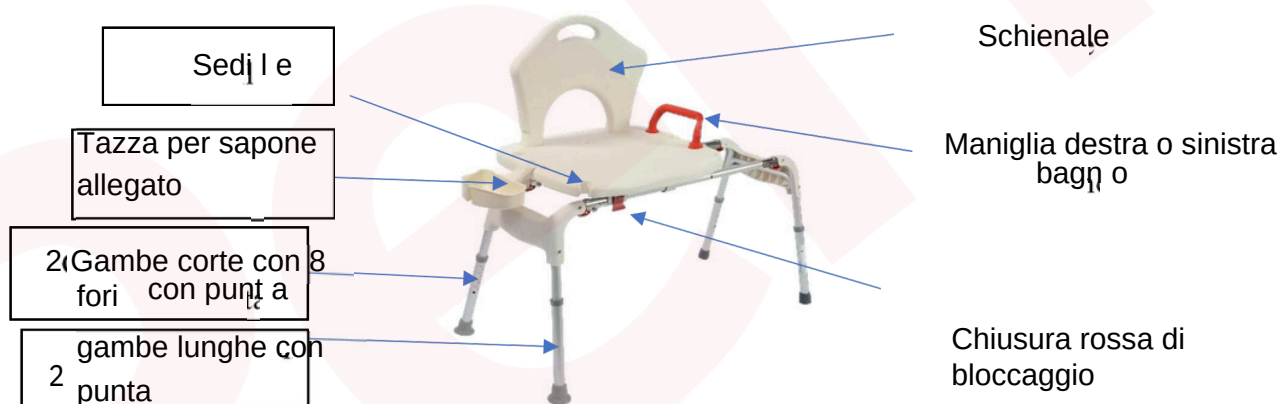

PRECAUZIONI DI SICUREZZA




La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Non superare il limite massimo autorizzato di 130 kg.
- Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni di funzionamento
- Verificare che tutte le parti siano correttamente innestate
- Assicurarsi che l'utente blocchi la chiusura per consentire il trasferimento del sedile.
- In caso di parti danneggiate, rotte, usurate o mancanti, contattare il rivenditore.
- Assicurarsi che la barra che sostiene i 4 piedi sia orizzontale.
- Assicurarsi che i perni dei 4 piedi escano dai 4 piedi.
- Attenzione al rischio di schiacciamento quando si utilizza


MONTAGGIO

1. Piegare la sedia da doccia e inserire i piedini fino a sentire il "clic" che garantisce un buon assemblaggio.
2. Agganciare il gruppo come mostrato in 2.
3. Regolare i piedini all'altezza desiderata e adattata all'utente.
4. Inserire lo schienale premendo con forza.
5. Fissare la maniglia come mostrato in 5
6. Posizionare il portasapone come indicato in 6

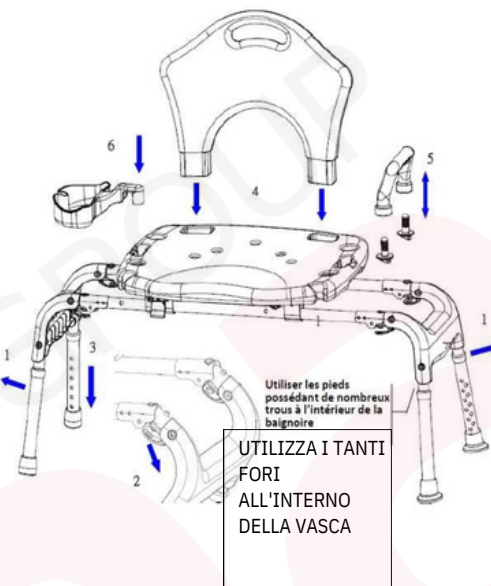

USO

1. Tirare la maniglia rossa situata sotto il sedile per far scorrere il sedile lateralmente sul telaio in posizione
2. Per la manutenzione, utilizzare acqua e sapone. Risciacquare bene prima dell'uso.

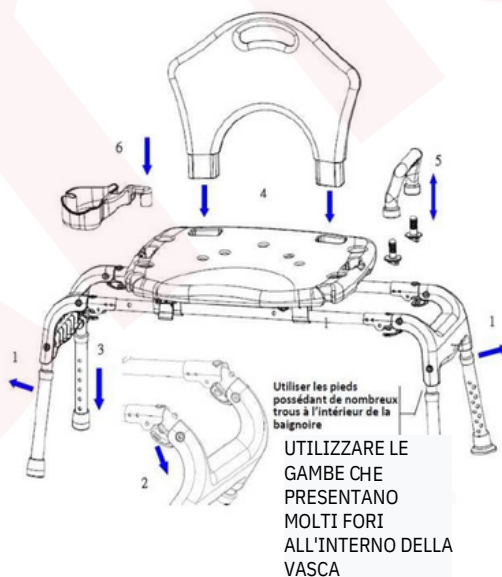

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e manutenzione del prodotto può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Pulire regolarmente il prodotto con acqua tiepida e un panno morbido.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, detergenti o prodotti a base di solventi.
- Asciugare con un panno morbido pulito e asciutto.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il prodotto da soli. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato.
- Lista di controllo:

Per mantenere il prodotto in buone condizioni, verificarlo prima di ogni utilizzo e controllarlo regolarmente come segue:

Consulta l'articolo	In qualsiasi momento	Settimanale
Verificare che la sedia scorra bene lungo la struttura	X	
Controllare le condizioni del sedile		X
Controllare il funzionamento del sistema di bloccaggio scorrevole	X	
Controllare il funzionamento delle 4 clip di regolazione dell'altezza.	X	

CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando si trasferisce il prodotto, ricordarsi di consegnare al nuovo utente tutta la documentazione tecnica necessaria. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da uno specialista autorizzato.

RICICLAGGIO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e si deve buttare via: rivolgersi al rivenditore specializzato. Se si desidera riciclare il prodotto da soli, rivolgersi all'azienda locale di smaltimento rifiuti per conoscere le linee guida per lo smaltimento.



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può causare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di gravi lesioni.

Non conservare il prodotto per un periodo prolungato vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte di freddo. Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.

Rispettare le condizioni di stoccaggio e conservazione del prodotto.

- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggere il prodotto dall'imballaggio da polvere, corrosione (ad esempio elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).
- Conservare tutte le parti smontate insieme nello stesso posto (o localizzarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti al momento del rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere conservati senza alcun carico (non collocare oggetti troppo pesanti sui componenti del prodotto, non incastrare nulla...).

PERIODO D'USO

L'aspettativa di vita di questo prodotto è di 5 anni in condizioni normali di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è in buone condizioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	larghezza 106 x profondità 46,5 x altezza 79,5/89,5 cm.
Dimensioni del sedile	larghezza 50 x profondità 39,5 x altezza. 46/56 cm.
Materiale	Struttura in alluminio anticorrosione.
Altezza massima del sedile sul pavimento	Da 46 a 56 cm
Altezza massima dal pavimento	62 cm
Peso	6.5 kg
Peso massimo autorizzato	130 kg

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contattare il distributore presso il quale è stato acquistato il prodotto in caso di reclamo. I guasti dovuti a danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti dalla presente garanzia. Per l'applicazione della garanzia, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo usuario
130 kg