



 **SEDIA DA DOCCIA PIEGHEVOLE
MINORQUE**

Istruzioni d'Uso
DISPOSITIVO MEDICO

REF. 822012



SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O NELLE ISTRUZIONI PER L'USO

	Indirizzo del produttore		Invito a consultare il manuale d'uso
	Data di fabbricazione		Rispettare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento del prodotto		Non tollera l'umidità
	Peso massimo dell'utente		Dispositivo medico

ISTRUZIONI ITALIANO

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio operatore sanitario o il distributore prima di utilizzare questo prodotto per evitare rischi e danni.

Consultare il proprio medico o operatore sanitario prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Lui/lei ti consiglierà e ti informerà sull'uso più appropriato al tuo caso.

Distributore: questo manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utilizzatori di questo prodotto.

DESTINAZIONE PRODOTTO

La sedia da doccia mobile pieghevole Minorca è un dispositivo medico. È un ausilio tecnico per la toilette per anziani, persone con mobilità ridotta, disabili, feriti o che perdono facilmente l'equilibrio.

DESCRIZIONE PRODOTTO



Materiale consegnato nella scatola:

- Cornice
- Cuscino dello schienale
- Cuscino del sedile
- Poggiapiedi
- Ruote posteriori 12 pollici (x2)
- Ruote anteriori con freno 4 pollici (x2)
- Secchio + Coperchio
- Manopole (x2)
- Clip (x2)

SICUREZZA

La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Non superare il peso massimo supportato di 125 kg
- Controllare che tutti i componenti siano fissati prima dell'uso
- Assicurarci che il prodotto sia in buone condizioni.
- Controllare visivamente il prodotto
- Prima di ogni utilizzo del prodotto, controllare i freni e le ruote.
- Controllare la stabilità della sedia prima dell'uso.
- Utilizzare solo su terreno pianeggiante.

- Quando si è fermi, azionare i freni sulle ruote.
- Assicurarsi che i freni siano rilasciati prima di spostare nuovamente la sedia.
- Assicurarsi sempre che il dispositivo sia fermo e che i freni siano applicati durante il trasferimento da e verso il dispositivo.
- Non sporgersi dall'apparecchio.
- Controllare le ruote portanti i freni
- In caso di parti danneggiate, rotte, usurate o mancanti, contattare il rivenditore.

MONTAGGIO E UTILIZZO

- Disimballare attentamente ed esaminare il prodotto per assicurarsi che sia completo.
- Prima dell'uso, controllare eventuali segni di danno, come saldature incrinata, vernice scrostata, sedile incrinato o danneggiato o tubo piegato. Se noti uno di questi problemi, contattaci e astieniti dall'utilizzare il prodotto.

USO E MONTAGGIO

1. Rimuovere il deambulatore e tutti i suoi componenti dall'imballaggio.
2. Aprire il deambulatore e spingere il sedile verso il basso, assicurarsi che le cerniere laterali siano in posizione aperta e bloccata.
3. Installare lo schienale inserendo ciascuna estremità nelle fessure previste. Il "clic" indica che lo schienale è installato correttamente.
4. Regolare l'altezza delle maniglie. Le altezze devono essere le stesse a destra e a sinistra. Bloccare i tubi stringendo le manopole su entrambi i lati. Assicurarsi che i cavi rimangano all'esterno della struttura e che i tubi non siano schiacciati o piegati.
5. L'altezza corretta per le maniglie è quando si sta in posizione eretta con le mani sulle maniglie senza piegare i polsi.
6. Per rallentare, premere leggermente le maniglie dei freni con le dita. Stringere contemporaneamente le maniglie dei freni sui lati destro e sinistro.
7. Per bloccare i freni, ad es. per fermare il deambulatore, spingere entrambe le maniglie dei freni con decisione verso il basso finché non si bloccano da sole.
8. Per sbloccare i freni, sollevare entrambe le maniglie dei freni.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e monitoraggio del prodotto può comportare il rischio di lesioni gravi.

Pulire regolarmente a mano il prodotto (tutte le ruote, i sedili e gli elementi di fissaggio) con un panno umido e un detergente e disinfettante delicato. Non utilizzare prodotti abrasivi, detersivi o prodotti a base di solventi.

- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- La sedia deve essere completamente revisionata ogni anno, con lubrificazione obbligatoria.
- Si consiglia di sottoporre il dispositivo a manutenzione una volta all'anno.
- In caso di malfunzionamento, non riparare da soli il prodotto. Consultare un rivenditore autorizzato.
- Lista di controllo:

Per garantire una durata ottimale del prodotto, controllare prima di ogni utilizzo e verificare quanto segue:

CONTROLLO PRODOTTO	METODO	FREQUENZA
Controllo del sedile e dello schienale	Regolazione/controllo visivo	Prima di ogni utilizzo
Controllo dei fissaggi	Regolazione	Una volta al mese
Controllo delle ruote	Regolazione	Una volta al mese
Controllo dei freni	Regolazione	Prima di ogni utilizzo

RICICLO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile ed è necessario smaltirlo: rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Se desideri effettuare il riciclaggio per conto tuo, chiedi alla tua società locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

STOCCAGGIO

La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di lesioni gravi.

- Non conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un radiatore) o vicino a una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.
- Rispettare le condizioni di conservazione del prodotto:
- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggi il tuo prodotto da polvere, corrosione (es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salmastra).
- Conservare insieme tutte le parti rimosse nello stesso posto (o localizzarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

DURATA PRODOTTO

L'aspettativa di vita di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione per un utente. Oltre questo periodo il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente multiutente (come una casa di cura o un ospedale), la durata potrebbe ridursi.

DATI TECNICI

Dimensioni complessive	61 x 75 (93.5 con poggiatesta piegato) x h 95 cm.
Dimensioni del sedile	43 x 43 x h 52 cm 49 cm 9,9 kg 125 kg
Larghezza tra i braccioli	
Peso	
Peso massimo utente	

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di difetti di fabbricazione, progettazione o produzione. Contatta il distributore da cui hai acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contatta il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto per applicare la garanzia.