

 **TABLE DE LIT SIMPLEX**
Notice d'utilisation - DISPOSITIF MEDICAL

 **SIMPLEX BEDTABLE**
Instructions manual - MEDICAL DEVICE

 **MESA DE CAMA SIMPLEX**
Manual de instrucciones - DISPOSITIVO MEDICO

 **COMODINO SIMPLEX**
Manuale d'istruzioni – DISPOSITIVO MEDICO

REF. 823066



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
SIMBOLO CHE COMPARE SULL'ETICHETTA O NELLE ISTRUZIONI PER L'USO.

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante Indirizzo del fabbricante		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario Invito a consultare il manuale d'uso
	Date de fabrication Date of production Fecha de fabricación Data di produzione		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Observe las instrucciones de seguridad Seguire le istruzioni di sicurezza
	Numéro de lot Batch Number Número de lote Numero di lotto		Conformité CE CE Conformity Conformidad CE Conformità CE
	Référence du produit Product Reference Referencia del producto Riferimento prodotto		Craint l'humidité Does not tolerate dampness Proteger de la humedad Proteggere dall'umidità
	Poids maximum de l'utilisateur Max. user Weight Peso máximo del usuario Peso massimo dell'utente		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico Dispositivo medico

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non siete in grado di leggere o comprendere le avvertenze, le precauzioni o le istruzioni, contattate il vostro medico o il vostro distributore prima di utilizzare questo prodotto, per evitare rischi e danni.

Prima di utilizzare un ausilio per la deambulazione, consultare il medico o l'operatore sanitario. Questi vi consiglierà e vi informerà sulla tecnica di deambulazione più adatta a voi.

Distributore: il presente opuscolo deve essere consegnato agli utenti di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Il tavolo da letto Simplex è un dispositivo medico. Questo prodotto consente di leggere e mangiare a letto in tutta comodità. L'altezza e l'inclinazione del piano del tavolo possono essere regolate per adattarsi ai diversi momenti della giornata.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



PRECAUZIONI DI SICUREZZA



La mancata osservanza delle precauzioni d'uso può comportare il rischio di gravi lesioni.


- Utilizzare il tavolo da letto solo come descritto in questo manuale.
- Non superare il peso massimo di 25 kg
- Installare il tavolo da letto su una superficie piana.

- Conservare il tavolo da letto in un luogo chiuso, al riparo da muffa e polvere.
- Prima dell'uso, verificare che le manopole di regolazione funzionino correttamente.
- Prima dell'uso, verificare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. In caso di danni, contattare il rivenditore.
- Seguire attentamente le istruzioni di montaggio e assicurarsi che tutti i componenti siano fissati correttamente prima dell'uso.
- Prima dell'uso, applicare i freni alle ruote. - In caso di parti danneggiate, rotte o usurate, contattare il rivenditore.

MONTAGGIO E UTILIZZO

MONTAGGIO E UTILIZZO:


Montare le traverse K e M sul telaio J con i bulloni L. Osservare la posizione della traversa bloccaruota K come indicato in figura. Serrare i bulloni L. Assicurarsi che tutte e 4 le ruote siano a contatto con il suolo.

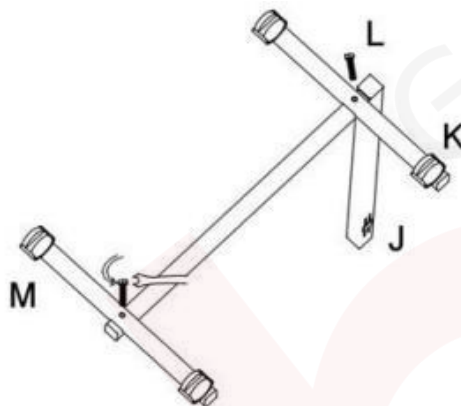

Inserire il tubo scorrevole C (parte quadrata) nel telaio J e regolarlo all'altezza desiderata, quindi serrare la manopola di serraggio F. Inserire l'asta di serraggio B nel tubo C (parte cilindrica) finché il dado di serraggio non entra in contatto con il tubo.

Le due parti oblique sono ora a contatto.

Inserire la rondella di serraggio E (diametro piccolo nel tubo C) e stringere leggermente la manopola di serraggio D. Nota: la rondella di serraggio E deve essere montata per bloccare la piastra A in posizione inclinata.

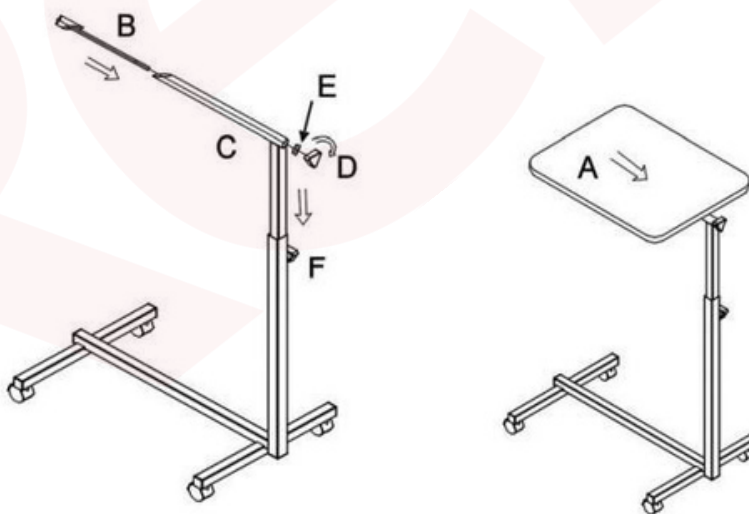

Far scorrere il piano del tavolo A nel tubo di scorrimento C e stringere la manopola di serraggio D.

L'altezza del tavolo può essere regolata con la manopola di serraggio F.

L'inclinazione del tavolo può essere regolata con la manopola di serraggio D.

Durante l'uso, accertarsi che le manopole di serraggio F e D siano serrate correttamente.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e il mancato controllo del prodotto possono comportare il rischio di gravi lesioni.

- Pulire regolarmente il prodotto con acqua tiepida, un panno morbido e un detergente neutro.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide. - Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporco sul prodotto.
- Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti. Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiate o usurate.
- Controllare regolarmente il funzionamento dei freni delle ruote e il funzionamento del cilindro.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il tavolo da soli. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato.

RICICLAGGIO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e si deve buttare via: rivolgersi al rivenditore specializzato. Se si desidera riciclare il prodotto da soli, rivolgersi all'azienda locale di smaltimento rifiuti per conoscere le linee guida per lo smaltimento.

IMMAGAZZINAMENTO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può causare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di gravi lesioni.

Non conservare il prodotto per un periodo prolungato vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un radiatore) o vicino a una fonte di freddo.

Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.

Rispettare le condizioni di stoccaggio e stivaggio del prodotto.

- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggete il vostro prodotto con l'imballaggio da polvere, corrosione (ad esempio elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).
- Conservare tutte le parti smontate insieme nello stesso posto (o localizzarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti al momento del rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non collocare oggetti troppo pesanti sui componenti del prodotto, non incastrare nulla...).

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	Larghezza 61 x profondità 41 cm. Larghezza di passaggio 51 cm. Altezza regolabile da 71 a 110 cm. Vassoio 60 x 40 cm
Peso	7,9 kg
Peso massimo supportato	25 kg

PERIODO DI UTILIZZO


L'aspettativa di vita di questo prodotto è di 5 anni in condizioni normali di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è in buone condizioni.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contattare il distributore presso il quale è stato acquistato il prodotto in caso di reclamo. I guasti dovuti a danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti dalla presente garanzia. Per l'applicazione della garanzia, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

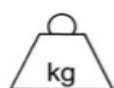

Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo permitido
25 kg