



TABLE POUR BARRIERES DE LIT
Notice d'utilisation - DISPOSITIF MEDICAL



BEDRAIL TABLES
Instructions manual - MEDICAL DEVICE



MESA PARA BARANDILLAS DE CAMA
Manual de instrucciones - DISPOSITIVO MEDICO



TAVOLINO DA LETTO
Manuale di istruzioni - DISPOSITIVO MEDICO

REF. 823091



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
SIMBOLO CHE COMPARE SULL'ETICHETTA O NELLE ISTRUZIONI PER L'USO.

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante Indirizzo del produttore		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario Invito a consultare il manuale d'uso
	Date de fabrication Date of production Fecha de fabricación Data di produzione		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Observe las instrucciones de seguridad Seguire le istruzioni di sicurezza
	Numéro de lot Batch Number Número de lote Numero di lotto		Conformité CE CE Conformity Conformidad CE Conformità CE
	Référence du produit Product Reference Referencia del producto Riferimento prodotto		Crain l'humidité Does not tolerate dampness Proteger de la humedad Non tollera l'umidità
	Poids maximum de l'utilisateur Max. user Weight Peso máximo del usuario Peso massimo utente		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico Dispositivo medico



MANUALE D'ISTRUZIONI

IT

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non siete in grado di leggere o comprendere le avvertenze, le precauzioni o le istruzioni, contattate il vostro medico o il vostro distributore prima di utilizzare questo prodotto, per evitare rischi e danni.


Prima di utilizzare un ausilio per la deambulazione, consultare il medico o l'operatore sanitario. Questi vi consiglierà e vi informerà sulla tecnica di deambulazione più adatta a voi.

Distributore: questo foglio deve essere consegnato agli utenti del prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

I tavoli per sponde del letto sono dispositivi medici. Questo tavolo, estremamente pratico ed ergonomico, è stato appositamente progettato per essere montato sulle sponde del letto. I suoi due lati poggiano sulle sponde e sono dotati di guide antiscivolo. Vassoio ergonomico. Dotato di 2 ganci sul lato inferiore per riporlo contro la sponda.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

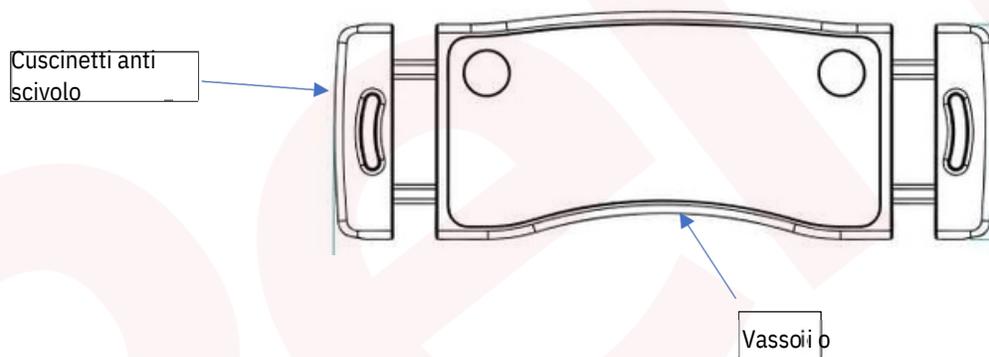

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA




La mancata osservanza delle precauzioni d'uso può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Utilizzare il prodotto solo come descritto in questo manuale.
- Non superare il peso massimo di esercizio di 10 kg. - Conservare il prodotto in ambienti chiusi, al riparo da muffa e polvere.
- Prima dell'uso, verificare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. In caso di danni, contattare il proprio rivenditore.
- Seguire attentamente le istruzioni di montaggio e assicurarsi che tutti i componenti siano fissati correttamente prima dell'uso. - Se alcune parti sono danneggiate, rotte o usurate, contattare il rivenditore..

MONTAGGIO ED UTILIZZO

- **Installation:** Insert the screws through the holes of the hooks and the board. Then tighten the screws. (Already installed in the factory)

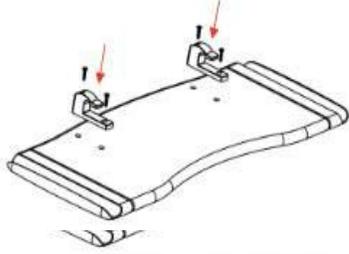

- 1 Extend the rack by pulling out the wings. Place the board on the siderails. (Caution: the grooves on both sides of the board should be placed on the siderails.)

- Safe load capacity: 15kg



- 2 Please hang the table at the head/foot board after use.



INSTALLAZIONE: INSERIRE LE VITI ATTRAVERSO I FORI DEI GANCI E DELLA SCHEDA. POI SERRARE LE VITI. (GIÀ INSTALLATO IN FABBRICA)

ESTENDERE LA CREMAGLIERA ESTRAENDO LE ALI. POSIZIONARE LA TAVOLA SULLE BORDATURE. (ATTENZIONE: LE SCANALATURA DELLA SCHEDA DEVONO ESSERE POSIZIONATE SULLE BARRE LATERALI)

CAPACITÀ DI CARICO SICURA: 15 KG

SI PREGA DI APPENDERE IL TAVOLO ALLA TESTATA/PIEDE DOPO L'USO

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e il mancato controllo del prodotto possono comportare il rischio di gravi lesioni.

- Pulire regolarmente il prodotto con acqua tiepida, un panno morbido e un detergente neutro.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide. Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporcizia sul prodotto.
- Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti. Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiate o usurate.
- Controllare regolarmente il funzionamento dei pattini antiscivolo.

- In caso di malfunzionamento, non riparare il tavolo da soli. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato.

RICICLAGGIO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e si deve buttare via: rivolgersi al rivenditore specializzato. Se si desidera riciclare il prodotto da soli, rivolgersi all'azienda locale di smaltimento rifiuti per conoscere le linee guida per lo smaltimento.

IMMAGAZZINAMENTO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può causare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di gravi lesioni.

Non conservare il prodotto per un periodo prolungato vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte di freddo.

Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.

Rispettare le condizioni di stoccaggio e stivaggio del prodotto.

- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggete il vostro prodotto con l'imballaggio da polvere, corrosione (ad es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).
- Conservare tutte le parti rimosse insieme nello stesso posto (o localizzarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti al momento del riassettaggio.
- Tutti i componenti devono essere conservati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sui componenti del prodotto, non incastrare nulla...).

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	Lunghezza da 88 a 104 cm (parte superiore 70,5 cm) x Larghezza 33,5 cm x Spessore 2,8 cm
Peso	2,3 kg
Peso massimo supportato	10 kg

PERIODO DI UTILIZZO


L'aspettativa di vita di questo prodotto è di 5 anni in condizioni normali di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è in buone condizioni.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contattare il distributore presso il quale è stato acquistato il prodotto in caso di reclamo. I guasti dovuti a danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti dalla presente garanzia. Per l'applicazione della garanzia, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

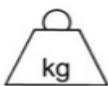

Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo permitido
10 kg