



 **PIED PORTE-SÉRUM PRO**
Notice d'utilisation
DISPOSITIF MEDICAL

 **PRO INFUSION STAND**
Instruction manual
MEDICAL DEVICE

 **SOPORTE PARA SUERO**
Manual de instrucciones
DISPOSITIVO MEDICO

 **ASTA PORTAFLEBO**
Manuale delle istruzioni
DISPOSITIVO MEDICO

REF. 823133



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE
 D'UTILISATION SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE
 INSTRUCTION MANUAL SÍMBOLO QUE APARECE EN LA ETIQUETA O EN
 EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
 MANUALE D'ISTRUZIONI DEI SIMBOLI CHE SONO RIPORTATI SU
 ETICHETTA E NEL MANUALE

	Date de fabrication Date of production Data di di produzione		Invitation à lire le manuel d'utilisation Invitation to read user manual Invito a leggere il manuale dell'utente
	Numéro de lot Batch number Número di lotto		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Segui le istruzioni di sicurezza
	Référence du produit Product reference Riferimento del prodotto		Conformité CE CE conformity Conformità CE
			Dispositif médical Medical Device Dispositivo Medico

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere le avvertenze, le precauzioni o le istruzioni, rivolgersi al proprio medico o al distributore prima di utilizzare il prodotto, per evitare rischi e danni.

Consultare il medico o l'operatore sanitario prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Questi vi consiglierà e vi informerà sull'uso più appropriato nel vostro caso.

Distributore: questo manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utenti del prodotto.

ASSEMBLAGGIO ED UTILIZZO



Prima dell'uso, ispezionare attentamente tutte le parti per verificare che non vi siano crepe o rotture.

Le persone con gravi disabilità o che non sono in grado di camminare senza aiuto non devono tentare di utilizzare questo prodotto senza assistenza.

- Questo prodotto è uno strumento speciale per l'infusione. Non tirare o appendere con forza altri oggetti e non far oscillare i bambini durante l'uso.
- La robustezza e l'affidabilità dell'installazione del supporto per infusione devono essere controllate regolarmente ogni anno.
- L'ambiente di utilizzo del prodotto per l'umidità relativa non è superiore al 90%, la temperatura in ambiente 40°C-50°C non corrosivo.
- Il gancio, la carrucola, la base e la manopola devono essere puliti regolarmente per garantire che siano sempre in uno stato pulito e igienico.

METODO DI INSTALLAZIONE

1. Installare la base e le rotelle.

- Rimuovere la base in lamiera d'acciaio e il parapolvere bianco ABS, installare le rotelle su ciascun piede della base e il parapolvere sulla parte superiore della base in ghisa.

2. Installare il gancio.


- Estrarre i raccordi blu a quattro ganci, installarli sulla parte superiore dell'asta interna del rack di infusione e fissarli.

3. Collegare la base e l'asta esterna.

- Svitare l'estremità inferiore dell'asta esterna, inserirla nella base e utilizzare una chiave esagonale (fornita nella confezione). Fissare le viti nella parte inferiore della base.

4. Regolare l'altezza del portainfusore.

- Regolare la manopola, regolare il supporto di infusione all'altezza appropriata, controllare che le viti siano ben strette, pronto per l'uso.

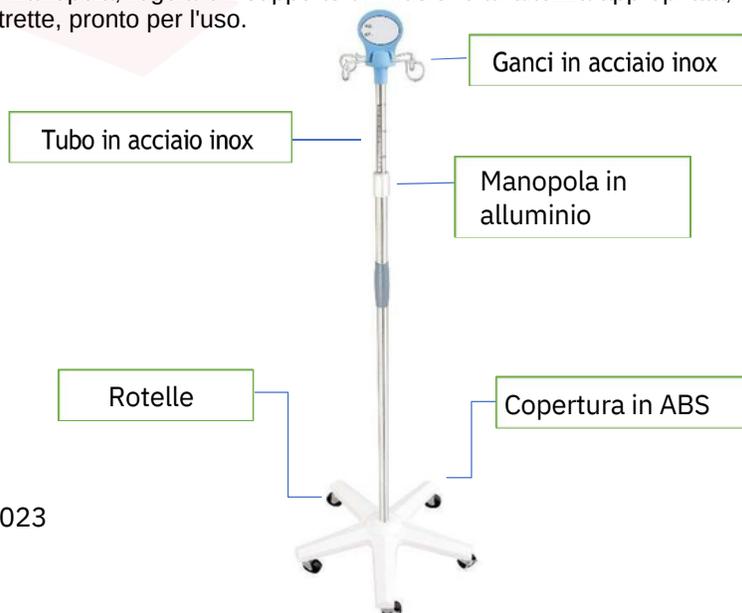

CURA E MANUTENZIONE

- Pulire con un detergente delicato e acqua, asciugare con un panno.

CAMBIO UTILIZZATORE

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando si trasferisce il prodotto, ricordarsi di consegnare al nuovo utente tutta la documentazione tecnica necessaria. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da uno specialista autorizzato.

RECICLAGGIO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e si deve buttare via: contattare il rivenditore specializzato. Se si desidera riciclare il prodotto da soli, rivolgersi all'azienda locale di smaltimento rifiuti per conoscere le linee guida per lo smaltimento.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di difetti di fabbricazione, progettazione o produzione. Contattare il distributore presso il quale è stato acquistato il prodotto in caso di reclamo. I guasti dovuti a danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti dalla presente garanzia. Per l'applicazione della garanzia, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

