



ROLLATOR NEO XL
Manuale di Istruzioni
DISPOSITIVO MEDICO

REFERENCE : 826065




Peso massimo consentito



181 kg

Peso massimo della sacca

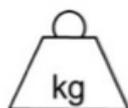

5 kg

SIMBOLO RIPORTATO SULL'ETICHETTA O SUL MANUALE ISTRUZIONI

	Indirizzo del produttore		Invito alla consultazione del manuale utente
	Data di produzione		Osservare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento del prodotto		Teme l'umidità
	Peso massimo utente		Dispositivo medico

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario. Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio medico o distributore prima di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi rischi e danni.

Consultare il medico o un professionista sanitario prima di utilizzare un ausilio per la deambulazione. Lui/lei vi consiglierà e vi informerà sulla tecnica di deambulazione più appropriata per voi. Distributore: questo opuscolo deve essere consegnato agli utilizzatori di questo prodotto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I Neo XL Rollator sono ausili per la deambulazione per persone con mobilità ridotta. Questi prodotti sono pensati per l'uso in spazi chiusi e all'aperto e possono essere ripiegati per un facile stoccaggio o trasporto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA



La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di gravi lesioni.

Non superare il limite massimo di peso di 181 Kg.

Non superare il limite massimo di carico nel cestino (5 kg). Trasportare solo carichi nel cestino. Non appendere oggetti pesanti al deambulatore poiché ciò potrebbe comprometterne la stabilità.

Assicurarsi che tutte le parti (ruote, cavi e maniglie) siano fissate saldamente e in buone condizioni di funzionamento.

Assicuratevi che le ruote siano ben strette e alla stessa altezza.

Non utilizzare il deambulatore su scale o scale mobili.

Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore.

Il rollator è un ausilio per la deambulazione. Non è una sedia a rotelle. Non è progettato per trasportare una persona seduta su di esso. Tale utilizzo può danneggiare le ruote e la struttura del rollator stesso. Il rollator potrebbe indebolirsi e non soddisfare più le sue caratteristiche meccaniche in un utilizzo futuro. Utilizzare il rollator solo come supporto per la deambulazione.

Non usare il deambulatore per camminare all'indietro.

Non apportare alcuna modifica al deambulatore mentre è in uso.

Prima dell'uso, verificare che i freni funzionino correttamente.

Durante l'uso, bloccare i freni di stazionamento per tutte le azioni.

Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il terreno.

Quando il rollator è in posizione stazionaria, i freni devono essere bloccati. Non tentare di spostare il rollator se i freni sono bloccati.

Assicuratevi di appoggiare le mani su ogni maniglia in modo che il deambulatore possa trovarsi nella posizione di forza parallela.

Prestare attenzione quando si sale sui marciapiedi o si cammina su superfici inclinate, irregolari o scivolose. In caso contrario, si corre un rischio significativo di caduta o infortunio.

Non utilizzare il deambulatore su pendii bagnati, ghiacciati o innevati.

Se qualche parte risulta danneggiata, rotta o usurata, contattare il distributore.

MONTAGGIO

Estrarre il deambulatore Neo XL dal suo imballo e controllare che tutti i componenti siano presenti. Rimuovere tutti gli imballaggi e le coperture protettive. Assicurarsi che tutti i componenti siano in buone condizioni prima del montaggio.

a. Aprire il deambulatore aprendo il telaio come mostrato nella Figura 1. Posizionare il telaio su una superficie piana. Delicatamente premere sul sedile per aprire completamente il telaio.

b. Inserire lo schienale nella parte posteriore del telaio come mostrato in figura 2. Per inserire la cartella premere i pulsanti alle estremità della cartella. Una volta in posizione, tirare lo schienale molto leggermente per assicurarsi che sia fissato correttamente.

c. Appoggia il rollator Neo XL sul pavimento in modo che poggi sul retro del telaio. (Immagine 3)

d. Inserire le ruote anteriori nel telaio. Le ruote sono fissate correttamente quando si sente un "clic". (Immagine 4)

e. Girare il deambulatore sul pavimento in modo che questa volta poggi sul lato delle ruote anteriori. (Figura 5) f. Inserire le ruote posteriori (contrassegnate con una "R") nel telaio del deambulatore. Le ruote sono fissate saldamente quando si sente un "clic" udibile. (Figura 6)

g. Riposizionare il deambulatore sul pavimento su queste 4 ruote. Assicurarsi che tutte le ruote siano posizionate alla stessa altezza e che il deambulatore non sia traballante. (Figura 7)

h. Inserire le maniglie nel telaio, assicurandosi che i cavi sono tutti all'esterno del telaio del deambulatore. (Figura 8)

i. Regolare l'altezza delle maniglie come desiderato premendo sui pulsanti dei tubi delle maniglie (immagine 9). Assicurarsi che le maniglie siano entrambe alla stessa altezza.



image 9

NOTA: assicurarsi che tutte e quattro le ruote siano posizionate alla stessa altezza prima di ogni utilizzo.

UTILIZZO

APRIRE IL ROLLATOR

- Afferrare le maniglie e premere sul sedile fino a quando tutte e quattro le ruote saranno allineate
- e il sedile completamente piatto.

Prima di utilizzare il deambulatore, assicurarsi che tutte e quattro le ruote siano a contatto con il pavimento e che il deambulatore sia stabile in posizione aperta.

RIPIEGARE IL ROLLATOR

- Sollevare il sedile e sollevare la barra di supporto del sedile finché il deambulatore non si chiude, come mostrato nella Figura 2.
- Per uno stoccaggio più compatto, tirare lo schienale verso l'alto.

REGOLARE L'ALTEZZA DELLE MANIGLIE

Nota: non rimuovere la camera d'aria da quella esterna quando si regola l'altezza delle maniglie.



image 10



image 1



image 2



image 5



image 6



image 3



image 4



image 7

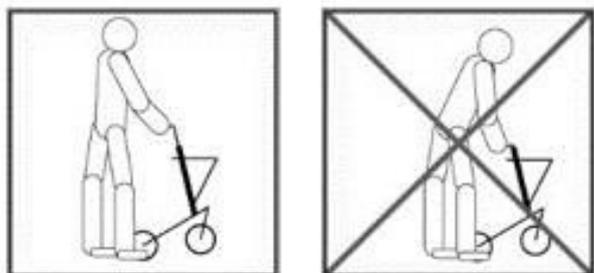


image 8

- Per far sì che il rollator sia all'altezza corretta, posizionarsi dietro il rollator con le braccia lungo i fianchi. Quindi regolare l'altezza delle maniglie all'altezza dei polsi dell'utente. (immagine 10) .

CAMMINARE CON IL ROLLATOR

- Durante l'uso, stare in posizione eretta dietro il deambulatore, senza piegare la schiena.
- Regolare l'altezza delle maniglie se la posizione di utilizzo non è corretta.



POSIZIONE SEDUTA

Quando si utilizza il deambulatore come sedia, assicurarsi che vengano seguite tutte le precauzioni di sicurezza, in particolare:

- Assicurarsi che i freni di stazionamento siano bloccati per tutto il periodo di seduta e quando si cambia posizione da in piedi a seduti e da seduti a in piedi. Non utilizzare come seduta a meno che lo schienale non sia in Non sedersi quando il deambulatore si trova su una superficie inclinata o irregolare.
- Non superare il peso massimo
- Questo deambulatore non è una sedia a rotelle.
- Non è progettato per trasportare una persona seduta su di esso. Tale utilizzo potrebbe danneggiare le ruote e la struttura del deambulatore stesso. Il deambulatore potrebbe indebolirsi e non soddisfare più le sue caratteristiche meccaniche in un uso futuro.

USO DEI FRENI

- Per rallentare, tirare entrambe le maniglie verso l'alto.
- Per attivare i freni di stazionamento (blocco), spingere entrambe le maniglie con decisione verso il basso finché non si innestano. Un clic distinto indica che i freni sono bloccati. Tirare entrambe le maniglie verso l'alto per rilasciare i freni di stazionamento (sblocco).

REGOLAZIONE DEL FRENO

Ci sono due tenditori del cavo del freno su ogni lato del Rollator, uno davanti alla maniglia del freno e il secondo è posizionato sulla pinza del freno vicino alla ruota posteriore. È possibile effettuare regolazioni su entrambi i tenditori.

- Per effettuare la regolazione vicino all'impugnatura, allentare la manopola (potrebbe essere necessario un attrezzo per eseguire questa operazione) e girare la vite di regolazione in senso antiorario per tendere il cavo del freno, quindi stringere nuovamente la manopola. - Per la regolazione sulla pinza posteriore, allentare la manopola di regolazione (potrebbe essere necessario un attrezzo per eseguire questa operazione) e girare la vite di regolazione in senso antiorario per tendere il cavo del freno, quindi stringere nuovamente la manopola di regolazione.

Per una corretta regolazione, il meccanismo del freno non deve toccare la ruota, ma la distanza tra la ganaschia del freno e la ruota non deve essere superiore a 3-4 mm.

- Attenzione: dopo aver regolato i freni, è necessario testarli prima di utilizzare il deambulatore.
- Se nonostante la regolazione i freni continuano a non funzionare, non utilizzare il deambulatore.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e monitoraggio del prodotto può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Pulire regolarmente il deambulatore con acqua calda e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi, detergenti o solventi.

- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Assicurarci che non vi siano accumuli di sporco o detriti attorno all'asse, ai freni o alle ruote.
- Non utilizzare prodotti di pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide.
- Lubrificare le ruote con un po' di olio se cigolano.
- Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti e i bulloni. Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiate o usurate.
- Controllare che i freni funzionino prima di ogni utilizzo.
- Controllare i freni di stazionamento spingendo le maniglie in posizione di blocco, quindi provare a spingere il deambulatore.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il deambulatore da soli. Consultare un rivenditore autorizzato.

Lista di controllo:

Per mantenere il deambulatore in buone condizioni, controllare prima di ogni utilizzo e controllare regolarmente quanto segue:

Controlla l'articolo	In qualsiasi momento	Settimanale	Mensile	Annuale
Clip e manopola per la regolazione dell'altezza		X		
Saldatura strutturale sulle ruote		X		
Pulizia	X			
Viti e dispositivi di fissaggio		X		
Stabilità del telaio e dello schienale			X	
Condizioni del sedile				X
Freni	X			

CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando si trasferisce il rollator, ricordarsi di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. In precedenza, il prodotto deve essere ispezionato da uno specialista autorizzato.

RICICLAGGIO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e devi smaltirlo: contatta il tuo rivenditore specializzato. Se desideri effettuare autonomamente il riciclaggio, chiedi alla tua azienda locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di gravi lesioni.

Non riporre il deambulatore per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte fredda.

Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.

Rispettare le condizioni di stoccaggio e stivaggio dei rollator.

In un luogo asciutto e temperato

Proteggere il deambulatore imballandolo da polvere e corrosione (ad esempio elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).

Conservare tutte le parti rimosse insieme nello stesso posto (o individuarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.

Tutti i componenti devono essere riposti senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del deambulatore, non incastrare nulla...).

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	Larghezza 73 cm x Profondità 73/78 cm x Altezza 83/98 cm
Altezza regolabile da	Da 83 a 98 cm in 5 posizioni
Seduta	Larghezza 42 cm x Altezza 53/57 cm x Profondità 39,5 cm
Larghezza tra i braccioli	54 cm
Carico massimo	181 kg
Struttura in alluminio	
Peso	8,8 kg con poggiatesta
Diametro ruote	20,5 cm

PERIODO DI UTILIZZO

La durata di vita prevista di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contattare il distributore da cui è stato acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per applicare la garanzia.