

 ROLLATOR A 2 RUOTE IN ALLUMINIO
Manuale di istruzioni
DISPOSITIVO MEDICO

REF. 826186



IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario. Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio medico o distributore prima di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi rischi e danni. Consultare il proprio medico o il proprio medico prima di utilizzare un ausilio per la mobilità.

Distributore: Il presente manuale deve essere consegnato agli utilizzatori di questo prodotto.

SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O NEL MANUALE DI ISTRUZIONI

	Indirizzo del produttore		Invito a consultare il manuale d'uso
	Data di produzione		Seguire le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento prodotto		Non tollera l'umidità
	Peso massimo dell'utente		Dispositivo medico

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Il Rollator classico a 2 ruote in alluminio è un ausilio per la deambulazione per persone con mobilità ridotta. Questi deambulatori sono pensati per l'uso in spazi chiusi e all'aperto e possono essere ripiegati per un facile stoccaggio o trasporto.



La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di gravi lesioni.

Non superare il limite massimo di peso di 120 Kg.

Non utilizzare il deambulatore su scale o scale mobili.

Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore.

Controllare attentamente tutti i componenti del prodotto (viti, tubi, punte, impugnature). Controllare regolarmente che tutte le viti siano serrate. Tenere saldamente e completamente la maniglia durante l'uso. In caso di caduta: lasciare che il prodotto cada di lato, in modo da non caderci sopra. Muoversi sempre in avanti silenziosamente e con passi brevi per garantire un buon equilibrio del proprio peso ed evitare di perdere l'equilibrio. Utilizzare solo come ausilio per la deambulazione e nel modo corretto: non utilizzare come leva o per spostare mobili. Dopo aver aperto o montato l'ausilio per la deambulazione, assicurarsi che sia bloccato saldamente in posizione APERTA e livellato al suolo prima dell'uso. NON appendere nulla all'ausilio per la deambulazione. Verificare SEMPRE che l'ausilio per la deambulazione e gli accessori siano bloccati correttamente e saldamente in posizione prima dell'uso.

Non è consentito apportare modifiche a questo dispositivo. Utilizzare solo parti originali per sostituire quelle rotte o difettose e lasciare che ciò venga fatto dal personale tecnico. Nel caso in cui non si utilizzi il deambulatore per un lungo periodo, farlo controllare dal personale tecnico prima dell'uso. Fare attenzione durante l'uso: fare attenzione a buchi e deformazioni nel pavimento. Fare attenzione: rischio di schiacciamento e schiacciamento delle dita durante la piegatura/apertura. Assicurarsi che le manopole siano serrate allo stesso livello e che le maniglie siano fissate saldamente. Non utilizzare il deambulatore per camminare all'indietro. Non apportare alcuna regolazione al deambulatore mentre è in uso. Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il terreno. Assicurarsi che il sedile sia agganciato in piano prima dell'uso. Non utilizzare il sedile per trasportare oggetti. Non sedersi sul sedile quando il deambulatore è in pendenza. Quando si è seduti, non cercare di raggiungere oggetti sporgendosi in avanti. Non sporgersi all'indietro poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento del deambulatore. Fare attenzione quando si sale sui marciapiedi o si cammina su superfici in pendenza, irregolari o scivolose. In caso contrario, si corre il rischio significativo di cadute o lesioni. Non utilizzare il deambulatore su pendii bagnati, ghiacciati o innevati. Se una qualsiasi parte è danneggiata, rotta o usurata, contattare il rivenditore.

MONTAGGIO E UTILIZZO

Solo gli specialisti possono regolare il prodotto e insegnarti come usarlo. Un uso o una regolazione sbagliati potrebbero causare un sovraccarico del dispositivo o del paziente. Il dispositivo deve essere regolato individualmente dal personale tecnico in base alle tue esigenze. Chiedi al personale tecnico come usare questo prodotto e assicurati di aver capito chiaramente la loro spiegazione. In caso di dubbi, non esitare a chiedere di nuovo. A seconda del modello scelto, il rollator potrebbe avere un sedile o meno.

Apertura

Tirare indietro le gambe del deambulatore [1]. Controllare che i meccanismi di bloccaggio posti su ciascun lato del deambulatore siano orizzontali e correttamente bloccati [2]. **Verificare la stabilità prima dell'uso.**

Maniglie anatomiche di spinta 1-Posizionare la maniglia anatomica di spinta in modo che quando il braccio dell'utente è abbassato sul fianco, l'impugnatura sia all'altezza del polso. 2. Installare la manopola di regolazione in uno dei fori di regolazione e nel controdado ruotando in senso orario. Piegatura Per piegare il deambulatore, sollevare il sedile [3] e tirare verso l'alto la cinghia sotto il sedile finché il deambulatore non si chiude [4].



CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e manutenzione del prodotto può comportare il rischio di gravi lesioni.

Pulisci regolarmente il deambulatore con acqua calda e un panno morbido. Non usare prodotti abrasivi o detergenti.

- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporcizia o detriti attorno all'asse, ai freni o alle ruote.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro e tutti i prodotti a base di solventi, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide.
- Se le ruote cigolano, lubrificarle con un po' d'olio.
- Controllare regolarmente che tutte le viti siano correttamente fissate e serrate.
- Controllare il corretto funzionamento dei freni prima di ogni utilizzo.
- Controllare i freni di stazionamento bloccando il deambulatore in modalità parcheggio e provando a spostarlo in avanti.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il rollator da soli. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato.

- **Checklist:** per mantenere il deambulatore in buone condizioni, controllare prima di ogni utilizzo e controllare regolarmente come segue

Controlla l'articolo	In qualsiasi momento	Settimanale	Mensile	Annuale
Clip e manopola per la regolazione dell'altezza	X			
Saldatura strutturale sulle ruote		X		
Pulizia				X
Viti e dispositivi di fissaggio		X		
Stabilità del telaio e dello schienale			X	
Condizioni del sedile			X	
Condizioni delle ruote e dei cuscinetti		X		

CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando trasferisci il tuo prodotto, ricordati di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. In precedenza, il prodotto deve essere ispezionato da uno specialista autorizzato.

RICICLO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e devi smaltirlo: contatta il tuo rivenditore specializzato. Se desideri effettuare autonomamente il riciclaggio, chiedi alla tua azienda locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può portare al deterioramento del prodotto e quindi al rischio di gravi lesioni.

Non riporre il deambulatore per lunghi periodi di tempo vicino a una fonte di calore o di luce solare (ad esempio dietro una finestra, vicino a un termosifone o in un'auto) o vicino a una fonte di freddo.

Tenere lontano da fiamme libere e scintille.

Rispettare le condizioni di stoccaggio dei rollator.

- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggi il tuo deambulatore avvolgendolo da polvere e corrosione (ad esempio elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata)
- Conservare tutte le parti smontate insieme, nello stesso posto (o contrassegnarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere riposti senza alcun carico (non appoggiare oggetti pesanti sulle parti del deambulatore, non incastrare nulla).

PERIODO DI UTILIZZO

La durata di vita prevista di questo prodotto è di 2 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	Larghezza 54 cm x Profondità 62 cm X Altezza 79-93 cm
Distanza tra le ruote	52 cm
Larghezza seduta	Larghezza 40 cm x altezza 55 cm
Distanza tra i tubi posteriori	40 cm
Il prodotto è costituito da un telaio in alluminio e vari componenti in plastica	
Diametro ruote	11 cm
Peso	3,2kg
Peso massimo utente	120kg

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contattare il distributore da cui è stato acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per applicare la garanzia.