

 **ROLLATOR CARROZZINA VICTOR**

Manuale di Istruzioni
DISPOSITIVO MEDICO

REFERENCE: 826228



IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario. Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio medico o distributore prima di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi rischi e danni. Consultare il proprio medico o il proprio medico prima di utilizzare un ausilio per la deambulazione. Lui/lei vi consiglierà e vi informerà sulla tecnica di deambulazione più appropriata per voi. Distributore: questo opuscolo deve essere consegnato agli utenti di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Il Rollator carrozzina Victor è un ausilio per la deambulazione per persone con mobilità ridotta. Questo prodotto è progettato per l'uso in spazi chiusi e all'aperto e si ripiega per un facile stoccaggio o trasporto.



PRECAUZIONI DI SICUREZZA



La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di gravi lesioni.

Non superare il limite massimo di peso di 110 kg. Non superare il limite massimo di carico nel cestino (5 kg). I carichi devono essere trasportati solo nel cestino. Non attaccare oggetti pesanti al deambulatore poiché ciò potrebbe comprometterne la stabilità. Assicurarsi che tutte le parti siano fissate saldamente e in buone condizioni di funzionamento. Controllare regolarmente le viti e i fissaggi del deambulatore e riserrarli se necessario. Assicurarsi che il fermo di bloccaggio sulle maniglie sia correttamente inserito. Assicurarsi che entrambe le maniglie siano strette e alla stessa altezza. Testare la stabilità del deambulatore prima di applicare tutto il peso alle maniglie. Non utilizzare il sedile quando il deambulatore si trova su un terreno in pendenza o irregolare. Utilizzare il deambulatore solo su superfici piane e solide. Sostituire le ruote se sono molto usurate o danneggiate. Non utilizzare il deambulatore quando il poggiapiedi è esteso; deve essere represso. Quando i blocchi vengono rilasciati, le ruote devono poter girare liberamente. Bloccare sempre la leva del freno prima di sedersi.

Sostituire gli pneumatici se sono molto usurati o danneggiati.

Non utilizzare il deambulatore su scale o scale mobili.

Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore.

Non apportare alcuna modifica al deambulatore mentre è in uso.

Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il terreno.

Prestare attenzione quando si sale sui marciapiedi o si utilizzano superfici inclinate, irregolari o scivolose. In caso contrario, si corre il rischio serio di cadere o farsi male.

Non utilizzare il deambulatore su pendii bagnati, ghiacciati o innevati.

NON APPOGGIARSI sul poggiapiedi per sedersi; il poggiapiedi deve essere estratto una volta che il paziente è seduto.

Controllare che lo schienale sia in posizione seduta e che le clip siano completamente estese.

Se qualche parte risulta danneggiata, rotta o usurata, contattare il rivenditore.

MONTAGGIO E UTILIZZO

Istruzioni di montaggio

1. Estrarre il Rollator e tutti i suoi componenti dall'imbballaggio.
2. Aprire il deambulatore e spingere il sedile verso il basso, assicurandosi che le barre delle cerniere laterali siano in posizione aperta e bloccata.
3. Installare la barra di supporto dello schienale inserendo ciascuna estremità nelle fessure fornite. Scatterà in posizione.
4. Regolare l'altezza delle maniglie. Le altezze devono essere le stesse a destra e a sinistra. Fissare i tubi serrando le viti su ogni lato. Assicurarsi che i cavi rimangano all'esterno della struttura e che le guaine non siano schiacciate o piegate.
5. L'altezza corretta per le maniglie si ottiene quando si è in posizione eretta con le mani sulle maniglie, senza piegare i polsi.

Utilizzo del deambulatore Victor

1. Per rallentare, premere leggermente le leve della maniglia con le dita. Le leve devono essere premute contemporaneamente a destra e a sinistra.
2. Per bloccare i freni, ad esempio per immobilizzare il deambulatore, spingere con decisione verso il basso le 2 leve della maniglia finché non si bloccano da sole.
3. Per sbloccare i freni, tirare verso l'alto le 2 leve della maniglia.
4. Per utilizzarlo per il trasporto di persone, installare la barra di supporto dello schienale al contrario e abbassare la pedana.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e monitoraggio del prodotto può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Pulire regolarmente il deambulatore con acqua calda e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi, detersivi o solventi.
- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporcizia o detriti attorno all'asse, ai freni o alle ruote.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide.
- Se le ruote cigolano, lubrificarle con un po' d'olio.
- Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti e bulloni. Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiate o usurate.
- Controllare che i freni funzionino prima di ogni utilizzo.
- Controllare i freni di stazionamento spingendo le maniglie in posizione di blocco, quindi provare a spingere il deambulatore.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il rollator da soli. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato.
- Lista di controllo:

Per mantenere il deambulatore in buone condizioni, controllare prima di ogni utilizzo e controllare regolarmente quanto segue:

Controlla l'articolo	In qualsiasi momento	Settimanale	Mensile
Clip e manopola per la regolazione dell'altezza		X	
Saldatura strutturale sulle ruote		X	
Pulizia	X		
Viti e dispositivi di fissaggio		X	
Stabilità del telaio e dello schienale			X
Condizioni del sedile			X
Freni	X		

CAMBIO DI PROPRIETA'

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando si trasferisce il rollator, ricordarsi di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. In precedenza, il prodotto deve essere ispezionato da uno specialista autorizzato.

RICICLAGGIO

Se il prodotto è diventato inutilizzabile e dovete smaltirlo: contattate il vostro rivenditore specializzato. Se desideri effettuare autonomamente il riciclaggio, chiedi alla tua azienda locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di gravi lesioni.

Non riporre il deambulatore per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte fredda.

Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.

Rispettare le condizioni di stoccaggio e stivaggio dei rollator.

- In un luogo asciutto e temperato Proteggere il deambulatore imballandolo da polvere e corrosione (ad esempio elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).
- Conservare tutte le parti rimosse insieme nello stesso posto (o individuarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.

- Tutti i componenti devono essere riposti senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del deambulatore, non incastrare nulla...).

Dimensioni totali	Larghezza 60 cm x Profondità 65 cm x Altezza maniglia 78/89 cm in 6 posizioni
Dimensioni seduta	Larghezza 35 cm x Profondità 32 cm x Altezza 52 cm
Distanza tra i braccioli	45,5 cm
Peso	8,8 kg
Carico massimo	110 kg

PERIODO DI UTILIZZO

La durata di vita prevista di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contattare il distributore da cui è stato acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per applicare la garanzia.