



SEDIA COMODA WC REGOLABILE MURANO
Istruzioni per l'uso - DISPOSITIVO MEDICO

811025



SIMBOLO PRESENTE SULL'ETICHETTA O NEL MANUALE DI ISTRUZIONI

	Indirizzo del produttore		Invito a consultare il manuale d'uso
	Data di fabbricazione		Rispettare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento del prodotto		Dispositivo medico
	Peso massimo dell'utente		Non tollera l'umidità

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario. Utente: Se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio medico o il distributore prima di utilizzare questo prodotto, per evitare rischi e danni. Consultare il proprio medico o il proprio medico prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Il medico o il professionista sanitario saprà consigliare e informare l'utente sull'uso più appropriato al proprio caso. Distributore: il presente manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utenti di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

La sedia da WC Murano è un dispositivo medico. È un ausilio tecnico per l'igiene personale, pensato per anziani, persone con mobilità ridotta, disabili, persone infortunate o che tendono a perdere facilmente l'equilibrio. Offre un posizionamento e un utilizzo del WC confortevoli per persone robuste. Il codice 811025 è regolabile in altezza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



PRECAUZIONI DI SICUREZZA



Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Non superare mai il limite di peso massimo di 130 kg.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i componenti siano ben saldi.
- Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni di funzionamento.
- Ispezionare visivamente il prodotto.
- Verificare la stabilità della sedia prima dell'uso.
- Utilizzare solo su una superficie piana.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano alla stessa altezza e che le clip siano correttamente agganciate
- Non appoggiarsi mai sulla sedia mentre si è seduti. Il rischio di ribaltamento aumenta con carichi pesanti unilaterali.
- Non salire sul sedile del water: rischio di scivolamento!
- Prestare attenzione ai rischi di schiacciamento durante l'uso.
- Se qualche parte risulta danneggiata, rotta, usurata o mancante, contattare il rivenditore.
- Segnalare eventuali incidenti gravi correlati al prodotto al produttore e all'autorità competente nello Stato membro in cui si trova l'utente e/o il paziente.

MONTAGGIO E UTILIZZO

- Disimballare con cura il prodotto ed esaminarlo per accertarsi che sia completo. Prima dell'uso, verificare la presenza di eventuali segni di danneggiamento, come saldature incrinare, vernice scrostata, sella crepata o danneggiata o tubo piegato. Se si nota uno di questi problemi, si prega di contattarci e di astenersi dall'utilizzare il prodotto.

INSTALLAZIONE:

- Prima dell'uso, assicurarsi che la sedia comoda sia stabile su una superficie piana e orizzontale.
- Per regolare l'altezza della sedia comoda (modello 811025), rimuovere le clip e far scorrere l'estensione della gamba all'altezza desiderata.

Assicurarsi che tutte le gambe siano regolate alla stessa altezza e riattaccare le clip.

- Inserire il secchio per la sedia comoda. Assicurarsi che il manico del secchio poggi sulla barra anteriore della sedia comoda. Verificare che il secchio sia posizionato correttamente sotto la sedia mentre è in posizione seduta e durante l'utilizzo.
- Fissare il sedile del WC alla barra trasversale posteriore, assicurandosi che scatti in posizione.

UTILIZZO :

- Per spostare il prodotto, sollevarlo sempre appoggiando le mani sul telaio tubolare metallico sotto il sedile.
- Non consentire ai bambini o a persone non autorizzate di giocare con l'attrezzatura o di utilizzarla senza la dovuta supervisione.
- Non oscillare avanti e indietro o da un lato all'altro durante l'uso del prodotto, poiché ciò potrebbe causare sollecitazioni eccessive e potenzialmente causare danni o guasti, con conseguenti lesioni.
- Non utilizzare il prodotto fuori casa o su superfici irregolari (ad esempio in giardino), poiché ciò potrebbe sollecitare le gambe e potenzialmente danneggiarle.
- Non inserire dita o oggetti estranei nelle sezioni tubolari esposte, poiché ciò potrebbe causare gravi lesioni.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e manutenzione del prodotto può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Pulire regolarmente il prodotto con un panno umido e disinfettante. Non utilizzare prodotti abrasivi, detergenti o prodotti a base di solventi.
- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Prima di pulire la sedia, rimuovere i due braccioli, lo schienale e i quattro piedini di estensione con i relativi tappi terminali. Pulire queste parti separatamente dal telaio principale.
- La sedia deve essere sottoposta a manutenzione completa ogni anno, con lubrificazione obbligatoria.
- Si consiglia di sottoporre il prodotto a manutenzione almeno una volta all'anno. Se il prodotto è soggetto a un uso intensivo e/o in un ambiente multiutente, si consiglia di sottoporlo a manutenzione più frequentemente.
- Prima di ogni utilizzo, controllare le condizioni dei piedini in gomma, del telaio e del sedile.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il prodotto da soli. Consultare un rivenditore autorizzato.

CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Al momento del trasferimento del prodotto, ricordarsi di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da un tecnico autorizzato.

RICICLO

Quando il prodotto diventa inutilizzabile e deve essere smaltito, contattare il proprio rivenditore specializzato. Se si desidera procedere autonomamente al riciclaggio, chiedere all'azienda locale di smaltimento rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di gravi lesioni.

- Non conservare il prodotto per un periodo prolungato vicino a fonti di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.
- Rispettare le condizioni di conservazione del prodotto:
 - In un luogo asciutto e temperato Proteggere il prodotto da polvere e corrosione (ad esempio elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).
- Conservare tutte le parti rimosse insieme nello stesso posto (o individuarle se necessario) per evitare di mescolarle con altre prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

PERIODO DI UTILIZZO

La durata prevista di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è in buone condizioni. Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente multiutente (come una casa di cura o un ospedale), la sua durata potrebbe ridursi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di carico massima (kg)	130
Peso (kg)	8
Larghezza totale (cm)	59.5-62
Altezza (cm)	82-98
Profondità (cm)	53-61
Larghezza seduta (cm)	43
Profondità seduta (cm)	45
Altezza seduta (cm)	49-62
Colore	Blu
Dimensioni apertura seduta (cm)	24 x 21
Telaio	Acciaio verniciato a polvere
Sedile	Legno + Schiuma + PVC
Piedini	TPE
Secchio	PP

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi componente rotto a causa di difetti di fabbricazione, progettazione o fabbricazione. Contattare il distributore presso cui è stato acquistato il prodotto per eventuali reclami. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazioni o usura non sono coperti da questa garanzia. Contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto per applicare la garanzia.



Identità – ZA Pole 49 Bd de la Chanterie
49124 San Bartolomeo d'Angiò



Peso massimo autorizzato

130 chili

