



SEDIA DOCCIA/WC PELICAN

Manuale d'istruzioni - DISPOSITIVO MEDICO



REF. 822158S– 822158L

Simbolo riportato sull'etichetta o nel manuale di istruzioni

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
|  | Indirizzo del produttore |  | Invito a consultare il manuale d'istruzioni |
|  | Data di produzione |  | Seguire le istruzioni di sicurezza |
|  | Numero di lotto |  | Conformità CE |
|  | Riferimento del prodotto |  | Proteggere dall'umidità |
|  | Peso massimo dell'utente |  | Dispositivo medico |




ATTENZIONE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario. Utente: Se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio medico o il distributore prima di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi rischi e danni fisici. Consultare il proprio medico o il proprio medico prima di utilizzare un dispositivo medico. Sarà lui a consigliare l'uso più appropriato. Distributore: questo manuale deve essere consegnato agli utenti di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

La sedia da doccia/comoda Pelican è un dispositivo medico di assistenza progettato per bambini con mobilità ridotta, compresi quelli con disabilità multiple o spasticità. Adatta sia per uso domestico che medico, offre un supporto sicuro in posizione seduta. Il suo design girevole e basculante facilita il bagno e la doccia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

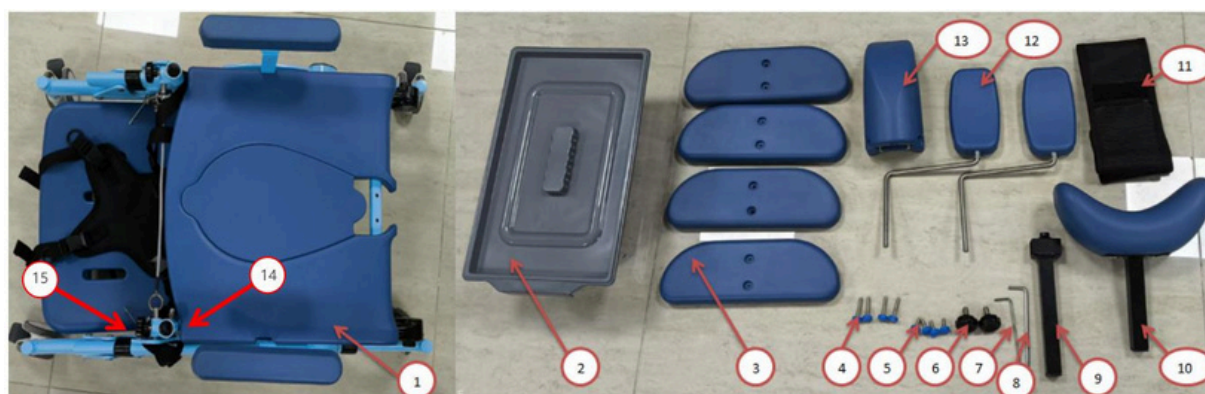

Elenco delle parti:

| NO. | Nome delle parti | Quantità | Commenti |
|-----|---|----------|--|
| 1 | Corpo (telaio + schienale) | 1 | |
| 2 | Panca comoda | 1 | |
| 3 | Pannello laterale | 4 | |
| 4 | Vite pannello laterale M5*38 | 4 | Per l'installazione di 2 pannelli laterali su ciascun lato |
| 5 | Vite pannello laterale M5*17 | 4 | |
| 6 | Vite a testa zigrinata M8*15 | 2 | Per l'installazione di 1 pannello laterale su ciascun lato |
| 7 | Chiave a brugola 3# | 1 | |
| 8 | Chiave a brugola 4# | 1 | Per fissare il poggiatesta |
| 9 | Leva di regolaz. dell'altezza del poggiatesta | 1 | Per regolare il cuscino toracico |
| 10 | Leva regolaz. avanti/indietro del poggiatesta | 1 | Per installare il cuscino toracico |
| 11 | Cinghie per polpacci | 1 | |
| 12 | Cuscino toracico | 2 | |
| 13 | Separatore per gambe | 1 | |
| 14 | Vite a testa esagonale M6x50 | 2 | Per installare lo schienale |
| 15 | Dado a manopola M6 | 2 | Per installare lo schienale |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PRECAUZIONI DI SICUREZZA




La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Non superare il limite di peso massimo di 100 kg.
- Non utilizzare la sedia da doccia sulle scale o sulle scale mobili.
- Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore.
- Assicurarsi che le manopole di regolazione siano serrate correttamente allo stesso livello e che la maniglia sia fissata saldamente.
- Sedersi sempre sul sedile quando la sedia da doccia è ferma e i freni sono bloccati. Un uso improprio può causare gravi lesioni all'utente e/o danni al telaio e/o alle ruote della sedia.
- Prima di utilizzare la sedia da doccia, assicurarsi che:
 - La sedia è correttamente assemblata.
 - Tutti i componenti della sedia sono fissati saldamente.
 - La sedia non presenta difetti visibili.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la sedia da doccia sia correttamente bloccata.
- Assicurarsi che tutti i componenti (ruote, cilindri, maniglie, freni, poggiatesta, guardrail) siano fissati saldamente e in buone condizioni di funzionamento.
- Non apportare alcuna modifica al prodotto mentre è in uso.
- Tutte le ruote devono sempre rimanere a contatto con il terreno.
- Prima dell'uso, verificare il corretto funzionamento dei freni.
- Quando la sedia da doccia è ferma, i freni devono essere bloccati. Non tentare di spostare il prodotto mentre i freni sono bloccati.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il seggiolino sia correttamente agganciato in posizione piana.
- Non utilizzare la sedia senza schienale.
- Quando si è seduti, non cercare di raggiungere oggetti sporgendoti in avanti.
- Se qualche parte risulta danneggiata, rotta o usurata, contattare il rivenditore.
- Prestare attenzione ai rischi di schiacciamento e caduta associati ai cilindri e ai meccanismi di piegatura. Maneggiare questi elementi con cura per evitare incidenti. Assicurarsi che il seggiolino per bambini sia fissato saldamente per prevenire il rischio di caduta. Utilizzare dispositivi di ritenuta adeguati per garantire la sicurezza (imbracatura, cerniera del poggipiedi). Seguire le dimensioni e le linee guida consigliate per l'utente per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.
- Prima di ogni utilizzo, controllare la regolazione dell'inclinazione dello schienale e assicurarsi che i perni di regolazione siano correttamente innestati.

ASSEMBLAGGIO

Fase 1: Installazione dello schienale

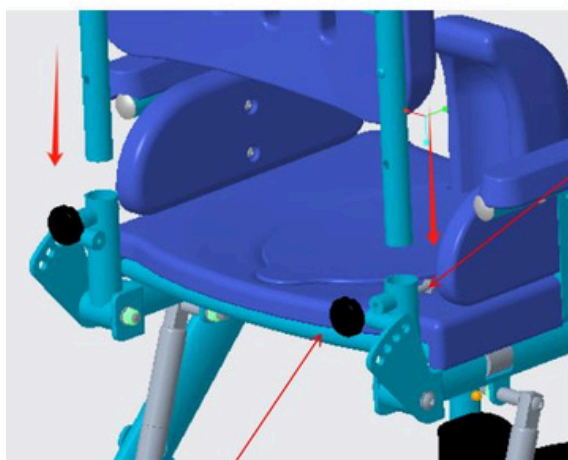


Estrarre lo schienale dalla scatola e installarlo sul telaio, quindi fissarlo con la vite a testa zigrinata nel telaio. Nota: utilizzare entrambe le mani e inserire entrambi i lati nel tubo contemporaneamente durante l'installazione dello schienale.

Fase 2: aprire il poggiatesta



Premere il pulsante di articolazione su entrambi i lati e aprire il poggiatesta all'angolazione desiderata. Utilizzare il cordino situato nella parte inferiore per dispiegare i pedali.

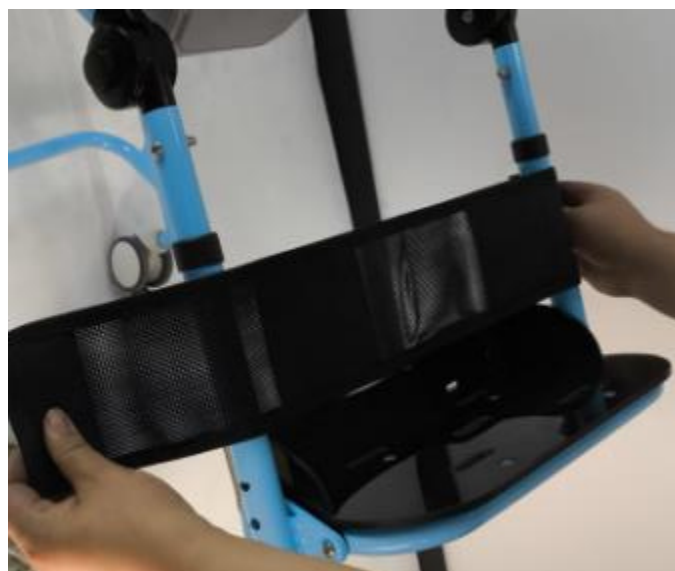

Fase 3 Fissare la cinghia del polpaccio nella posizione appropriata e lisciare il velcro.

Fase 4: Reimpostazione dell'angolazione del telaio del sedile



Azionare la leva dell'interruttore della molla a gas con entrambe le mani per ripristinare l'inclinazione del sedile. Una volta che ogni componente è completamente dispiegato, il risultato dovrebbe corrispondere alla foto sopra.

Fase 5: Installare il poggiatesta



Per prima cosa montare il poggiatesta come mostrato nella figura 1, quindi inserire il poggiatesta e selezionare l'altezza appropriata per stringere la manopola di bloccaggio.

Fase 6: Installare il separatore delle gambe



Allineare i fori del separatore delle gambe con quelli presenti sul sedile, quindi inserirlo nel sedile per completare l'installazione.

Fase 7: Installare il vaso del water



Per la taglia L, inserire il sedile del water dalla parte posteriore del sedile, come mostrato sopra.



Per la taglia S, inserire il sedile del water dalla parte posteriore del sedile, come mostrato sopra.

Fase 8: Installazione del cuscino toracico



Inserire l'asta in acciaio inossidabile del cuscino toracico nel corpo, quindi serrare le due viti utilizzando una chiave a brugola da 4. Installare l'altro lato allo stesso modo, assicurandosi che sia simmetrico su entrambi i lati.

Fase 9: Installazione del pannello laterale

| Larghezza del sedile: | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| Quantità di pannelli laterali | taglia L | Taglia S |
| 0 | 43,5 cm | 38,5 cm |
| 1 | 38,5 cm | 33,5 cm |
| 2 | 33,5 cm | 28,5 cm |


L'utente può determinare la quantità di pannelli laterali in base alle proprie esigenze.



Per installare un pannello laterale su ciascun lato, utilizzare la vite corta da 17 mm.



Per installare due pannelli laterali su ciascun lato, utilizzare la vite corta da 38 mm.

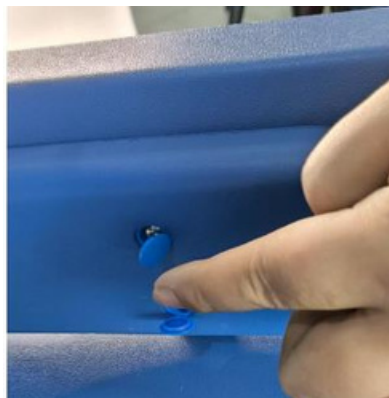

Installare i pannelli laterali sui tubi del bracciolo. Una volta serrate le viti, posizionare la copertura in plastica per completare l'installazione.

UTILIZZO

Fase 1: Regolazione dell'altezza del sedile: 565 mm, 585 mm, 610 mm (tre altezze disponibili).




Fase 2: Regolazione dell'angolazione del poggiatesta: regolabile su più angolazioni.

Regolare il poggiatesta come mostrato nella foto qui sotto.




Premere contemporaneamente il pulsante di articolazione su entrambi i lati, quindi ruotare il poggiamambe fino all'angolazione desiderata. Rilasciare il pulsante e attendere un clic per completare la regolazione dell'angolazione del poggiamambe.

Fase 3: Regolazione dell'altezza del poggiapiedi: regolabile su 3 livelli

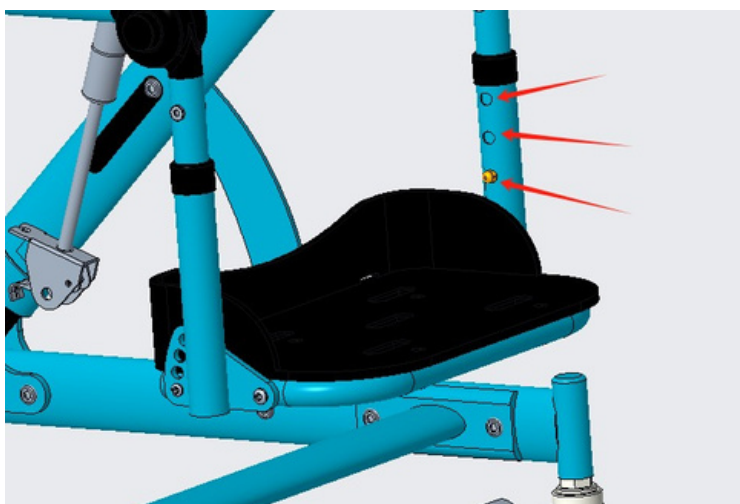

Premere contemporaneamente i perni di spinta su entrambi i lati dei tubi delle gambe. Spostare il poggiamambe verso l'alto o verso il basso fino all'altezza desiderata. Assicurarsi che i perni di spinta siano completamente espulsi prima dell'uso.

Fase 4: Regolazione dell'inclinazione dello schienale: regolabile su 4 livelli, da 90° a 120°.

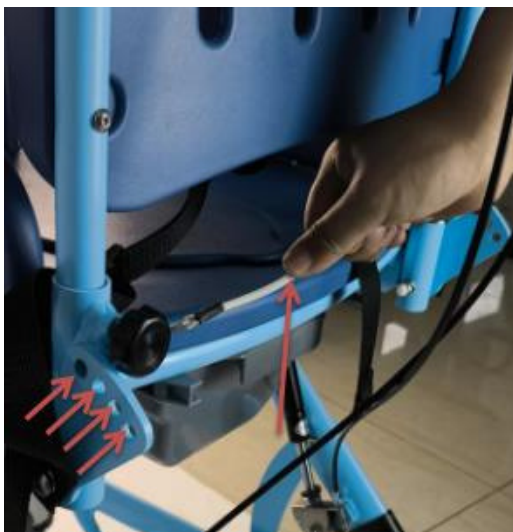

Utilizzare il cordino situato dietro lo schienale per regolare l'angolazione nella posizione desiderata. Una volta completata la regolazione, si sentirà un clic. Assicurarsi che i perni di bloccaggio siano completamente inseriti prima dell'uso.

Fase 5: Regolazione dell'inclinazione del sedile: regolabile da 90° a 135°.



La regolazione dell'angolo di inclinazione si effettua azionando contemporaneamente la leva della molla a gas con entrambe le mani. Quando il sedile raggiunge l'angolazione desiderata, rilasciare la leva dell'interruttore per completare la regolazione.

Nota: assicurarsi che la cintura di sicurezza dell'utente sia correttamente allacciata prima di regolare inclinazione.

Fase 6: Regolazione dell'altezza del cuscino toracico: regolabile su 4 livelli.



Utilizzare una chiave a brugola da 4 pollici per allentare le viti sulla base di regolazione, quindi spostare la base di regolazione verso l'alto o verso il basso fino all'altezza desiderata. Serrare le viti per completare la regolazione dell'altezza del cuscino toracico. Ripetere la stessa operazione sull'altro lato, assicurandosi che entrambi i lati siano simmetrici.

Fase 7: Regolazione della larghezza del cuscino toracico: intervallo di regolazione di 70 mm su ciascun lato.



Utilizzare una chiave a brugola da 4 pollici per allentare le viti sulla base di regolazione, quindi spostare la base di regolazione a sinistra o a destra fino a ottenere la larghezza desiderata. Serrare le viti per completare la regolazione della larghezza del cuscino toracico. Ripetere la stessa operazione sull'altro lato, assicurandosi che entrambi i lati siano simmetrici.

Fase 8: Regolazione della profondità del cuscinetto toracico



Allentare le 2 viti mostrate nella foto sopra utilizzando la chiave n. 3, regolare l'asta in acciaio inossidabile nella posizione desiderata, quindi serrare le viti per completare la regolazione della profondità del cuscinetto toracico. Eseguire gli stessi passaggi sull'altro lato, assicurandosi che entrambi i lati siano simmetrici.

Fase 9: Regolazione della profondità del cuscino toracico



Allentare le viti indicate dalle frecce nella foto sopra utilizzando una chiave a brugola da 3. Regolare il cuscino toracico all'angolazione desiderata, quindi serrare le viti per completare la regolazione. Ripetere la stessa operazione sull'altro lato, assicurandosi che entrambi i lati siano simmetrici.

Fase 10: Apertura e chiusura del cuscino toracico



Apertura: Tirare verso l'alto la maniglia in plastica dei perni di bloccaggio per far scorrere il cuscino toracico verso l'esterno, facilitando l'uscita dell'utente dal sedile. Chiusura: Tirare verso l'alto la maniglia in plastica del perno di bloccaggio, quindi ruotare il cuscino toracico nella posizione desiderata. Quando si sente un clic, la chiusura è completa.

Fase 10: Blocco e sblocco delle rotelle



Quando la sedia è in uso, le ruote devono essere bloccate. Per bloccare la ruota, premere la piastra del freno con la punta del piede fino a quando il freno non è completamente inserito.



Per spostare il prodotto, è necessario rilasciare il freno. Per rilasciare il freno, sollevare la piastra del freno con la punta del piede fino a quando il freno non è completamente disinserito.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e monitoraggio del prodotto può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Pulire regolarmente il prodotto con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi o detergenti. • Asciugare con un panno morbido pulito e asciutto. • Assicurarsi che non si accumulino sporco o detriti intorno ai freni o alle ruote. • Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo, cloro o prodotti a base di solventi, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide.
- Lubrificare le ruote con un po' d'olio se cigolano. • Controllare regolarmente che tutte le viti siano fissate e serrate correttamente.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che i freni funzionino correttamente.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare la sedia da soli. Contattare un rivenditore autorizzato.

Lista di controllo:

Per mantenere il prodotto in buone condizioni, controllare prima di ogni utilizzo e regolarmente quanto segue:

| Controllare le condizioni e la funzionalità | ogni volta | Settimanale |
|---|------------|-------------|
| Molle a gas | X | |
| Stabilità del telaio | X | |
| Supporti di fissaggio (viti, manopole) | X | |
| Freni | X | |
| Sponde di protezione | X | |
| Poggiatesta | X | |
| Schienale, sedile, separatore gambe | | X |
| Perni di regolazione | X | |
| Maniglia di inclinazione/reclinazione | X | |
| Poggiapiedi | | X |
| Cinture di sicurezza | X | |

CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. In caso di trasferimento del prodotto, ricordarsi di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utilizzatore. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da uno specialista autorizzato.

RICICLO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e deve essere smaltito, contattare il proprio rivenditore specializzato. Se si desidera procedere autonomamente al riciclaggio, chiedere all'azienda locale di smaltimento rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di gravi lesioni.

Non conservare il prodotto per un periodo di tempo prolungato vicino a fonti di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte di freddo. Tenere lontano da fiamme libere e fonti di scintille. Rispettare le condizioni di stoccaggio e stivaggio dei prodotti.

- In un luogo asciutto e temperato. Proteggere il prodotto imballandolo da polvere e corrosione (ad esempio elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata). Conservare tutte le parti rimosse insieme
- nello stesso posto (o individuarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.

- Tutti i componenti devono essere riposti senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

SPECIFICHE TECNICHE

822158S :

| | |
|----------------------------|---|
| Dimensioni complessive | Lunghezza 72 cm x Larghezza 49,5 cm |
| Dimensioni dello schienale | Altezza 34,5 cm x Larghezza 35 cm |
| Dimensioni della seduta | Prof. 32 cm x Larghezza 28/33/38 cm x H 55/57/59 cm |
| Peso del telaio | Alluminio |
| Peso ausilio | 15 kg |
| Portata massima | 100 kg |

822158L :

| | |
|----------------------------|--|
| Dimensioni complessive | Lunghezza 77 cm x Larghezza 50 cm Altezza 100/107 cm |
| Dimensioni dello schienale | Altezza 48 cm x Larghezza 41 cm |
| Dimensioni della seduta | Profondità 36 cm x Larghezza 33/38/42 cm x Altezza 56/58/60 cm |
| Peso del telaio | Alluminio |
| Peso ausilio | 16 kg |
| Portata massima | 100 kg |

PERIODO DI UTILIZZO

La durata di vita prevista di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi componente che si sia rotto a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contattare il distributore presso cui è stato acquistato il prodotto per eventuali reclami. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazioni o usura non sono coperti da questa garanzia. Contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto per applicare la garanzia.



*Identités—ZA Pole 49
Bd delaChanterie
49124 SaintBarthélemy d'ANJOU*



***Poids maximum autorisé 100 kg
Maximum weight authorized 100 kg
Peso máximo permitido 100 kg***

