



## ASTA PORTAFLEBO Manuale d'istruzioni

RIF. 823133

### IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario. Utente: Se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio medico o il distributore prima di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi rischi e danni. Consultare il proprio medico o il proprio medico prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Il medico o il distributore vi consiglierà e vi informerà sull'uso più appropriato al vostro caso. Distributore: il presente manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utenti di questo prodotto.

### MONTAGGIO E UTILIZZO




**Si prega di ispezionare attentamente tutte le parti per verificare la presenza di crepe/rotture prima dell'uso. Le persone con gravi disabilità o che non sono in grado di camminare senza un ausilio non devono tentare di utilizzare questo prodotto senza assistenza.**

- Questo prodotto è uno strumento speciale per infusione. Non tirare o appendere altri oggetti con forza e non farlo oscillare dai bambini durante l'uso.
- La robustezza e l'affidabilità dell'installazione del supporto per infusione devono essere controllate regolarmente ogni anno.
- L'ambiente di utilizzo del prodotto deve avere un'umidità relativa non superiore al 90%, una temperatura compresa tra 40°C e 50°C in un ambiente con gas non corrosivo.
- Il gancio, la puleggia, la base e la manopola devono essere puliti regolarmente per garantire che siano sempre puliti e igienici.

## METODO DI INSTALLAZIONE

1. Installare la base e le rotelle.
  - Rimuovere la base in lamiera d'acciaio e la copertura antipolvere in ABS bianco, installare le rotelle su ciascun piede della base e la copertura antipolvere sulla parte superiore della base in ghisa.
2. Installare il gancio.
  - Estrarre i raccordi blu a quattro ganci, installarli sulla parte superiore dell'asta interna del porta infusione e fissarli.
3. Collegare la base e l'asta esterna.
  - Svitare l'estremità inferiore dell'asta esterna, inserirla nella base e utilizzare una chiave esagonale (fornita nella confezione).
  - Serrare le viti nella parte inferiore della base.
4. Regolare l'altezza del porta infusione.
  - Regolare la manopola, regolare l'asta per infusione all'altezza appropriata, verificare che le viti siano ben strette, pronto per l'uso.

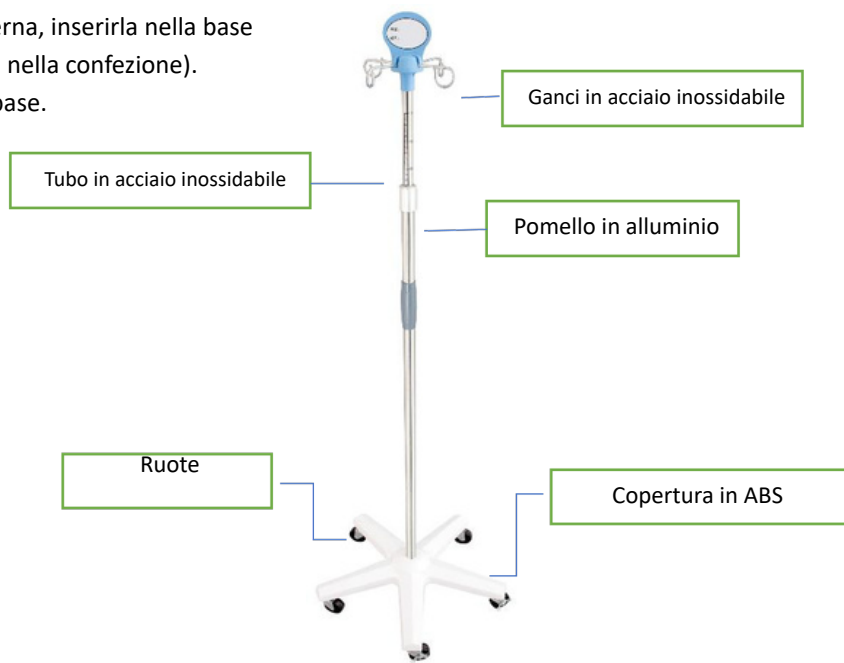

## CURA E MANUTENZIONE

Pulire con un detergente delicato e acqua, asciugare con un asciugamano.

## CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. In caso di trasferimento del prodotto, ricordarsi di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da un tecnico autorizzato.

## RICICLO

Quando il prodotto diventa inutilizzabile e devi smaltirlo, contatta il tuo rivenditore specializzato. Se desideri procedere autonomamente al riciclaggio, chiedi informazioni alle aziende locali di smaltimento rifiuti per le linee guida sullo smaltimento.

## GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITES fornirà parti di ricambio per qualsiasi componente che si sia rotto a causa di difetti di fabbricazione, progettazione o fabbricazione. Contattare il distributore presso cui è stato acquistato il prodotto per eventuali reclami. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto per applicare la garanzia.