



**ROLLATOR 4 RUOTE ALLUMINIO**  
Istruzioni per l'uso **DISPOSITIVO MEDICO**

RIF. 826078



SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O NELLE ISTRUZIONI PER L'USO

	Indirizzo del produttore		Invito a consultare il manuale d'uso
	Data di fabbricazione		Rispettare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento del prodotto		Non tollera l'umidità
	Peso massimo dell'utente		Dispositivo medico

# ISTRUZIONI ITALIANO

## IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio operatore sanitario o il distributore prima di utilizzare questo prodotto per evitare rischi e danni.

Consultare il proprio medico o operatore sanitario prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Lui/lei ti consiglierà e ti informerà sull'uso più appropriato al tuo caso.

Distributore: questo manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utilizzatori di questo prodotto.

## DESTINAZIONE PRODOTTO

Il deambulatore in alluminio a 4 ruote è un ausilio alla deambulazione per persone con mobilità ridotta. Questo deambulatore è progettato per uso interno ed esterno e si ripiega per riporlo o trasportarlo facilmente.

## SICUREZZA

La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Non superare il limite massimo di peso di 135 Kg.
- Non superare il limite massimo di carico nel cestello (5 kg). Trasportare solo carichi nel cestello. Non appendere oggetti pesanti al deambulatore poiché ciò potrebbe comprometterne la stabilità.
- Assicurarsi che tutte le parti (ruote, cavi, maniglie e manopole) siano sicure e in buone condizioni.
- Non utilizzare il deambulatore su scale o scale mobili.
- Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore.
- Il deambulatore è un ausilio per la deambulazione. Non è una sedia a rotelle. Non è progettato per trasportare una persona seduta sopra. Tale utilizzo potrebbe danneggiare le ruote e la struttura del deambulatore stesso. Il deambulatore potrebbe indebolirsi e non soddisfare più le sue caratteristiche meccaniche in un utilizzo futuro. Utilizzare il deambulatore solo come supporto per la deambulazione.
- Non utilizzare il deambulatore per camminare all'indietro.
- Non apportare alcuna modifica al deambulatore mentre è in uso.
- Controllare che i freni funzionino correttamente prima dell'uso.
- Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il suolo.
- Quando il deambulatore è in posizione stazionaria, i freni devono essere bloccati. Non tentare di spostare il deambulatore se i freni sono bloccati.
- Assicurarsi di mettere le mani su ciascuna maniglia in modo che il deambulatore possa trovarsi nella posizione di forza parallela.
- Prestare attenzione quando si sale sui marciapiedi o si cammina su superfici in pendenza, irregolari o scivolose. In caso contrario, si potrebbe verificare un rischio significativo di cadute o lesioni.
- Non utilizzare il deambulatore su pendii bagnati, ghiacciati o innevati.
- Se qualche parte è danneggiata, rotta o usurata, contattare il rivenditore.

## USO E MONTAGGIO

1. Rimuovere il deambulatore e tutti i suoi componenti dall'imballaggio.
2. Aprire il deambulatore e spingere il sedile verso il basso, assicurarsi che le cerniere laterali siano in posizione aperta e bloccata.
3. Installare lo schienale inserendo ciascuna estremità nelle fessure previste. Il "clic" indica che lo schienale è installato correttamente.
4. Regolare l'altezza delle maniglie. Le altezze devono essere le stesse a destra e a sinistra. Bloccare i tubi stringendo le manopole su entrambi i lati. Assicurarsi che i cavi rimangano all'esterno della struttura e che i tubi non siano schiacciati o piegati.

5. L'altezza corretta per le maniglie è quando si sta in posizione eretta con le mani sulle maniglie senza piegare i polsi. 6. Per rallentare, premere leggermente le maniglie dei freni con le dita. Stringere contemporaneamente le maniglie dei freni sui lati destro e sinistro.

7. Per bloccare i freni, ad es. per fermare il deambulatore, spingere entrambe le maniglie dei freni con decisione verso il basso finché non si bloccano da sole.

8. Per sbloccare i freni, sollevare entrambe le maniglie dei freni.

## CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e monitoraggio del prodotto può comportare il rischio di lesioni gravi.

La mancata cura e monitoraggio del prodotto può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Pulire regolarmente il deambulatore con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi, detergenti o solventi.
- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporco o detriti intorno all'asse, ai freni o alle ruote.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide.
- Lubrificare le ruote con un po' d'olio se cigolano.
- Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti e bulloni. Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiate o usurate.
- Controllare che i freni funzionino prima di ogni utilizzo.
- Controllare i freni di stazionamento spingendo le maniglie in posizione bloccata, quindi provando a spingere il deambulatore.
- In caso di malfunzionamento, non riparare da soli il deambulatore. Consultare un rivenditore autorizzato.

### • Lista di controllo:

Per mantenere il deambulatore in buone condizioni, controllarlo prima di ogni utilizzo e controllarlo regolarmente come segue:

CONTROLLO PRODOTTO	sempre	settimana	mese	anno
Clip e pomello per la regolazione dell'altezza		X		
Saldatura strutturale alle ruote		X		
Pulizia	X			
Viti e elementi di fissaggio		X		
Stabilità del telaio e dello schienale			X	
Condizioni del sedile				X
Freni	X			

## RICICLO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile ed è necessario smaltirlo: rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Se desideri effettuare il riciclaggio per conto tuo, chiedi alla tua società locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

## STOCCAGGIO

La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di lesioni gravi.

- Non conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un radiatore) o vicino a una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.
- Rispettare le condizioni di conservazione del prodotto:
  - In un luogo asciutto e temperato
  - Proteggi il tuo prodotto da polvere, corrosione (es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salmastra).
- Conservare insieme tutte le parti rimosse nello stesso posto (o localizzarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

## DURATA PRODOTTO

L'aspettativa di vita di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione per un utente. Oltre questo periodo il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente multiutente (come una casa di cura o un ospedale), la durata potrebbe ridursi.

## DATI TECNICI

Dimensioni complessive	Larghezza 60 x profondità 74 x altezza 82 / 97.5 cm
Dimensioni del sedile	larghezza 35 x profondità 33 x altezza 58,5 cm
Larghezza tra le maniglie	47,4 cm
Carico massimo della borsa	5 kg
Peso massimo supportato	135 kg

## GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di difetti di fabbricazione, progettazione o produzione. Contatta il distributore da cui hai acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contatta il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto per applicare la garanzia.