



eFOLDi

Manuale d'uso

Model: Power Chair HBLD3-D



SunTechUKLtd

Indice

1	Benvenuto	2
2	Termini, condizioni e disclaimer	3
3	Panoramica del prodotto	6
4	Componenti	7
5	Indicazioni di sicurezza	9
6	Istruzioni di piegatura	13
7	Guida alla carrozzina	17
8	Batteria e ricarica	21
9	Controlli e manutenzione	25
10	Specifiche tecniche	26
11	Appendice	27

Benvenuto

Grazie per aver scelto un prodotto eFOLDi come soluzione per la tua mobilità.

Sono Sumi Wang, fondatore di SunTech UK, e desidero darti il benvenuto nella famiglia di utenti eFOLDi.

SunTech UK produce una gamma di tecnologie assistive per aiutarti a ottenere il massimo dalla vita. La nostra missione è offrire ai nostri clienti libertà, amicizia e divertimento con una gamma di soluzioni di mobilità facili da usare, pratiche e leader di mercato.

Il tuo eFOLDi è stato prodotto secondo i più alti standard e controllato dai nostri tecnici pre-vendita prima della consegna, per fornirti un prodotto che ti darà molti anni di libertà e divertimento con un servizio affidabile.

Per favore, prenditi del tempo per leggere il manuale utente e i documenti forniti prima di utilizzare il tuo eFOLDi per la prima volta; questo ti aiuterà a comprendere il prodotto e a ottenere il massimo divertimento e sicurezza dal tuo nuovo prodotto eFOLDi. Con un po' di pratica, acquisirai rapidamente familiarità con le caratteristiche del tuo eFOLDi.

SunTech UK è orgogliosa dei suoi prodotti di alta qualità e del supporto clienti, quindi ricordati di registrare il tuo prodotto su:

<https://efoldi.com/register-warranty>

Questo ci aiuterà ad assisterti in caso di eventuali difficoltà future. Sono sicuro che troverai il tuo eFOLDi un compagno affidabile e ti ringrazio per la tua fiducia nei nostri prodotti.

Cordialmente,



Sumi Wang

Termini, condizioni e disclaimer

I termini 'noi', 'nostro', 'SunTech UK' e 'SunTech UK Ltd' indicano SunTech UK Limited, società registrata nel Regno Unito, a garanzia limitata, registrata presso la Companies House, numero 06906908. Il termine 'sito web' indica il sito disponibile online su www.efoldi.com. I termini 'tu', 'tuo', 'utente' e 'conducente' indicano la persona che utilizza l'eFOLDi, indipendentemente da qualsiasi persona che gestisca l'eFOLDi per conto dell'utente, se diversa dall'utente, inclusa la gestione generale, la manutenzione, le riparazioni e così via.

Accordo di acquisto

Accettando la consegna di questo eFOLDi, ti impegni a non cambiare, alterare o modificare questo eFOLDi e/o qualsiasi parte fornita con esso o successivamente per esso, e/o rendere inoperante o non sicuro qualsiasi protezione, schermo o altra caratteristica di sicurezza di questo prodotto; non omettere, rifiutare o trascurare di installare eventuali kit di aggiornamento che possano essere forniti di volta in volta da SunTech UK Ltd per migliorare e/o preservare l'uso sicuro di questo prodotto. Accetti inoltre di rispettare i termini e le condizioni contenuti nel presente documento e come possono essere rivisti e aggiornati sul nostro sito web, con applicazione immediata. Utilizzando l'eFOLDi e/o gli accessori e/o i componenti forniti con/per l'eFOLDi, l'utente riconosce di aver letto e compreso gli usi e le limitazioni del prodotto senza eccezioni. Ciò non costituisce una rinuncia a qualsiasi garanzia implicita, che il cliente mantiene come previsto dalla legge.

Le garanzie saranno nulle e SunTech UK Ltd non accetterà alcuna responsabilità in qualsiasi modo, in caso di uso improprio e/o abuso dei prodotti, in parte o in tutto, da parte dell'utente e/o di persone non autorizzate, che può includere (ma non limitarsi a): il mancato rispetto da parte dell'utente di tutti i requisiti legali e le linee guida, ovunque e comunque venga utilizzato o destinato all'uso, mancanza di manutenzione o manutenzione inappropriata,

manutenzione (diversa dalla manutenzione ordinaria descritta in questo manuale) da parte di chiunque non sia autorizzato, riparazioni non approvate, smontaggio non autorizzato del veicolo e/o dei componenti inclusi incluso (ma non limitato a) pacco batteria/e e controller, modifiche o alterazioni non approvate, mancato rispetto preciso e completo delle procedure di piegatura e apertura, danni o lesioni comunque causati, mancata applicazione di tutte le precauzioni di sicurezza ragionevoli e appropriate in ogni momento, uso improprio del veicolo e/o parti e/o accessori utilizzati da più di una persona in qualsiasi momento, uso in qualsiasi sport competitivo, gare, acrobazie, salti o altre attività simili.

La nostra responsabilità e quella dei nostri fornitori, nei tuoi confronti e/o di terzi in qualsiasi circostanza, è limitata al costo sostenuto dall'utente per i prodotti idonei acquistati. I prodotti idonei accettabili per la restituzione, come indicato nella politica di reso, sono disponibili sul sito web all'indirizzo: www.efoldi.com/return-policy.

Le informazioni contenute in questo manuale utente sono soggette a modifiche senza preavviso. Per gli ultimi aggiornamenti e informazioni, visita il nostro sito web all'indirizzo: www.efoldi.com.



La carrozzina elettrica NON deve essere usata da persone:

- Con una disabilità mentale che richiede supervisione continua o assistenza;
- Con reazioni lente e che hanno difficoltà a gestire dispositivi di mobilità elettrica
- Che non possono azionare tutti i comandi completamente e come previsto*;
- Che non possono guidare in modo competente e appropriato in ogni momento e in tutte le condizioni;
- Che non possono mantenere un'adeguata consapevolezza di tutte le circostanze rilevanti per ogni spostamento e intraprendere le azioni appropriate necessarie per evitare incidenti;
- Che non possono sollevarlo in tutto o in parte come potrebbe essere necessario a seconda delle esigenze dell'utente*.

* A meno che non siano accompagnate da una persona sufficientemente capace e competente per svolgere tale compito

Conformità del prodotto:

Sicurezza:	EN12184
EMC:	ISO7176-21
Gestione del rischio:	ISO14971
Dispositivi medici europei:	Directive of 93/42/EEC
Classe 1	

Spedizione e consegna:

Controllando rispetto al tuo ordine di vendita o fattura, assicurati che la consegna sia completa, poiché alcuni componenti potrebbero essere imballati separatamente. Se non ricevi una consegna completa, contattaci immediatamente. In caso di danni verificatisi durante il trasporto, sia all'imballaggio che al contenuto, contatta la società di trasporto responsabile.

Panoramica del prodotto

Grazie per aver acquistato la nostra carrozzina elettrica eFOLDi. Questa sedia a rotelle elettrica ultraleggera è stata attentamente studiata e sviluppata per essere leggera, efficiente dal punto di vista energetico e facile da usare. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso, in modo da familiarizzare con tutte le varie funzioni e comprendere la manutenzione necessaria. Ciò garantirà che la carrozzina elettrica rimanga in buone condizioni e sia sicura da usare.




(a) Modalità carrozzina elettrica



(b) Modalità ripiegata

Modello: Carrozzina elettrica HBLD3-D


Componenti

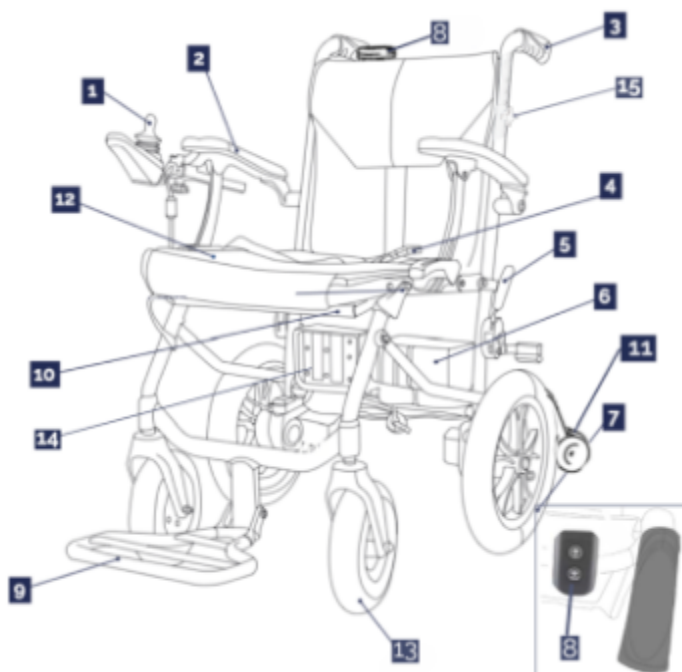

1	Comando joystick	2	Bracciolo
3	Maniglie di spinta	4	Cintura di sicurezza
5	Freni a mano (entrambi i lati)	6	Batterie
7	Ruota posteriore 12 pollici	8	Comando accompagn.
9	Poggiapiedi	10	Barra piegatura
11	Ruote anti-ribaltamento	12	Coprisedile
13	Ruota anteriore	14	Scatola di controllo
15	Manopola reg. altezza maniglie		

Tabella 1: Componenti Modello HBLD3-D

Componenti di controllo

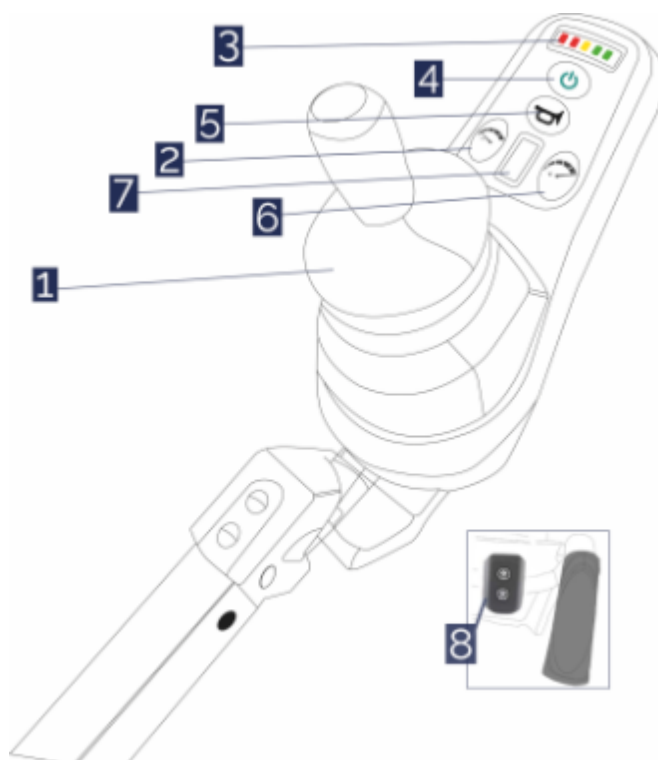

1	Comando joystick	2	Regolaz. velocità (+lenta)
3	Indicatore carica	4	Interruttore accensione
5	batteria Clacson	6	Regolaz. velocità (+veloce)
7	Indicatore velocità	8	Comando accompagnatore

Tabella 2: Comandi carrozzina elettrica HBLD3-D

Indicazioni di sicurezza



Attenzione

- È responsabilità dell'utente leggere il manuale e i documenti forniti prima di utilizzare l'eFOLDi e seguire tutte le raccomandazioni contenute, rispettare pienamente tutte le leggi locali del proprio paese e località e utilizzare l'eFOLDi con la dovuta diligenza e riguardo verso gli altri utenti della strada e i pedoni.
- L'eFOLDi è semplice da usare, ma il suo meccanismo di piegatura può causare lesioni significative se usato in modo inappropriato e maneggiato senza la dovuta cura e diligenza. Per evitare qualsiasi rischio di lesione, assicurarsi che mani, dita, gioielli, indumenti e altri oggetti non interferiscano con il meccanismo di piegatura o le parti mobili dell'eFOLDi e studiare attentamente il manuale prima di iniziare a utilizzare l'eFOLDi.
- Si consiglia all'utente di familiarizzare con la procedura di piegatura e apertura prima di avventurarsi all'esterno. L'utente dovrebbe inoltre assicurarsi di familiarizzare con i comandi e la manovrabilità della carrozzina elettrica in un'area sicura lontano da ostacoli e altri pedoni o utenti della strada.
- Caricare completamente la/le batteria/e prima del primo utilizzo e seguire le linee guida in questo manuale per prolungare la vita della batteria.

Attenzione:

NON guidare su superfici irregolari, acciottolate, fangose o con ghiaia sciolta. L'eFOLDi è progettato solo per marciapiedi, strade e aree pedonali lisce e compatte.

La distanza di arresto in pendenza può essere significativamente maggiore rispetto al terreno piano; Le temperature superficiali della carrozzina possono aumentare se esposta a fonti esterne di calore (es. luce solare)



Non può essere guidata su strada.

Assicurarsi di rallentare prima di svoltare. Non effettuare curve strette ad alta velocità. Non parcheggiare la carrozzina elettrica eFOLDi su una rampa. Non effettuare mai curve su una pendenza.

Non guidare su superfici irregolari, acciottolate, fangose o con ghiaia sciolta. La carrozzina elettrica eFOLDi è progettata solo per marciapiedi e aree pedonali lisce e compatte.

Qualsiasi veicolo può essere pericoloso per il conducente e gli altri utenti della strada e i pedoni. Guidare sempre in modo responsabile, rispettoso e con la dovuta attenzione verso gli altri.

La carrozzina elettrica eFOLDi **NON** è un giocattolo e non è raccomandata per persone sotto i 14 anni. Non permettere ai bambini di giocare con o sulla carrozzina elettrica. Il meccanismo di piegatura interno può causare lesioni alle mani piccole.

Non utilizzare la carrozzina elettrica eFOLDi fino a quando non si è letto e compreso completamente questo manuale.

Non utilizzare la carrozzina elettrica eFOLDi fino al completamento dell'assemblaggio e dell'ispezione. Si suggerisce che le persone con anomalie mentali, reazioni lente e difficoltà nella gestione di dispositivi elettrici non utilizzino la carrozzina elettrica eFOLDi da sole.

Non salire o scendere dalla carrozzina elettrica eFOLDi quando è accesa, o quando è in modalità ruota libera o con i freni a mano disattivati, o non c'è un accompagnatore che fornisca assistenza.

Non guidare la carrozzina elettrica eFOLDi in violazione delle normative nazionali e locali sul traffico.

NON avere fretta quando si piega o si apre la carrozzina elettrica eFOLDi.

Non utilizzare la carrozzina elettrica eFOLDi su terreno sabbioso o morbido.

Evitare di guidare su pendenze superiori a 6 gradi o su ostacoli superiori a 4 cm di altezza.

NON smontare o cambiare parti della carrozzina elettrica eFOLDi o sostituire parti non prodotte dal produttore senza il permesso del produttore.

Non utilizzare mai la carrozzina elettrica senza le ruote anti-ribaltamento fissate saldamente in posizione.

NON mettere per nessun motivo le mani nel telaio principale della carrozzina elettrica. Questo perché le mani e le dita possono rimanere intrappolate nelle leve e nei perni e possono essere causate lesioni gravi.



Quando si apre/piega la carrozzina elettrica assicurarsi:

- L'eFOLDi è posizionato su un pavimento o terreno piano.
- L'interruttore principale è spento.
- Tutti i perni di blocco sono correttamente fissati in posizione, come indicato nelle istruzioni e mostrato nelle illustrazioni.
- Il freno a mano è disattivato.



Controllo di sicurezza prima dell'uso:

Si raccomanda vivamente di eseguire un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo per assicurarsi che l'eFOLDi funzioni in modo fluido e sicuro.

- Controllare il corretto gonfiaggio dei pneumatici. Mantenere ma non superare la pressione raccomandata dal produttore indicata sui pneumatici;
- Controllare tutti i collegamenti elettrici. Assicurarsi che siano sicuri e non corrosi
- Controllare e testare il sistema frenante;
- Controllare frequentemente eventuali elementi di fissaggio allentati e altri componenti;
- Controllare che le ruote anti-ribaltamento siano fissate saldamente.



Avviso di compatibilità elettromagnetica (EMC)

Le interferenze provenienti da sorgenti di onde radio come stazioni radio, stazioni TV, radio ricetrasmittenti o telefoni cellulari possono causare il rilascio dei freni del prodotto di mobilità, il movimento autonomo o il movimento in direzioni non previste. Possono inoltre danneggiare permanentemente il sistema di controllo della carrozzina elettrica.

L'intensità dell'energia elettromagnetica interferente può essere misurata in volt per metro (V/m). Ogni prodotto di mobilità può resistere alle EMI fino a una certa intensità. Questo è chiamato "livello di immunità EMI". Più alto è il livello di immunità EMI, maggiore è la protezione dalle EMI.

Attualmente la carrozzina elettrica eFOLDi ha un livello di immunità di almeno 20V/m, che fornisce una protezione utile dalle comuni sorgenti di EMI.

Le sorgenti di EMI irradiate possono essere ampiamente classificate in tre tipi:

- 1) Ricetrasmittitori portatili. (normalmente con antenna montata sul dispositivo)
- 2) Ricetrasmittitori mobili a medio raggio, come quelli utilizzati nelle auto della polizia, camion dei pompieri, ambulanze e taxi. (normalmente con antenna montata sul veicolo)
- 3) Trasmettitori e ricetrasmittitori a lungo raggio, come i trasmettitori commerciali (torri di antenne per trasmissioni radio e TV) e radio amatoriali (HAM).

Altri tipi di dispositivi portatili, come telefoni cordless, computer portatili, radio AM/FM, televisori e piccoli elettrodomestici come rasoi elettrici e asciugacapelli di solito non causano problemi di EMI.

Istruzioni di piegatura

Modalità carrozzina elettrica



Si prega di studiare le istruzioni e le illustrazioni per familiarizzare con le procedure di piegatura e operare solo una parte mobile alla volta.



A



B



C


A Una volta rimossa dall'imballaggio, posizionare la carrozzina su una superficie stabile. Posizionare una mano sulla parte superiore dello schienale e l'altra mano sulla barra del meccanismo di piegatura sotto il sedile, nella parte anteriore della carrozzina piegata.

B Infine spingere le due mani in direzioni opposte fino a quando il sedile è aperto a 90 gradi e si sente un chiaro suono di "clic".

C Aprire il poggiatesta, dalla posizione verticale alla posizione orizzontale a 90 gradi.



D

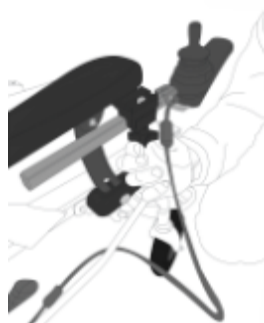

E

D Inserire il braccio del joystick all'interno del telaio e spingerlo in una posizione orizzontale comoda, dove sia facile per la mano raggiungere il joystick.

E Una volta soddisfatti della posizione orizzontale del braccio del joystick, bloccarlo stringendo il morsetto. Infine fissare saldamente le ruote anti-ribaltamento sul retro della carrozzina elettrica prima di guidare.




Modalità carrozzina elettrica

Modalità piegata



Si prega di studiare le istruzioni e le illustrazioni per familiarizzare con le procedure di piegatura e operare solo una parte mobile alla volta.

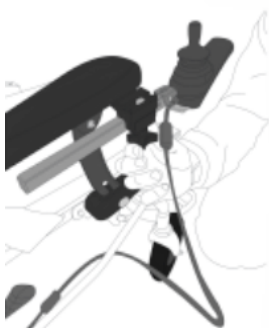

A



B



C

A Allentare il morsetto di serraggio per rilasciare il braccio del joystick.

B Estrarre il braccio del joystick e posizionarlo sul sedile della carrozzina elettrica.

C Piegarle il poggiatesta a 90 gradi in posizione verticale.



E



F

E Quindi posizionare una mano sulla parte superiore della barra dello schienale e l'altra sulla barra del meccanismo di piegatura sotto il sedile.

F Premendo la barra del meccanismo di piegatura e avvicinando le mani per chiudere e piegare la carrozzina eFOLDi. La carrozzina elettrica è pronta per essere riposta o trasportata.

La ruota anteriore deve essere rivolta all'indietro per una corretta piegatura.



Modalità piegata

Guida della carrozzina elettrica



Controllo di sicurezza prima dell'uso
- vedi Guida alla sicurezza


La carrozzina elettrica eFOLDi è adatta per l'uso in ambienti interni o per la guida sul marciapiede ed è progettata per superfici lisce e piane. Quando guidi il tuo eFOLDi, scegli un percorso con buone condizioni stradali. Strade o percorsi con pavimentazione irregolare, buche e altri pericoli ridurranno la durata della carrozzina elettrica e influiranno sulla tua sicurezza.

Qualsiasi deviazione da superfici piane/orizzontali non deve superare una pendenza di 1:10 (6 gradi). Per qualsiasi salita ci sono molti fattori da considerare. Come: la pressione e le condizioni dei pneumatici, le condizioni della superficie (se bagnata, ghiacciata o scivolosa, e questo include la copertura di foglie e/o altri detriti, sconsigliamo di percorrere la pendenza), la carica delle batterie e il peso dell'utente, tutti questi influenzeranno le prestazioni.

Attenzione:

La distanza di arresto sulle pendenze può essere significativamente maggiore rispetto al terreno piano; Le temperature superficiali della carrozzina elettrica possono aumentare quando esposta a fonti esterne di calore (es. luce solare)

Joystick e centralina di controllo

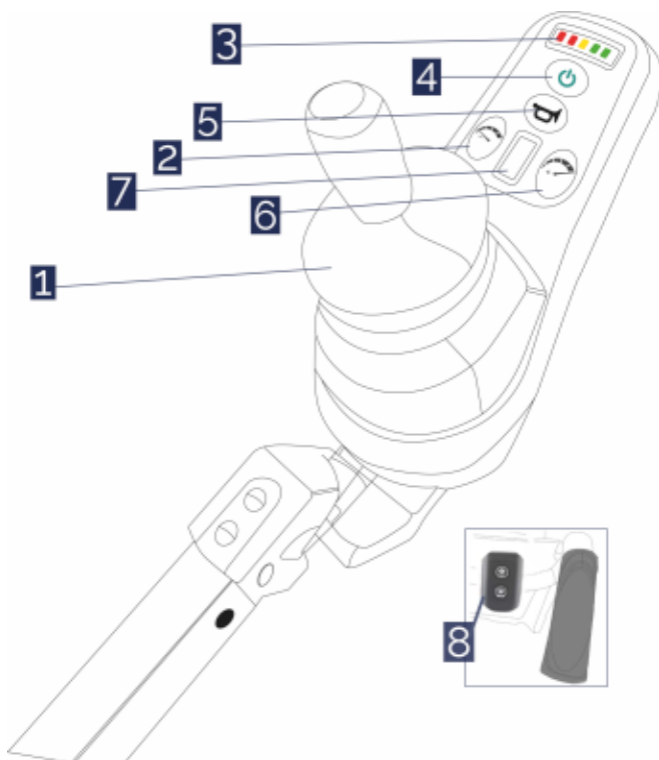

Main Power switch



Eseguire il controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo - vedi sezione Guida alla sicurezza.

Utilizzo della carrozzina elettrica

- Per avviare - Accendere l'interruttore principale e premere il pulsante di accensione sul joystick per attivare la carrozzina.
- Per fermarsi - Spegnerne il pulsante di accensione sul joystick e applicare i freni manuali, situati su entrambi i lati della carrozzina. Quando si parcheggia su una rampa/pendenza, il freno elettromagnetico potrebbe non essere sempre sufficientemente forte. Utilizzare sempre il freno manuale insieme al freno elettromagnetico.
- Regolare la velocità - Usare il pulsante di regolazione per ridurre/aumentare la velocità
- Guidare in avanti - Spingere la leva del joystick in avanti.
- Girare a sinistra/destra - Spingere la leva del joystick a sinistra/destra.
- Guidare all'indietro - Spingere la leva del joystick all'indietro.
- Usare il comando accompagnatore - Premere il pulsante Vai per andare avanti; Premere il pulsante Indietro per andare all'indietro. Quando il Comando Accompagnatore è in uso, la carrozzina non risponde più al controller Joystick.
- Il controller joystick (1) controlla la direzione e la velocità contemporaneamente, spingere lentamente il joystick verso la direzione di marcia, quindi la carrozzina eFOLDi inizierà a muoversi, spingere ulteriormente il joystick e si noterà una maggiore accelerazione.
- Regolazione velocità - più lenta (2) Si trova appena sopra la maniglia di controllo sul lato sinistro e diminuisce la velocità per rendere la carrozzina eFOLDi più facile da controllare.

- **Display di alimentazione(3)**

Mostra la carica residua della batteria.

- **Pulsante (4)**

Accende e spegne premendo il pulsante (assicurarsi che l'interruttore principale sia acceso).

- **Clacson (5)**

Posizionato al centro del pannello di controllo, usarlo per avvisare gli altri pedoni della propria presenza.

- **Regolazione velocità - più veloce (6)**

Si trova appena sopra la maniglia di controllo sul lato destro, e premendo il pulsante aumenta il livello di velocità della carrozzina elettrica. Prestare sempre attenzione alla propria velocità.

- **Display velocità (7)**

Indica la velocità attualmente selezionata.

- **Comando accompagnatore (8)**

Permette a un assistente di alimentare la carrozzina

- **Modalità ruota libera/sblocco motore:**

Spegnere l'interruttore principale dalla centralina sul retro della carrozzina elettrica. Questo attiverà la modalità ruota libera/bypass motore, in cui si avvertirà comunque una certa resistenza.

Non utilizzare la carrozzina elettrica su una rampa/pendenza se la batteria è scarica senza applicare i freni manuali, non dispone di freno elettromagnetico senza alimentazione



Freni manuali

Batteria e ricarica



La batteria della carrozzina elettrica eFOLDi è stata progettata e costruita specificamente per la carrozzina elettrica eFOLDi. Questa batteria non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli indicati in questo manuale. Qualsiasi uso improprio o smontaggio di questa batteria può danneggiarla fisicamente e/o elettricamente, internamente e/o esternamente e non sarà coperto dalla garanzia. La batteria non contiene componenti riparabili o sostituibili dall'utente. La batteria della carrozzina elettrica eFOLDi è in realtà un pacco batteria, composto da un certo numero di celle al litio/ioni, ma semplicemente denominato 'batteria' per semplicità in tutto questo manuale. Questa batteria ha caratteristiche e requisiti di ricarica diversi dal vecchio e ancora comune tipo piombo/acido o piombo/gel. Non utilizzare mai un caricatore per batterie al piombo per caricarla.

Per garantire il miglior utilizzo a lungo termine della batteria, osservare sempre le seguenti regole di sicurezza.

- Il connettore di ricarica deve essere maneggiato con cura per evitare danni
- Caricare la batteria SOLO con il caricatore approvato.
- Non utilizzare mai un caricatore per batterie al piombo sulla batteria eFOLDi
- Non posizionare mai la batteria vicino, sopra o contro fonti di calore.
- Assicurarsi che nessuna parte metallica possa toccare (o 'cortocircuitare') batteria o caricatore, terminali, connettori, pin o qualsiasi altro conduttore elettrico o parti conduttrici.
- Evitare impatti fisici eccessivi e vibrazioni della batteria.


- Non tentare di smontare, sezionare o deformare la/le batteria/e o l'involucro
- Non immergere la batteria in alcun liquido (inclusa l'acqua).
- Non mescolare tipi diversi di batterie.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare caricatori modificati o danneggiati.
- Non lasciare la batteria in carica per più di 24 ore.
- Conservare la batteria in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
- Smaltire la batteria solo in conformità con le leggi locali e regolamenti
- Le batterie non devono essere conservate per lunghi periodi senza essere ricaricate. Si raccomanda di caricare la batteria mensilmente per prolungarne la durata.
- Non conservare mai la batteria quando è significativamente scarica.

Display livello batteria

Accendere l'alimentazione, la spia del display nella fila anteriore si accenderà, la carica completa mostrerà 5 luci (2 rosse, 1 gialla, 2 verdi). Quando le due luci rosse lampeggiano, indica che la batteria necessita di ricarica.



Per rimuovere la batteria per la ricarica, premere il pulsante rosso verso il basso, tenere la batteria dall'esterno e rilasciarla dalla carrozzina elettrica. Per reinserirla, far scorrere la batteria nella guida dell'alloggiamento, spingerla fino a sentire un clic, quindi la batteria è inserita saldamente.

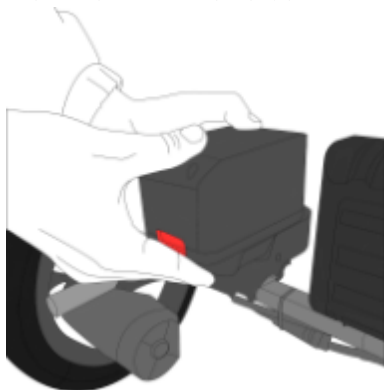

Attenzione:

Rimuovere la batteria e ricaricarla una volta al mese se non in uso (le batterie della carrozzina elettrica idealmente non dovrebbero essere conservate nella carrozzina).

Caricatore e ricarica

Utilizzare solo il caricatore originariamente fornito con la nuova carrozzina elettrica eFOLDi o il caricatore sostitutivo fornito da SunTech UK Ltd per l'uso con il prodotto. L'uso di un caricatore non approvato invaliderà qualsiasi garanzia e potrebbe causare gravi danni alla batteria e/o al prodotto eFOLDi. Il caricatore non deve essere utilizzato con/o per altri dispositivi poiché i danni causati al caricatore e/o a qualsiasi altro dispositivo non saranno coperti dalla nostra garanzia.

Si raccomanda vivamente di assicurarsi che il caricatore sia posizionato solo su superfici resistenti al calore e nulla che possa contribuire a un incendio (es. moquette, pavimenti in legno, legno, laminato o piani di lavoro in plastica).

ecc.) - il caricatore si riscalderà durante un normale ciclo di ricarica, così come la batteria.

Non lasciare la batteria in carica per più di 24 ore, poiché ciò ridurrà la durata e le prestazioni della batteria.

Per il beneficio dei viaggiatori internazionali, il caricatore eFOLDi approvato può essere utilizzato con qualsiasi alimentazione di rete da 100 a 240 Volt, con un adattatore da viaggio adeguato.

Vedere l'immagine sotto. Inserire il caricatore nella porta di ricarica per iniziare la ricarica.



Per alcuni modelli è possibile caricare la batteria senza rimuoverla dall'alloggiamento sul retro della scatola di controllo utilizzando il caricatore eFOLDi con un adattatore di ricarica fornito. **NON utilizzare nessun altro cavo diverso dal caricatore 24VDC eFOLDi per carrozzina elettrica per caricare**



Controlli e manutenzione



- **Eseguire le seguenti ispezioni prima di utilizzare l'eFOLDi quotidianamente:**

Per pneumatici gonfiabili, assicurarsi di controllare la corretta pressione dei pneumatici e mantenerla senza superare la pressione P.S.I./BAR/kPa indicata su ciascun pneumatico (nota: i pneumatici anteriori e posteriori possono avere pressioni diverse). Assicurarsi inoltre di utilizzare la scala di pressione corretta e il numero corrispondente sul gonfiatore/misuratore di pressione.

- **Eseguire le seguenti ispezioni settimanalmente:**

Controllare il fissaggio di tutti i dadi, bulloni e viti per assicurarsi che tutte le parti siano correttamente fissate e non manchino o siano allentate. Controllare tutti i collegamenti elettrici. Assicurarsi che siano stretti e non corrosi. Freno elettromagnetico - viene utilizzato come freno di marcia. La distanza di frenata deve essere inferiore a 1,5 metri dopo aver rilasciato il joystick per fermarsi. Pressione pneumatici - Vedere i pneumatici per queste informazioni.

- **Pulizia e manutenzione**

La pulizia periodica del vostro eFOLDi aiuterà a mantenerne l'aspetto e prolungherà la vita del veicolo migliorando il valore di rivendita. Le parti in metallo e plastica possono essere pulite con un panno umido usando un detergente delicato.

Far revisionare l'eFOLDi regolarmente ogni anno.

Attenzione:

Olio e altri lubrificanti NON devono essere usati sulle seguenti parti: Pastiglie freno, cavo freno, pneumatici.

Specifiche tecniche



Materiale telaio:	Lega di alluminio
Dimensioni imballaggio:	37x60x94cm (15x24x37inch)
Dimensioni piegato:	34x58x92cm (13x23x36inch)
Dimensioni aperto:	96x58x92cm (38x23x36inch)
Ruota anteriore:	20cm (8inch)
Ruota posteriore:	30cm (12inch)
Altezza sedile:	48cm (19inch)
Peso con batteria:	17kg(38lbs)
Peso senza batteria:	15kg(33lbs)
Luogo di utilizzo:	Marciapiede e interni
Velocità:	4mph(6kmh)
Autonomia massima:	8 miglia (13km)
Portata massima:	135kg (297lbs/21stone)
Pendenza massima:	1:10 Pendenza (6 gradi)
Raggio di sterzata sx/dx:	102 (40inch)
Altezza max marciapiede:	4cm (1.5inch)
Motore:	2 x 200W, 24VDC
Batteria:	2 x 5.2Ah 24VDC Ioni di Litio
Caricatore:	Ingresso 110-220VAC, 50/60Hz, uscita 29.4V 2A
Freno:	Elettromagnetico
Interruttore:	Pulsante di accensione su joystick
Numero di ruote:	4
Tipo pneumatico:	Pieni o pneumatici


Appendice



SunTechUKLtd

25 Ormside Way, Holmethrope Industrial Estate, Redhill, Surrey, RH1

2LW TEL: +44 (0) 2031435168

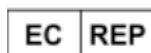

MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich,

Germany

Simboli utilizzati sull'etichetta


	European CE Marking		Manufacturer
	Authorized representative in the European community		Medical device
	Serial number		Unique Device Identification
	Date of manufacture		Refer to instructions manual
	No trash bin		UK Conformity Assessed



(Accessori eFOLDi)
www.efoldi.com/shop



SunTech UK Ltd
25 Ormside Way, Redhill,
Surrey, RH1 2LW, UK

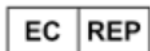

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Sito web ufficiale: www.efoldi.com
Email assistenza: services@efoldi.com
Facebook: www.facebook.com/efoldi.co.uk